




HM80D 嬰兒電子身高尺

使用說明書

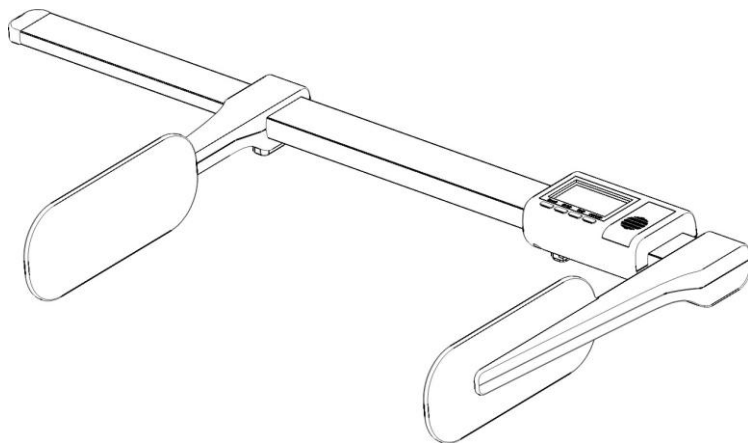

使用產品前請仔細閱讀說明書，妥善保管以供隨時查閱

標籤圖示說明

	「注意」使用產品前請仔細閱讀說明書和相關文件		請勿與一般垃圾丟棄。請依照電器用品回收規範處理
	產品製造商		產品製造年份
	用產品前請仔細閱讀說明書，依照內容操作器材		產品型號
	生產批號		產品序號
	醫療器材單一識別系統法案		產品符合有關歐洲指令規定的符合性聲明

Copyright Notice

Charder Electronic Co., Ltd.

啟德電子股份有限公司

41262 台中市大里區國中路 103 號

電話：04-2406 3766

傳真：04-2406 5612

官網：www.chardermedical.com

E-mail：info_cec@charder.com.tw

Copyright© Charder Electronic Co., Ltd. 版權所有。

授權產品為本公司其子公司或供應商所有，且受國家著作權法及國際條約規定保護。未經授權而改裝、修理、或變更本產品、未嚴格遵守本公司操作與維護說明，因而發生損壞、損失或費用，則本公司與其子公司或供應商均不予負責。本說明書之內容如有更改，恕不另行通知。產品資訊如有變更，恕不另行通知。



Charder Electronic Co., Ltd.

No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,

Taichung City, 41262 Taiwan

目錄

標籤圖示說明	2
前言	5
安全事項	5
環境安全	5
產品清潔	5
產品維護	5
操作注意事項	5
產品責任及保固	6
廢棄物處理方式	6
組裝	7
A.搭配 MS3500/MS21NEOV/MS4200 磅秤組裝身高尺.....	7
B.搭配 MS5900 嬰兒磅秤組裝身高尺.....	9
C.搭配 MS2400 嬰兒秤組裝流程.....	12
按鍵操作	14
首次使用校準流程	14
電池安裝流程	15
操作流程	16
故障排除	17
產品規格	17

前言

謝謝您選購啟德產品。我們的產品的設計理念是希望能帶給使用者最舒適的感受並且享受每次使用產品時的時光。如果您有任何產品使用上的問題及疑問並且在本說明書中未能解決您的問題，請逕洽詢啟德醫療產品經銷商以協助您解決您的疑問。

安全事項



使用前請詳細閱讀使用手冊。本使用手冊包含了初次安裝、使用說明及日常維護方式。

使用安全注意事項：

- 錯誤的安裝所造成的損失不在保固範圍內。
- 此產品設計在室內使用。
- 注意使用環境溫度在 5°C 到 35°C 之間。
- 此產品完全符合電磁相容性測試。

如使用上有任何問題請洽詢全省經銷商。

環境安全

- ◆ 所有的電池都含有毒化合物，請尋找合格回收商及地點作適當的處理。
- ◆ 請勿燃燒電池。
- ◆ 使用環境的溫度高低會影響電池的使用壽命。

產品清潔

- ◆ 請勿使用大量的清水清洗電子身高尺，可能會造成無法預期的損壞。
- ◆ 請勿使用含有腐蝕性的液體或洗淨液來清潔產品。

產品維護

- ◆ 本產品不需每日保養，然而我們建議您應定期檢視產品的精準度作為維護的參考。如您發現有任何問題需要進行產品維護，敬請聯絡全省經銷商。

操作注意事項

在實際進行操作之前，請閱讀以下部份：

- ◆ 請在每次操作之前確認顯示幕出現歸零標示才開始進行操作。
- ◆ 操作完成後，顯示幕會出現穩定符號，這時可以進行紀錄。

產品責任及保固

- ◆ 當產品的設計及製造缺陷歸屬於製造商責任時，製造商負有更換或維修此產品的責任。產品保固期間為購買日起 18 個月內，請保留您的收據以證明您的購買日期；如收據遺失則由出廠日起算。
- ◆ 當發生下列損害，製造商不負有連帶責任：
 - 不當的使用方式
 - 不正確的儲存方式
 - 由非經銷商不正確的安裝
 - 改裝
 - 使用者的疏忽

如因操作、氣候或其它因素影響產品保存的狀態與材料的變異則屬製造商的責任。

廢棄物處理方式


此產品不應被當作一般家庭廢棄物來處理，請依電子廢棄物回收條例作為處理的準則。您可以聯繫環境保護署以瞭解更多電子廢棄物的處理方式及回收地點或聯繫您當初購買的經銷商處理。

組裝


A. 搭配 MS3500/MS21NEOV/MS4200 磅秤組裝身高尺

1. 請將身高尺固定板與兩顆隨附螺絲鎖在托盤背面圖示位置處。


SS-5611 身高尺掛板

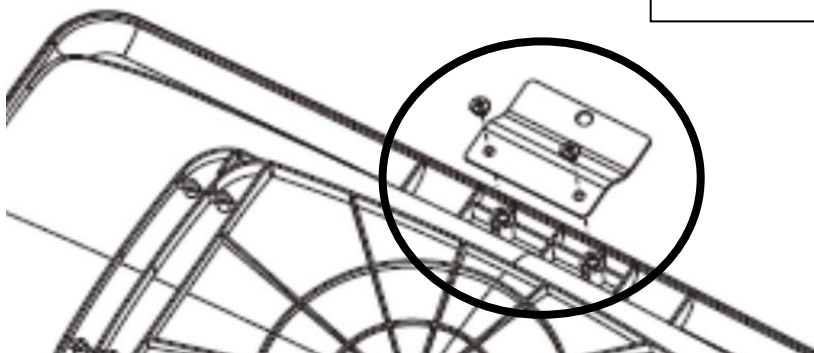


2. 將 HM80D 軌道順著固定板滑入，直到聽到卡住的聲音即完成安裝。

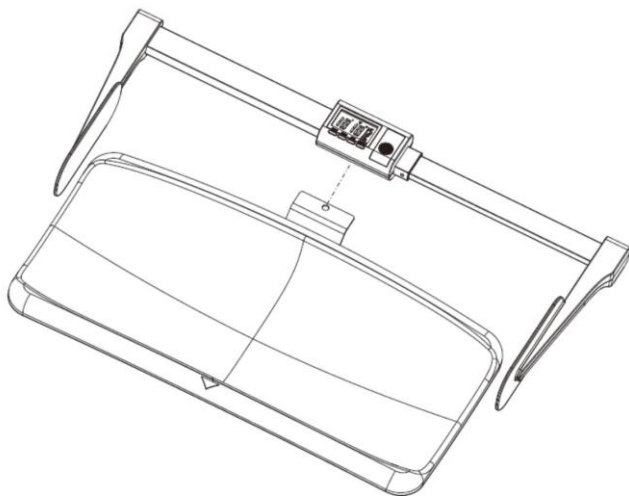

3. 當滑動至固定板位置時，請注意 HM80D 身高尺背面卡榫位置，輕壓卡榫再推入 HM80D 讓卡榫順利卡住身高尺固定板即完成安裝。

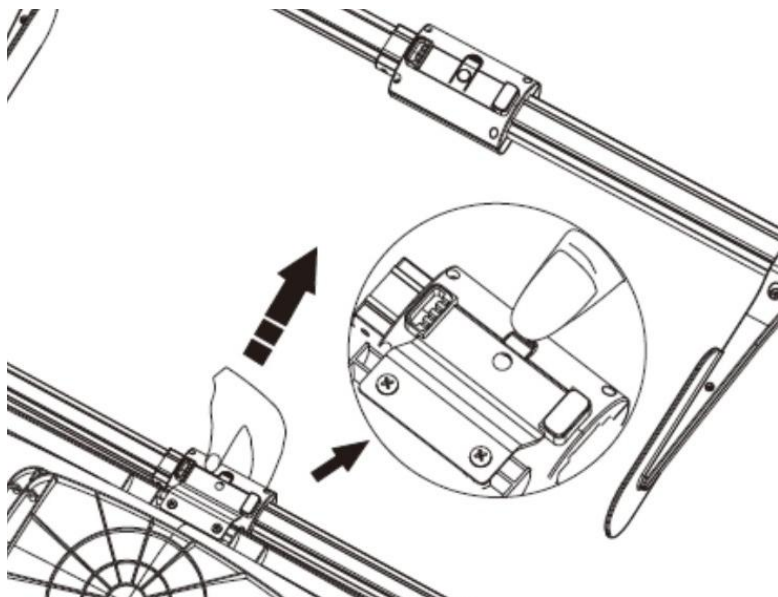


4. 安裝完成狀態如下圖。

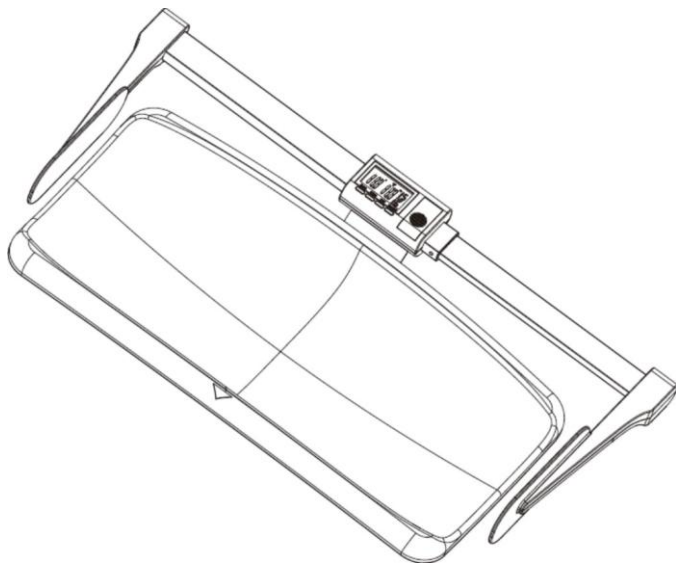


B. 搭配 MS5900 嬰兒磅秤組裝身高尺


1. 朝著使用者的方向輕推身高尺組裝蓋。

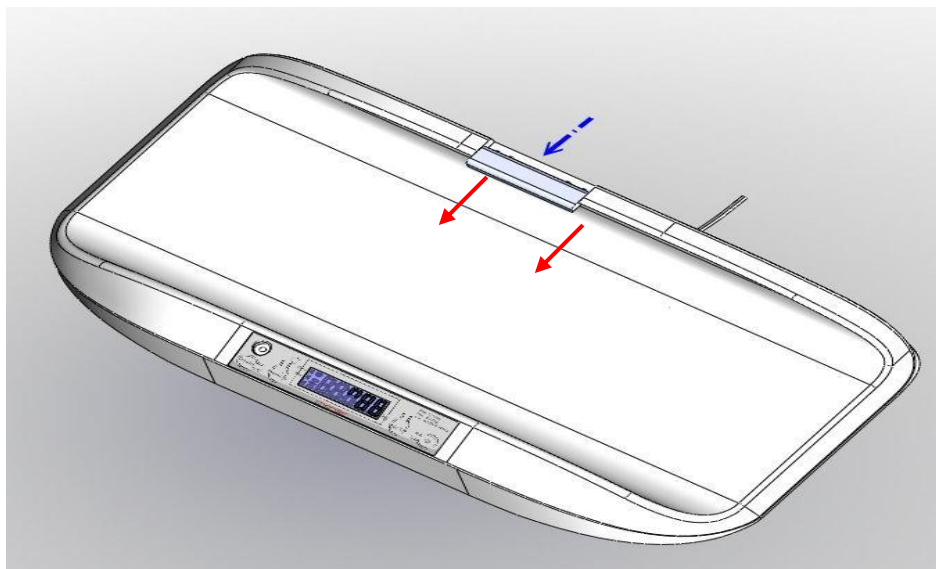


2. 將身高尺組裝蓋拿起。

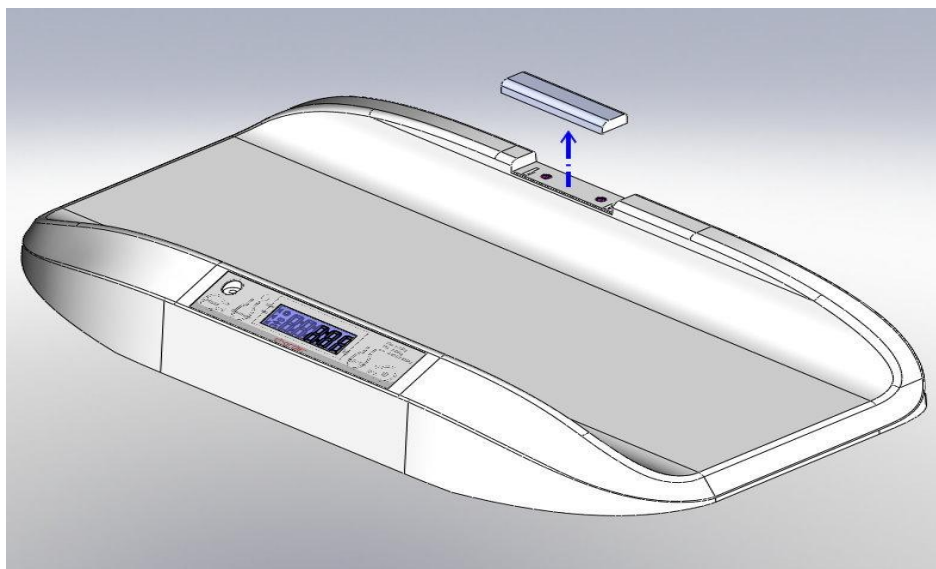


3. 將 SS-6111 掛板對準螺絲固定孔，鎖上兩顆固定螺絲。

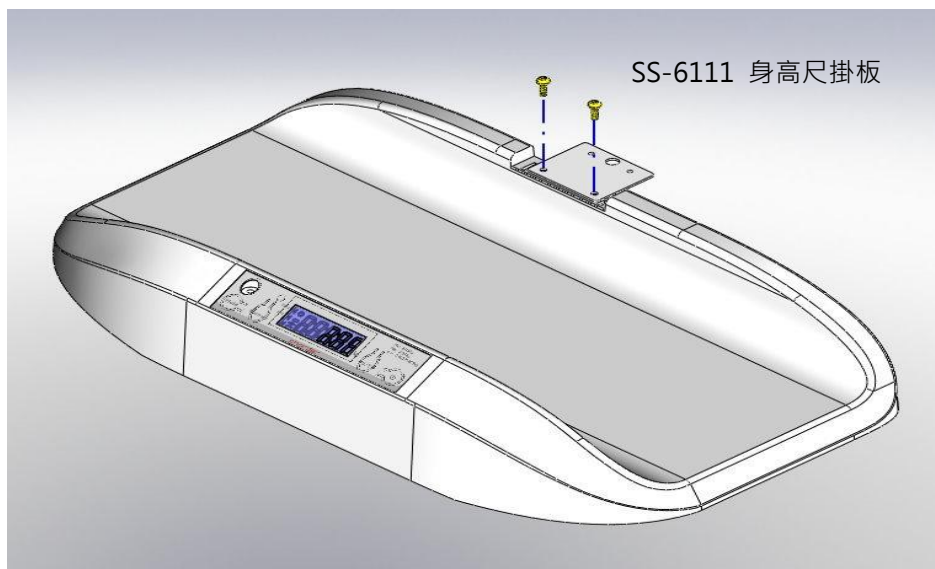

4. 將 HM80D 身高尺下方固定滑軌扣入身高尺固定板。


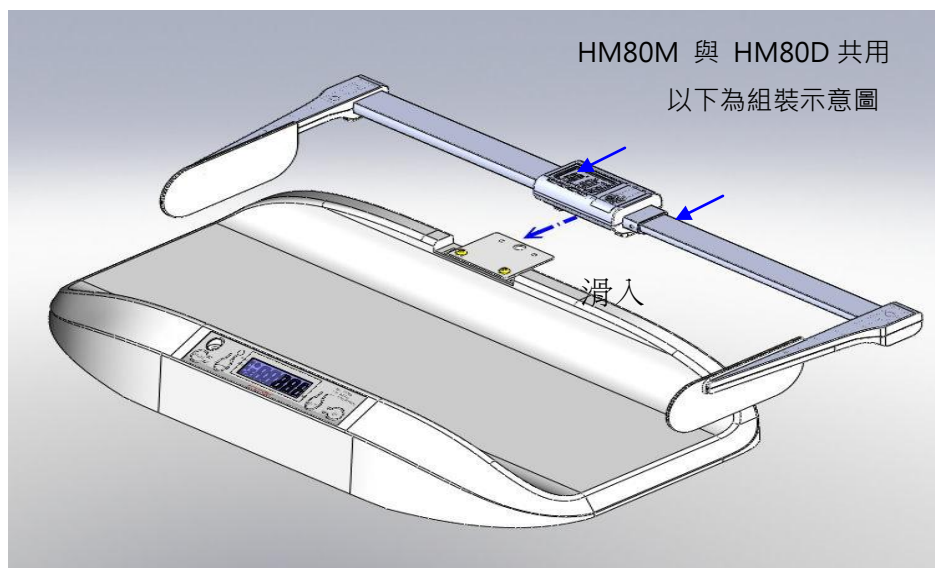


5. 將 HM80D 身高尺順著滑軌滑入到底，聽到扣住聲響表示已完全扣入，接著把身高尺組裝蓋安裝上去即完成組裝流程。

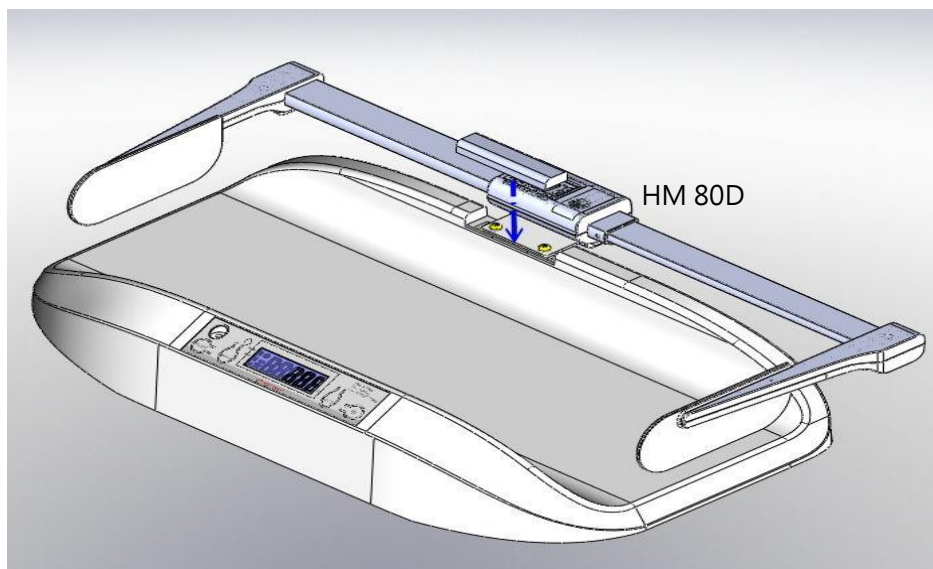


C. 搭配 MS2400 嬰兒秤組裝流程

1. 如搭配頭部靠墊使用時，身高尺應組裝在下方說明位置上。

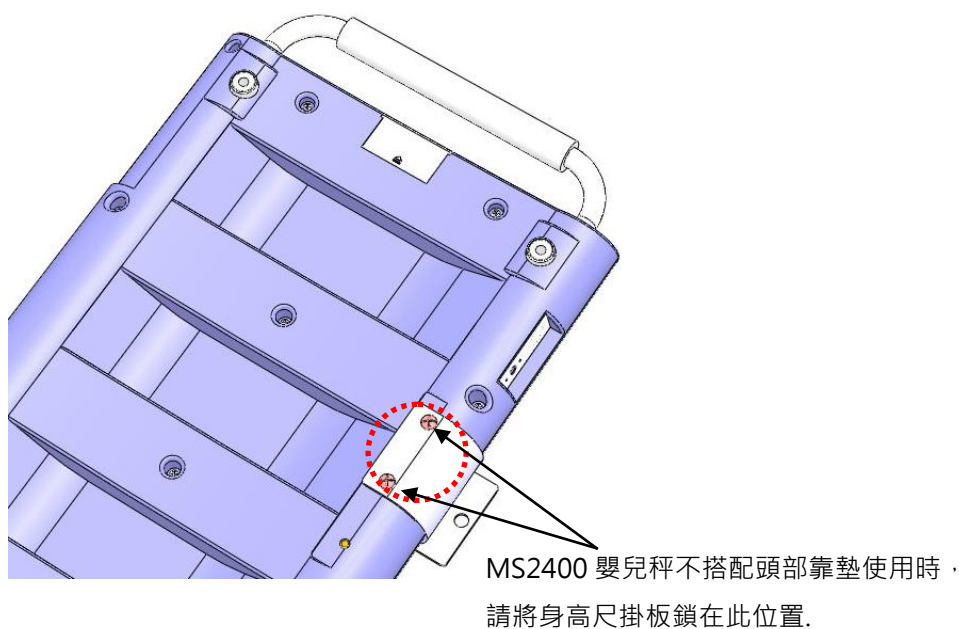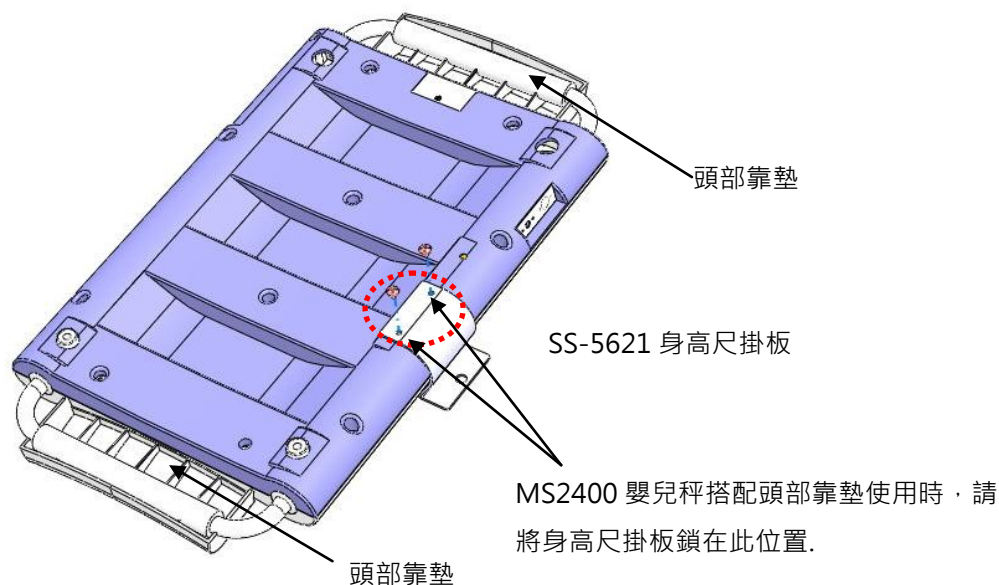

2. 安裝嬰兒身高尺 HM80D 時，順著身高尺底部滑軌滑入，直到扣住聲響表示已完全扣入，接著把身高尺組裝蓋安裝上去即完成組裝流程。

HM80M 與 HM80D 共用
以下為示意圖

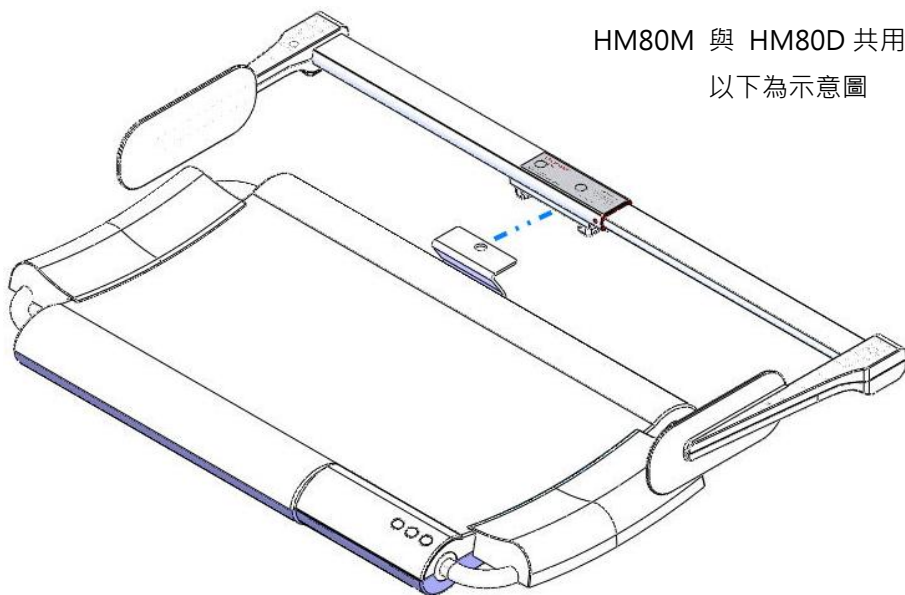

按鍵操作

功能按鍵

◆ON/OFF ◆UNIT ◆HOLD ◆RESET


1. ON/OFF 開機/關機
2. UNIT 本產品僅有公制單位(公分)顯示。
3. HOLD 身高鎖定

身高鎖定按鍵按下後，身高會鎖定，此時不論任何移動，顯示幕都是以鎖定身高顯示，再按一次即可解除並顯示目前量尺的長度。


4. RESET 重新校準

當需要重新校準時，請將身高尺移動到最小長度 35cm，並按下 RESET 校準鈕，此時顯示幕會出現 35cm，這時您的身高尺已經校準完成。


首次使用校準流程

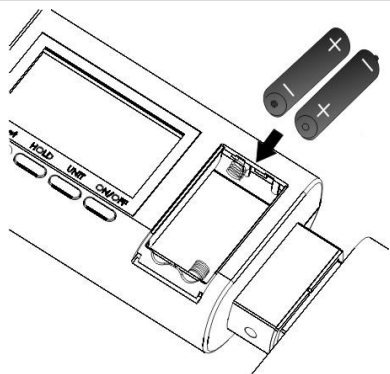

1. 首先安裝隨機附送四號電池兩顆。

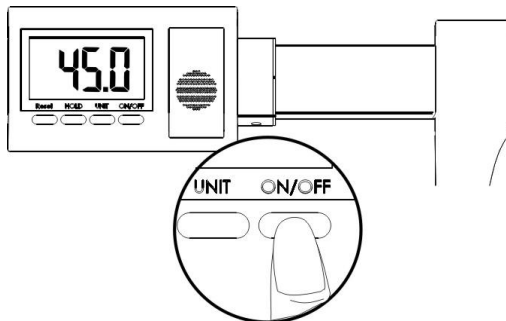


2. 按下 ON/OFF 開關作開機動作

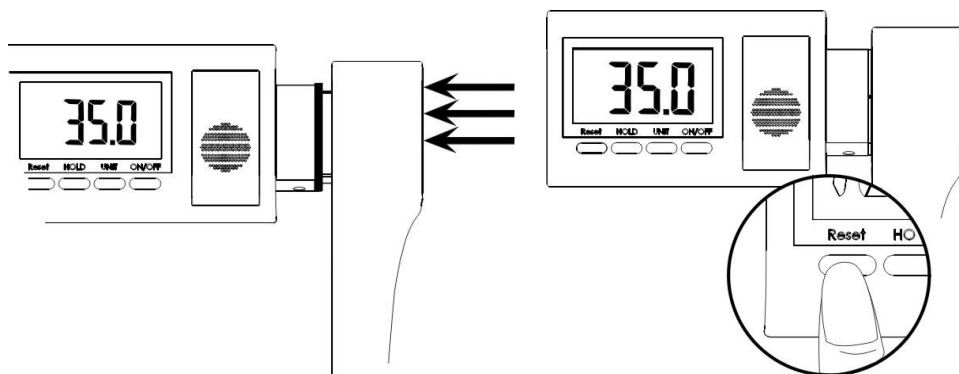

3.請將壓頭板壓到底 35.0cm 位置


4.按下 RESET 鍵作首次使用校準

電池安裝流程

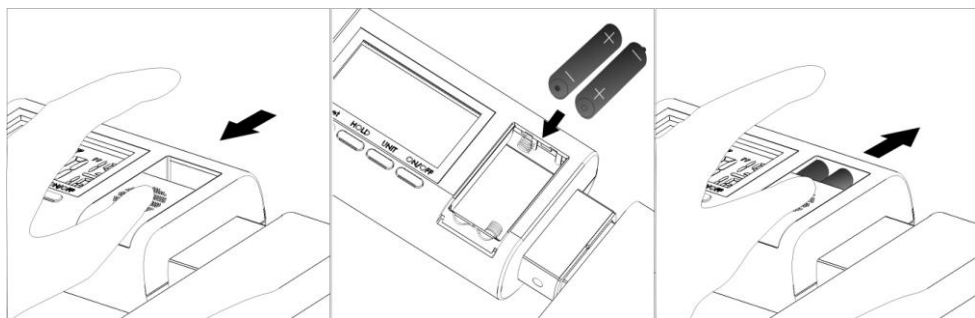


請安裝隨機附送四號電池兩顆，安裝時請注意正負極性。.

操作流程

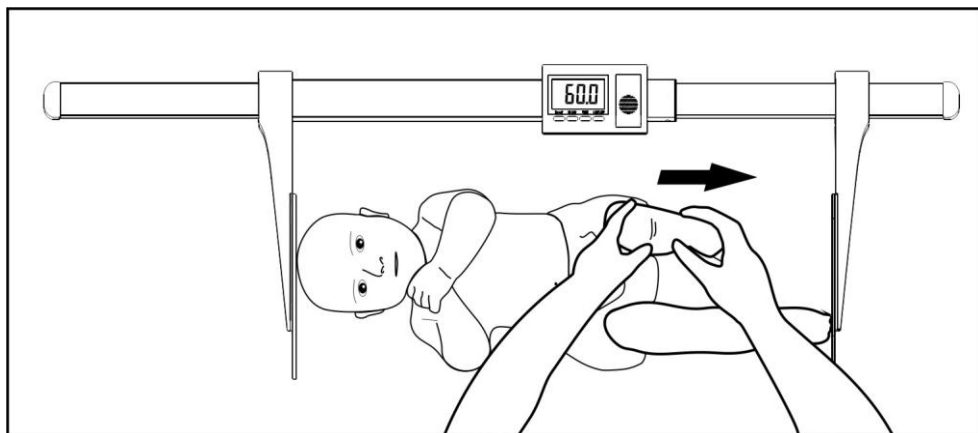


1. 請將嬰兒安穩放置，並將頭部輕靠頭部壓頭板，輕輕將嬰兒雙腳伸直並使用左手輔助輕輕固定雙腳。

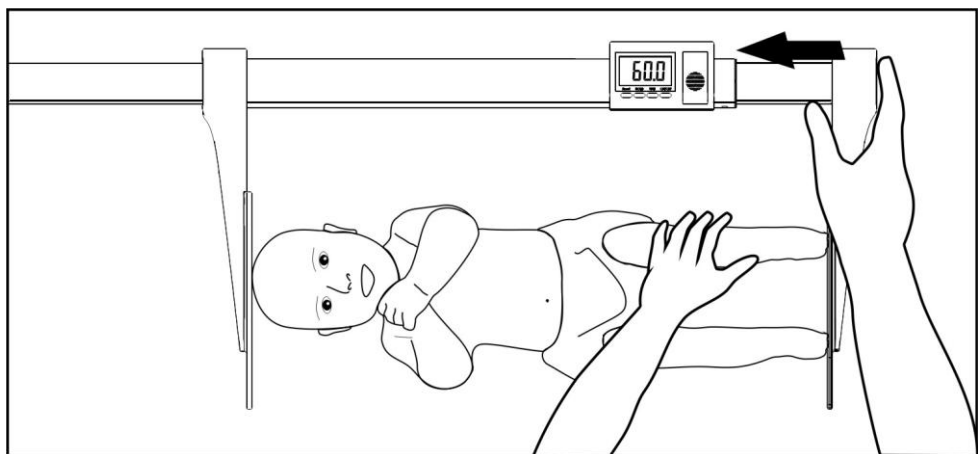

2. 左手固定雙腳後，右手將身長量尺往左推，待輕靠到嬰兒雙腳後即按下 HOLD(身長鎖定)按鍵，鎖定身長。
3. 此時嬰兒身長已被鎖定。
4. 請將嬰兒放置到安全位置。
5. 將 HM80D 鎖定的身長紀錄下來。
6. 按下 HOLD(身長鎖定)按鍵，將此功能解除。

故障排除

壓頭板掉落時請依以下流程，重新安裝壓頭板

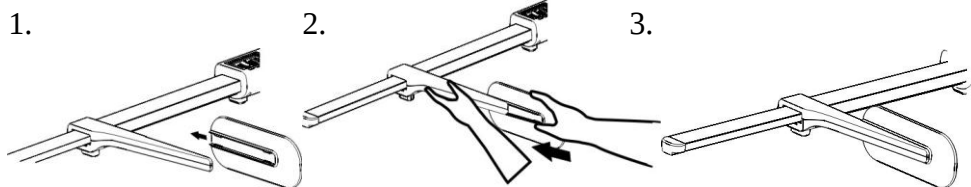

身高長數值顯示不準確

請按校準程序重新校準

產品規格

型號	HM80D
量測範圍	35 ~ 80 公分
精準度	1 公釐
誤差範圍	±2 公釐
尺寸(寬 x 高 x 長)	29 x 7 x 62 公分
重量	700 公克
操作溫度	+5°C ~ +35°C

出廠標準配件

項目.	名稱	規格	數量
1	HM80D 嬰兒身長尺	HM80D	1
2	使用者手冊	CD-IN-00427	1
3	電池	AAA 1.5V	2

[illegible]

[illegible]



製造商:



啟德電子股份有限公司

41262 台中市大里區國中路 103 號