




嬰兒數位身高尺

產品使用說明書 HM80DT

Guide Manual for HM80DT

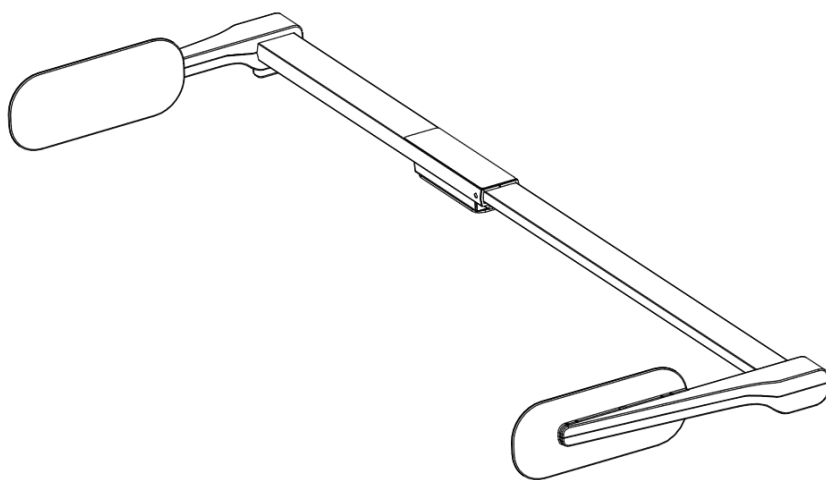


使用產品前請仔細閱讀說明書，妥當保管以供隨時查閱

目錄

I. 標籤圖形說明	4
II. 版權聲明	5
III. 安全須知	6
IV. 組裝	7
V. 使用產品	12
VI. 產品規格	14
VII. 符合性宣告頁	14

I.標籤圖形說明

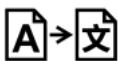	「注意」使用產品前請仔細閱讀說明書和相關文件		請勿作為一般垃圾丟棄。請依照電器用品回收規範處理
	製造商的名稱地址以及產品生產國家		B 類人體接觸設備
	使用產品前請仔細閱讀說明書，依照內容操作器材		產品類別
	產品型錄編號		醫療器材單一識別碼
	生產批次		產品序號
		歐盟代表	
		(度量衡認證機種限定) 顯示值的差異，用來定義和校驗產品	
		設備符合歐盟醫療器材指令 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC. 四位數字表示發證單位代號	
		(度量衡認證機種限定) 產品符合度量衡三級認證	
		(度量衡認證機種限定) M: 符合 2014/31/EU 非自動衡器規範 22: 認證確效年份 (例: 22 = 2022) 0122: 度量衡發證單位編號	
		表示進口商與其地址	
		表示協助資訊轉化為當地語言的公司行號與地址	

II. 版權聲明

Charder Electronic Co., Ltd.

啟德電子股份有限公司

41262 台中市大里區國中路 103 號

電話: +886-4-2406 3766

傳真: +886-4-2406 5612

官網: www.chardermedical.com

E-mail: info_cec@charder.com.tw

Copyright© Charder Electronic Co., Ltd. 版權所有。

授權產品為本公司其子公司或供應商所有，且受國家著作權法及國際條約規定保護。

未經授權而改裝、修理、或變更本產品、未嚴格遵守本公司操作與維護說明，因而發生損壞、損失或費用，則本公司與其子公司或供應商均不予負責。本說明書之內容如有更改，恕不另行通知。產品資訊如有變更，恕不另行通知。



Charder Electronic Co., Ltd.
No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

III.安全須知

感謝您選購啟德公司產品。如果您在使用產品有遇到任何說明書未清楚敘述的問題，請洽詢當地的經銷商協助解決您的疑問。使用前請仔細閱讀說明書，了解產品的安裝、使用、日常維護方式等重要資訊。

標準用途

此產品的使用目的為量測受測者身高

安全事項

- 預計產品壽命：5 年
- 請遵照使用溫度，確保量測準確度

產品清潔

- 建議使用酒精布清潔產品表面

產品責任/保固

- 產品保固期間為購買日起 18 個月內，請保留您的收據以證明您的購買日期；如收據遺失則由出廠日起算。
- 因不當的使用，不正確的儲存方式，改裝，未授權的拆解或使用者的疏忽掉落所發生的損壞，不在保固範圍內。
- 本產品如未經由啟德合格的經銷商使用原廠零件進行檢修、拆解、保養、校正等作業者，責任不在保固範圍內。


報廢回收處理

- 此產品不應被當作一般家庭廢棄物來處理，請依電子廢棄物回收條例作為處理的準則。您可以聯繫環境保護署以瞭解更多電子廢棄物的處理方式及回收地點或聯繫您當初購買的經銷商處理。


IV. 組裝

■ 搭配 MS5980


1、身高尺頭部對齊擋板第二凸點安裝

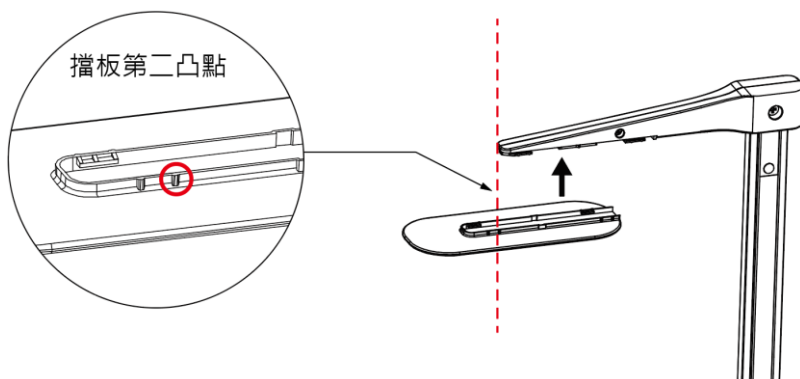


2、壓緊擋板跟身高尺，使之密合後，將擋板推入

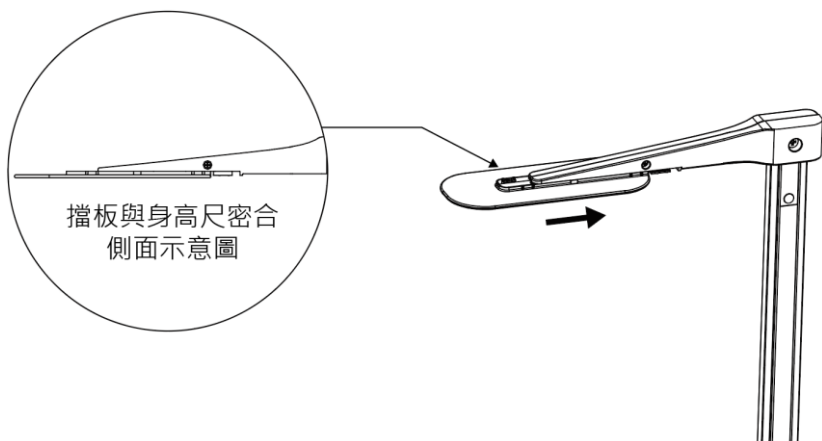


3、擋板安裝於身高尺頭部完成 (另一端也請重複 1~3 步驟)

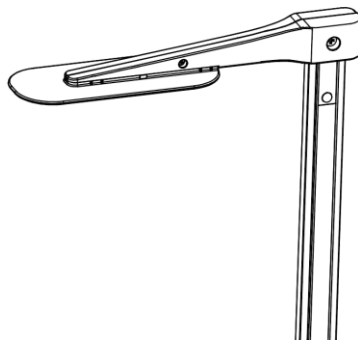


4. 使用提供的螺絲，將固定座鎖上身高尺

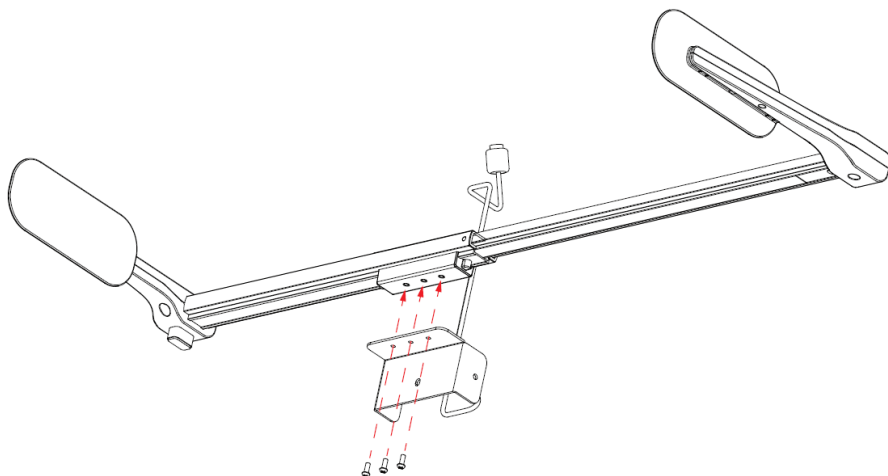


5. 將鎖上固定座的身高尺，A 孔對齊 B 孔安裝

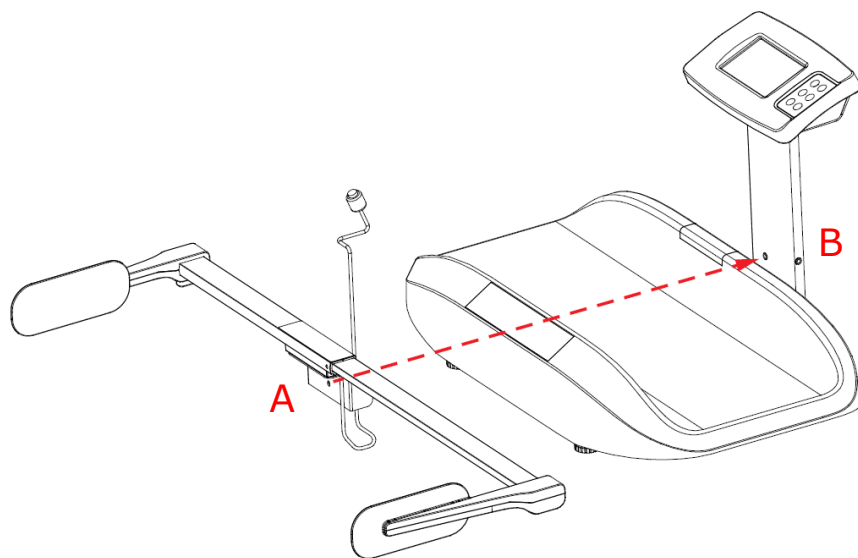


6. 於背面將螺絲逐一鎖上對應的位置。

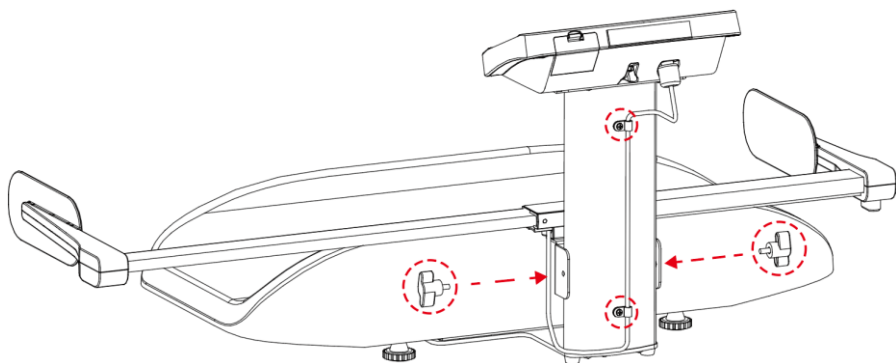


7. 插上傳輸線

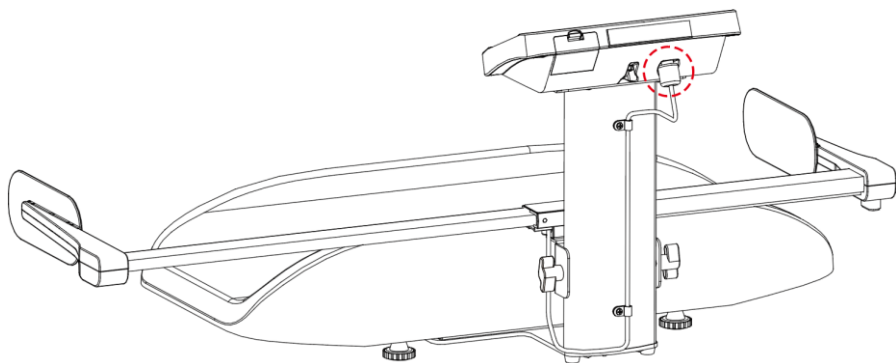

8. 於正面將螺絲鎖上對應位置

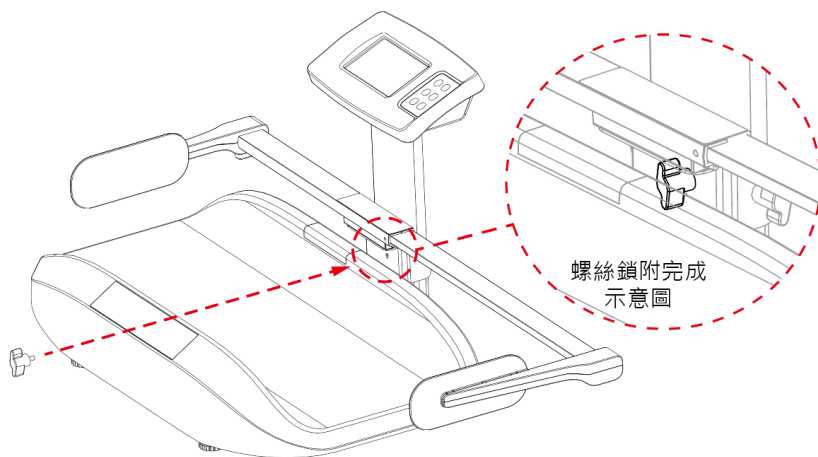


9. 安裝完成

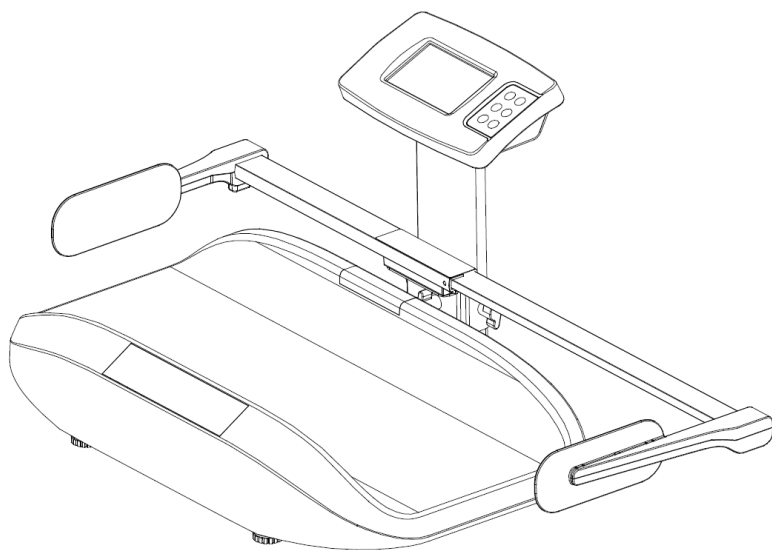


■ 搭配 MS3500

1. 用兩根螺絲，將身高尺的固定座鎖在秤台上

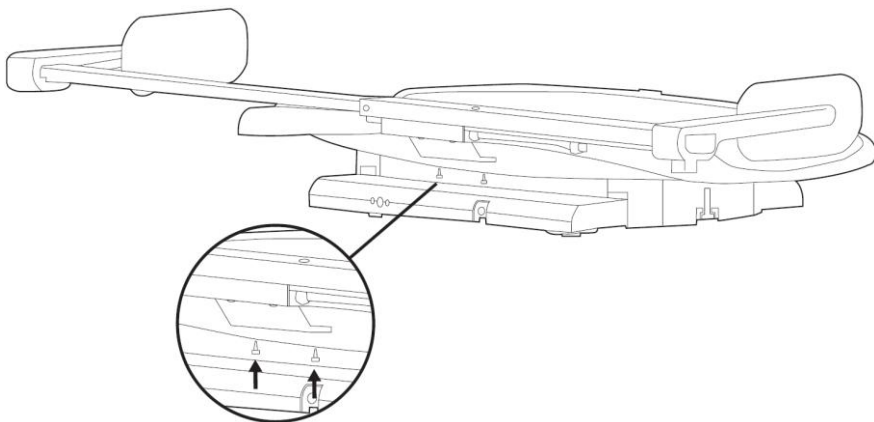


2. 身高尺傳輸線連接至秤子

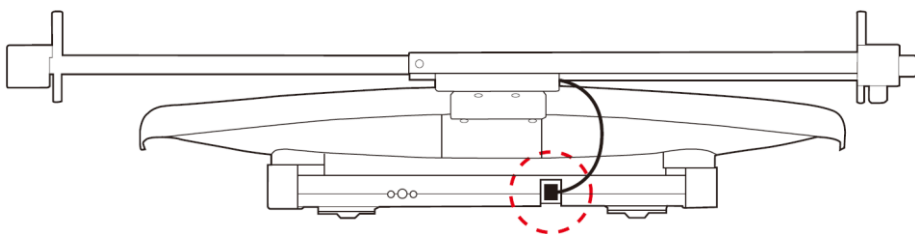


V. 使用產品


1. HM80DT 需搭配啟德的嬰兒秤使用，可將量測結果傳輸至顯示器，身高尺本身無顯示器。
2. 使用前，請先將身高尺推到最左邊進行自動校正 (設定 35 cm)。完成後，可將身高尺向右伸展，即可進行測量。

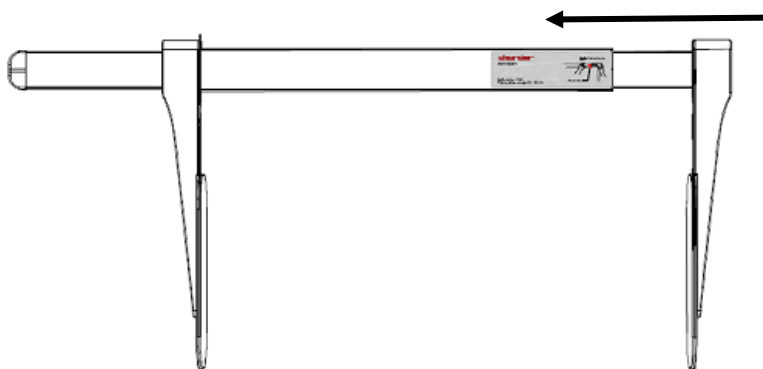

3. 將嬰兒平放於秤台中，頭部對齊一邊的擋板，先將嬰兒腿部伸直，以確保身高量測準確。

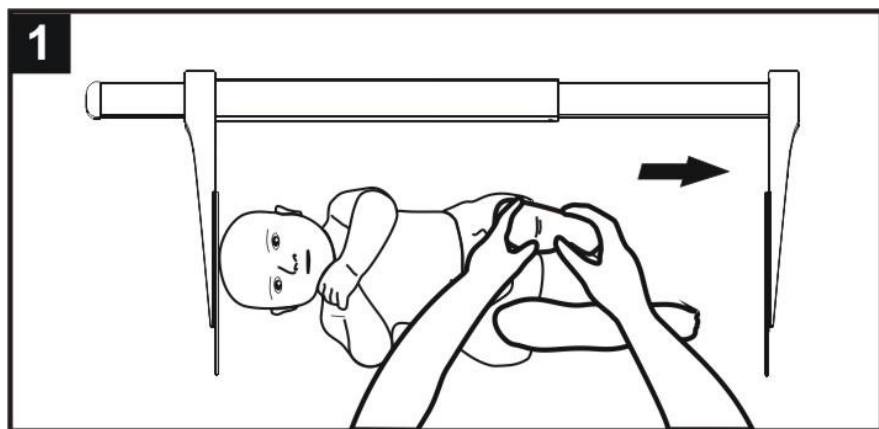

嬰兒腿部伸直後，將身高尺擋板推至對齊嬰兒足部，讀取圖示中身高尺刻度顯示即可獲得嬰兒身高數值。嬰兒秤同時會讀取量測的身高值，自動傳輸並顯示在 LCD 上。

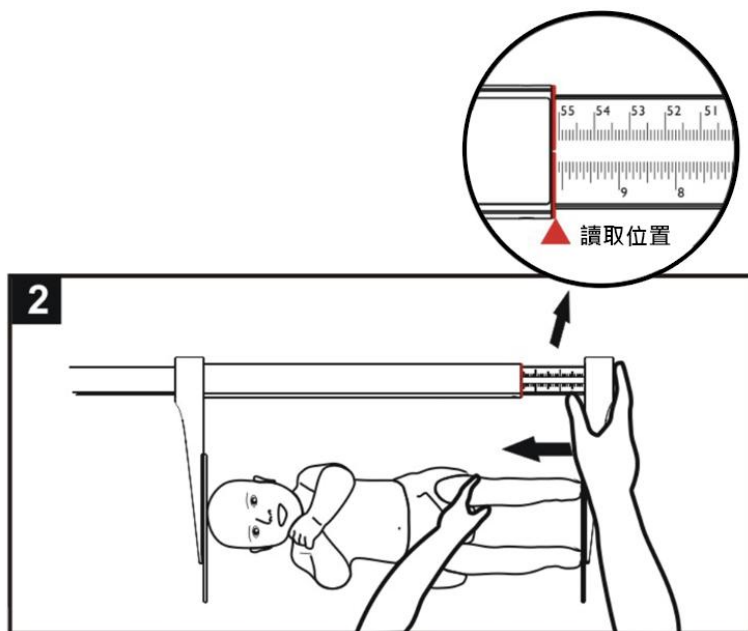

VI. 產品規格

型號		HM80DT
身高量測	最高量程	35-80 cm
	精度	0.1 cm
尺寸	整體	870 (W) x 290 (D) x 72(H) mm
	產品重量	約 0.6 kg
資料傳輸		傳輸線
電源		顯示器提供
操作溫度 & 濕度		5°C~35°C 15%~85% RH

VII. 符合性宣告頁

產品依照下列歐盟調和標準製造生產

	(EU) 2017/745 Regulation on Medical Devices Classification: Class I with measuring function
---	---

RoHS Directive 2011/65/EU and Delegated Directive (EU) 2015/863

製造商:



啟德電子股份有限公司

41262 台中市大里區國中路 103 號