




使用說明書


HM80P

身高尺

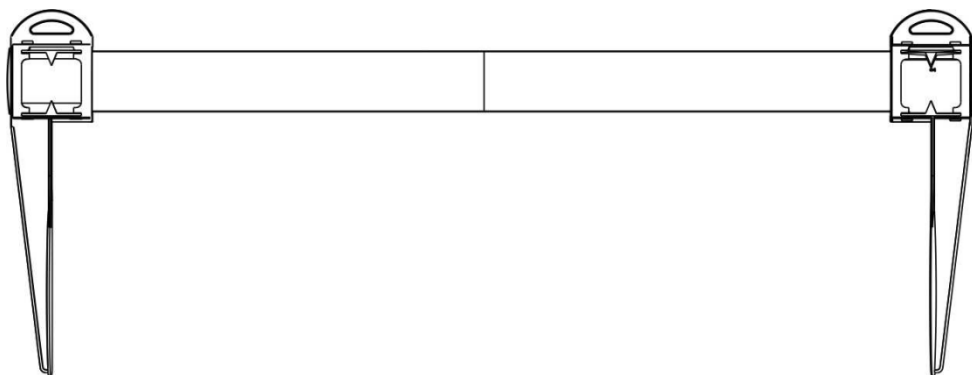

請妥善保存此說明書以供未來查閱之用.

標籤圖示說明(請對照產品本身的標籤)

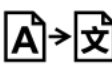	「注意」使用產品前請仔細閱讀說明書和相關文件		請勿作為一般垃圾丟棄。請依照電器用品回收規範處理
	製造商的名稱地址以及產品生產國家		B 類人體接觸設備
	使用產品前請仔細閱讀說明書，依照內容操作器材		產品類別
	產品型錄編號		醫療器材單一識別碼
	生產批次		產品序號
		歐盟代表	
		(度量衡認證機種限定) 顯示值的差異，用來定義和校驗產品	
		設備符合歐盟醫療器材指令 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC. 四位數字表示發證單位代號	
		(度量衡認證機種限定) 產品符合度量衡三級認證	
		(度量衡認證機種限定) M: 符合 2014/31/EU 非自動衡器規範 22: 認證確效年份 (例: 22 = 2022) 0122: 度量衡發證單位編號	
		表示進口商與其地址	
		表示協助資訊轉化為當地語言的公司行號與地址	



警告

本產品非醫療器材僅作為重量測量用途；使用前應詳閱使用說明書

版權宣告

Charder Electronic Co., Ltd.

啟德電子股份有限公司

41262 台中市大里區國中路 103 號

電話：04-2406 3766

傳真：04-2406 5612

官網：www.chardermedical.com

E-mail：info_cec@charder.com.tw

Copyright© Charder Electronic Co., Ltd. 版權所有。

授權產品為本公司其子公司或供應商所有，且受國家著作權法及國際條約保護。未經授權而改裝、修理、或變更本產品、未嚴格遵守本公司操作與維護說明，因而發生損壞、損失或產生費用，則本公司與其子公司或供應商均不予負責。本說明書之內容如有更改，恕不另行通知。產品資訊如有變更，恕不另行通知。



Charder Electronic Co., Ltd.
No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

目錄

I. 安全須知	5
II. 組裝	6
III. 產品操作	7
IV. 產品規格	9
V. 符合性宣告頁	12



I. 安全須知

A. 前言

感謝您選購啟德公司產品。如果您在使用產品時遇到任何說明書未清楚敘述的問題，請洽詢當地的經銷商協助解決您的疑問。使用前請仔細閱讀說明書，了解產品的安裝、使用及日常維護方式等重要資訊。

產品用途

此產品應由專業人士操作，用來量測受測者的身高。

操作注意事項

- 產品應安裝於平穩、平坦、堅硬、防滑的平面。
- 操作產品前，請確保所有零件已確實鎖緊固定。
- 測量精準度需要受測者的腳、背部和頭部筆直對齊。請注意，一整天的身高可能會有所不同。

安全事項

- 預計產品壽命：5 年
- 安裝不當將使保固失效
- 產品應在室內使用
- 請遵照使用溫度，確保量測準確度

產品清潔

- 產品表面建議使用柔軟無絨布搭配 70%-75%酒精進行清潔。
- 請勿使用大量的清水清洗，以免造成內部電子零件的損壞。
- 請勿使用含有腐蝕性的液體或清潔液清潔產品。

產品責任/保固


- 產品保固期間為購買日起 18 個月內，請保留您的收據以證明您的購買日期；如收據遺失則由出廠日起算

- 因不當的使用，不正確的儲存方式，改裝，未授權的拆解或使用者的疏忽掉落所發生的損壞，不在保固範圍內
- 本產品如未經由啟德合格的經銷商使用原廠零件進行檢修，拆解，保養，校正等作業者，不在保固範圍內

意外事件回報

與設備有關的任何嚴重事件應報告給製造商、歐盟代表（如果設備在歐盟成員國使用）和用戶/主體成員國的主管當局。

II. 組裝

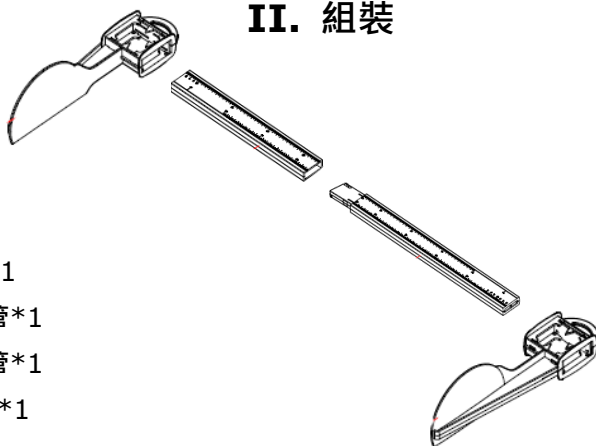


1. 左壓頭板*1
2. 左身高尺管*1
3. 右身高尺管*1
4. 右壓頭板 *1

注意：一側顯示公分；另一個側顯示英寸


III. 產品操作

A. 左手如何使用身高尺

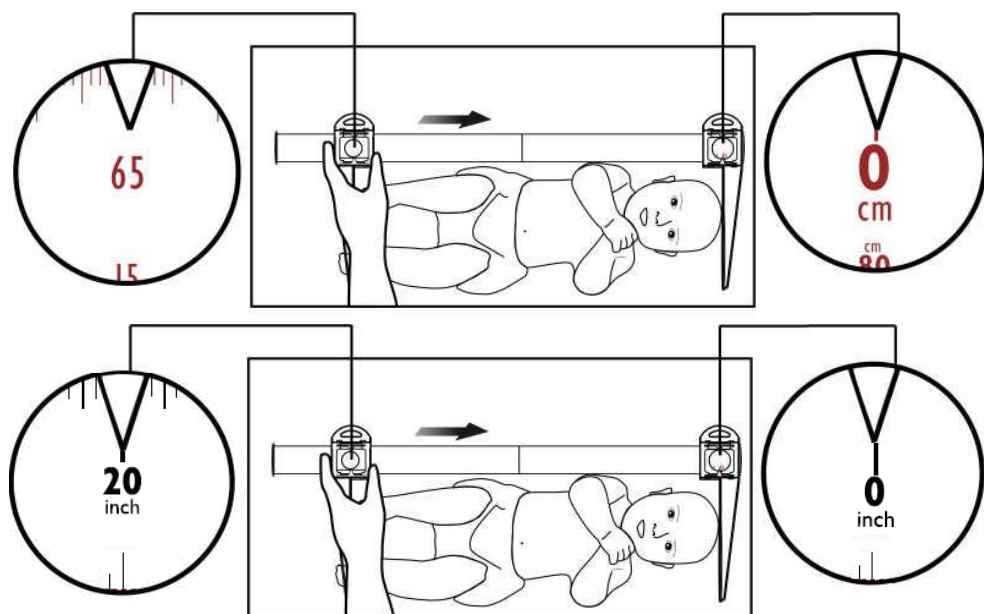

1. 在 0 公分處安裝右壓頭板
2. 輕輕將嬰兒雙腳伸直
3. 滑動左壓頭板待輕靠到嬰兒雙腳.
4. 左側上的讀數是嬰兒的身高

B. 右手如何使用身高尺

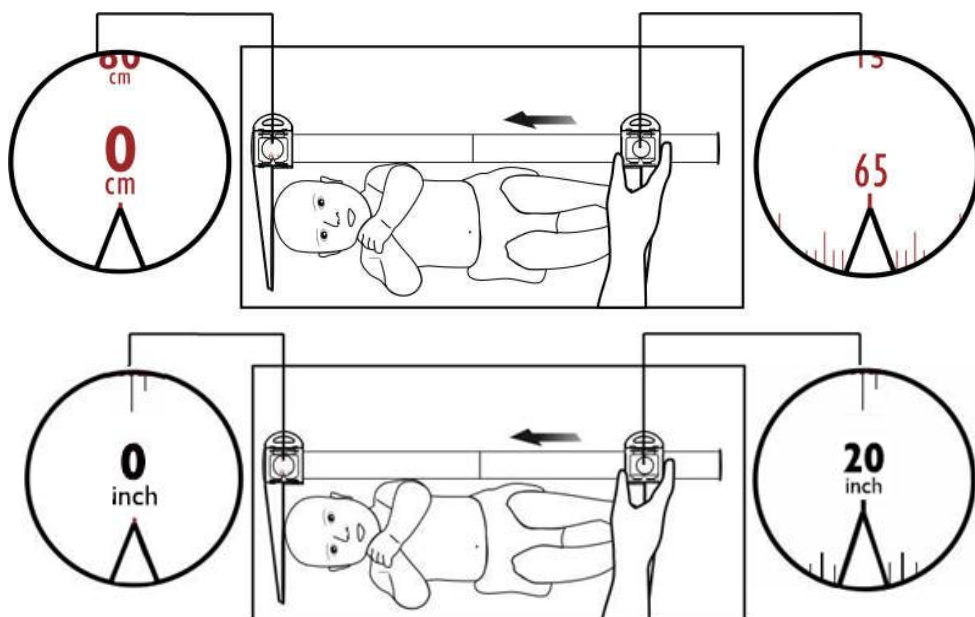

1. 在 0 公分處安裝左壓頭板
2. 輕輕將嬰兒雙腳伸直
3. 滑動右壓頭板待輕靠到嬰兒雙腳
4. 右側上的讀數是嬰兒的身高

IV. 產品規格

型號		HM80P
身高測量	量測範圍	10-80 cm 3 15/16-31 1/2 in
	精準度	1 mm 1/16 in
	誤差範圍	±10 mm
產品尺寸	全尺寸	890(W) x 330(D) x 100(H) mm
產品重量		0.7 kg
操作溫度 & 濕度		5°C~35°C
標準配件		使用說明書 x1

Notes

[illegible]

[illegible]

V. 符合性宣告頁

產品依照下列歐盟調和標準製造生產



(EU) 2017/745 Regulation on Medical Devices
Classification: Class I with measuring function

**RoHS Directive 2011/65/EU and Delegated Directive (EU)
2015/863**

授權歐洲代表



Obelis s.a.

Bd Général Wahis, 53
B-1030 Brussels
Belgium

製造商:



啟德電子股份有限公司

41262 台中市大里區國中路 103 號,

CD-IN-00048 [REV002] 05/2023