




HM130D 數位身高尺

使用說明書

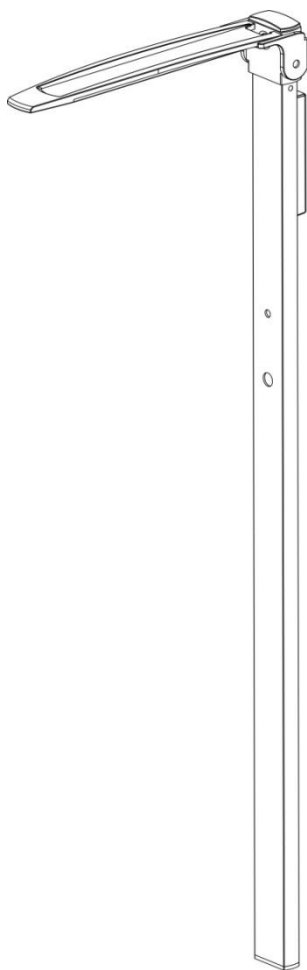

使用產品前請仔細閱讀說明書，妥當保管以供隨時查閱

標籤圖型說明

	「注意」使用產品前請仔細閱讀說明書和相關文件		請勿作為一般垃圾丟棄。請依照電器用品回收規範處理。
	產品製造商		產品製造年份
	使用產品前請仔細閱讀說明書，依照內容操作器材		產品型號
	生產批次		產品序號
		表示產品符合自我宣告需求	

Copyright Notice

Charder Electronic Co., Ltd.

啟德電子股份有限公司

41262 台中市大里區國中路 103 號

電話：04-2406 3766 傳真：04-2406 5612

官網：www.chardermedical.com

E-mail：info_cec@charder.com.tw

Copyright© Charder Electronic Co., Ltd. All rights reserved.

This user manual is protected by international copyright law. All content is licensed, and usage is subject to written authorization from Charder Electronic Co., Ltd. (hereinafter Charder) Charder is not liable for any damage caused by a failure to adhere to requirements stated in this manual. Charder reserves the right to correct misprints in the manual without prior notice, and modify the exterior of the device for quality purposes without customer consent.

目錄

I. 安全須知..... 4

II. 組裝 5

III. 使用產品 6

V. 產品規格 8



I. 安全須知

感謝您選購啟德公司產品。使用前請仔細閱讀說明書，了解產品的安裝、使用、日常維護方式等重要資訊。

標準用途

此產品的使用目的為量測受測者身高

操作注意事項

- 身高量測時，受測者必須站直
- 身高早晚會有輕微的差異；盡可能在相同的時間點進行量測，確保準確度
- 預計產品壽命：5 年
- 請遵照使用溫度，確保量測準確度

產品清潔

- 產品表面建議使用酒精布清潔



產品責任/保固

- 當產品的設計及製造缺陷歸屬於製造商責任時，製造商負有更換或維修此產品的責任。產品保固期間為購買日起 12 個月內，請保留您的收據以證明您的購買日期；如收據遺失則由出廠日起算。
- 當發生下列損害，製造商不負有連帶責任：不當的使用，不正確的儲存方式，改裝，未授權的拆解，使用者的疏忽
- 本產品不應由使用者進行維修。拆解，保養，校正等作業應由合格的啟德經銷商使用原廠零件進行檢修

報廢處理

- 此產品不應被當作一般家庭廢棄物來處理，請依電子廢棄物回收條例作為處理的準則。您可以聯繫環境保護署以瞭解更多電子廢棄物的處理方式及回收地點或聯繫您當初購買的經銷商處理。


II. 組裝

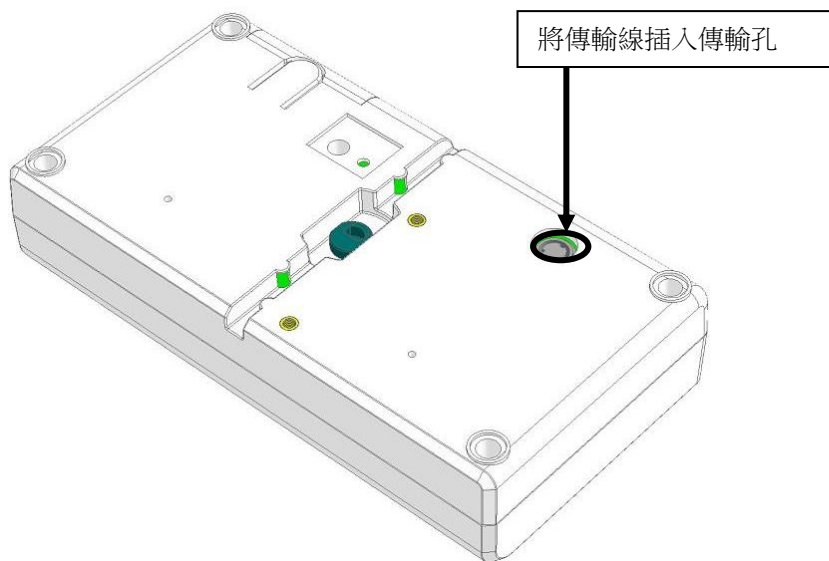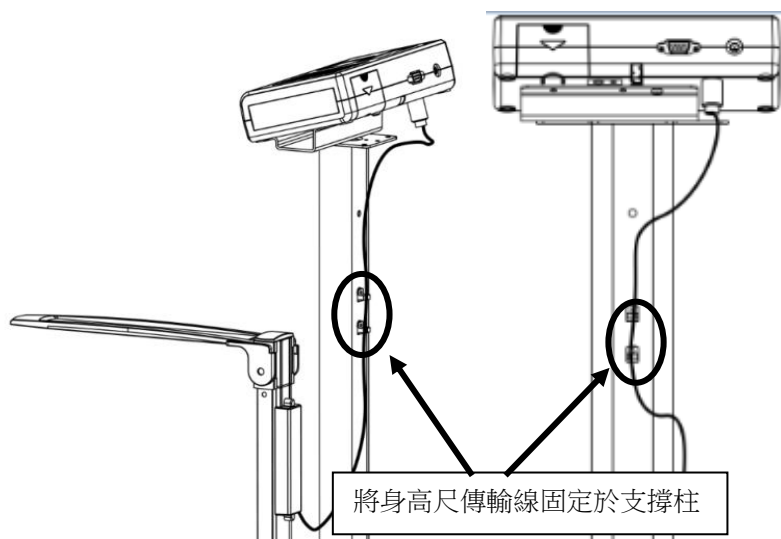

III. 使用產品


1. HM130D 需搭配啟德身高體重計使用，可將量測結果傳輸至顯示器，身高尺本身無顯示器。

2. 使用前，請先將身高尺壓頭板壓到最下面以進行自動校正（設定 75 cm）（圖一）。完成後，可將身高尺向上伸展，讓受測者更容易上秤

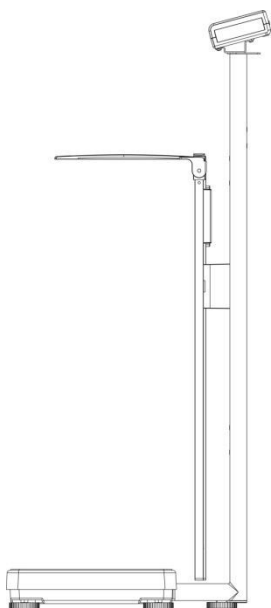

（圖一）

壓到底校正

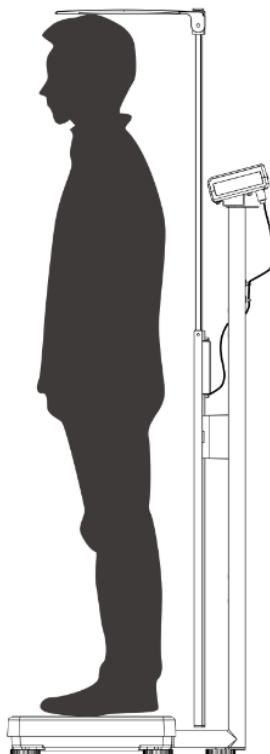

（圖二）

進行身高量測

進行量測

1. 受測者上秤後，請將身高尺壓頭板往下壓，輕碰受測者頭頂為止（圖二）。

2. 結果會自動傳輸至顯示器

[illegible]

V. 產品規格

型號		HM130D
身高量測	最高量程	75-130 cm
	精度	0.1 cm
尺寸	收納	50(W) x 50(D) x 775(H) mm
	展開	50(W) x 280(D) x 1330(H) mm
	產品重量	0.6 kg
資料傳輸		傳輸線
電源		顯示器提供
操作溫度 & 濕度		5°C~35°C 15% / 85% RH



製造商:

啟德電子股份有限公司
41262 台中市大里區國中路 103 號,

CD-IN-00379 REV 002 03/2021