



使用說明書


**HM200P**

身高尺



請妥善保存此說明書以供未來查閱之用。

## 標籤圖示說明
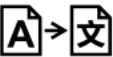
|                                                                                     |                        |                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | 「注意」使用產品前請仔細閱讀說明書和相關文件 |        | 請勿作為一般垃圾丟棄。請依照電器用品回收規範處理 |
|    | 製造商的名稱地址以及產品生產國家       |        | B 類人體接觸設備                |
|    | 使用產品前請仔細閱讀說明書，依照內容操作器材 |        | 產品類別                     |
|    | 產品型錄編號                 |        | 醫療器材單一識別碼                |
|    | 生產批次                   |        | 產品序號                     |
|   |                        | 歐盟代表                                                                                    |                          |
|  |                        | (度量衡認證機種限定) 顯示值的差異，用來定義和校驗產品                                                            |                          |
|  |                        | 設備符合歐盟醫療器材指令 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC.<br>四位數字表示發證單位代號                        |                          |
|  |                        | (度量衡認證機種限定) 產品符合度量衡三級認證                                                                 |                          |
|  |                        | (度量衡認證機種限定)<br>M: 符合 2014/31/EU 非自動衡器規範<br>22: 認證確效年份 (例: 22 = 2022)<br>0122: 度量衡發證單位編號 |                          |
|  |                        | 表示進口商與其地址                                                                               |                          |
|  |                        | 表示協助資訊轉化為當地語言的公司行號與地址                                                                   |                          |



警告

本產品非醫療器材僅作為重量測量用途；使用前應詳閱使用說明書

**版權宣告**

**Charder Electronic Co., Ltd.**

**啟德電子股份有限公司**

41262 台中市大里區國中路 103 號

電話：04-2406 3766

傳真：04-2406 5612

官網：[www.chardermedical.com](http://www.chardermedical.com)

E-mail：[info\\_cec@charder.com.tw](mailto:info_cec@charder.com.tw)

Copyright© Charder Electronic Co., Ltd. 版權所有。

授權產品為本公司其子公司或供應商所有，且受國家著作權法及國際條約保護。

未經授權而改裝、修理、或變更本產品、未嚴格遵守本公司操作與維護說明，因而發生損壞、損失或產生費用，則本公司與其子公司或供應商均不予負責。本說明書之內容如有更改，恕不另行通知。產品資訊如有變更，恕不另行通知。



Charder Electronic Co., Ltd.

No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,

Taichung City, 41262 Taiwan

# 目錄

|                |    |
|----------------|----|
| I. 安全須知.....   | 5  |
| II. 組裝.....    | 6  |
| III. 產品操作..... | 8  |
| IV. 產品規格.....  | 9  |
| V. 符合性宣告頁..... | 10 |

# I. 安全須知

## A.前言

感謝您選購啟德公司產品。如果您在使用產品時遇到任何說明書未清楚敘述的問題，請洽詢當地的經銷商協助解決您的疑問。使用前請仔細閱讀說明書，了解產品的安裝、使用及日常維護方式等重要資訊。

### 產品用途

此產品應由專業人士操作，用來量測受測者的身高。

### 操作注意事項

- 產品應安裝於平穩、平坦、堅硬、防滑的地面。
- 操作產品前，請確保所有零件已確實鎖緊固定。

### 安全事項

- 預計產品壽命：5 年
- 請遵照電子產品相關安全規範操作產品
- 安裝不當將使保固失效
- 產品應在室內使用

### 產品清潔

- 產品表面建議使用柔軟無絨布搭配 70%-75%酒精進行清潔。
- 請勿使用大量的清水清洗，以免造成內部電子零件的損壞。
- 請勿使用含有腐蝕性的液體或清潔液清潔產品。

### 產品責任/保固


- 產品保固期間為購買日起 18 個月內，請保留您的收據以證明您的購買日期；如收據遺失則由出廠日起算
- 因不當的使用，不正確的儲存方式，改裝，未授權的拆解或使用者的疏忽掉落所發生的損壞，不在保固範圍內
- 本產品如未經由啟德合格的經銷商使用原廠零件進行檢修，拆解，保養，校正等作業，不在保固範圍內

### 意外事件回報

與設備有關的任何嚴重事件應報告給製造商、歐盟代表（如果設備在歐盟成員國使用）和用戶/主體成員國的主管當局。


## II. 組裝

### A. 拆解 HM200P 身高尺

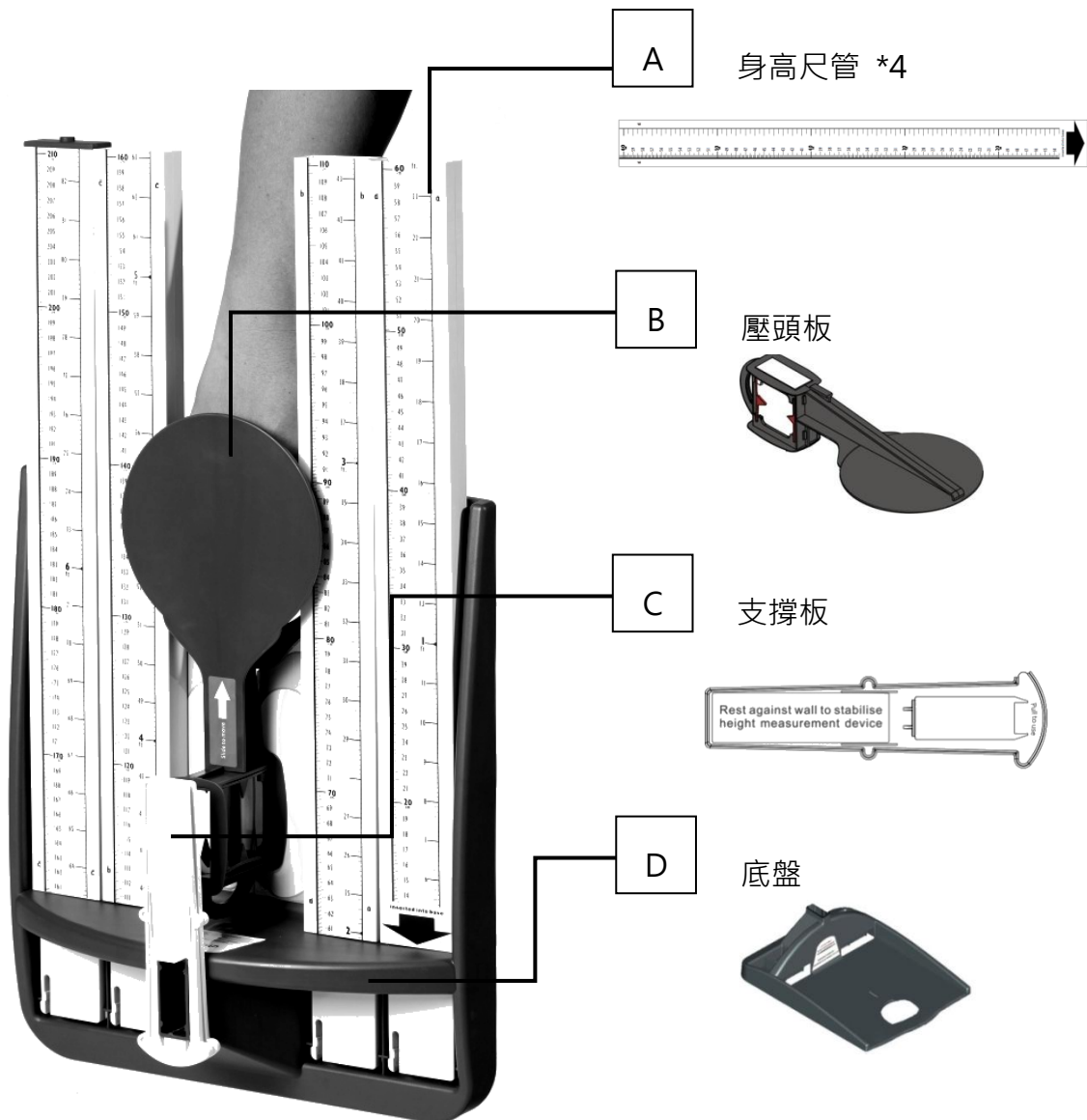


## B. 組裝


1. 拆下支撐板

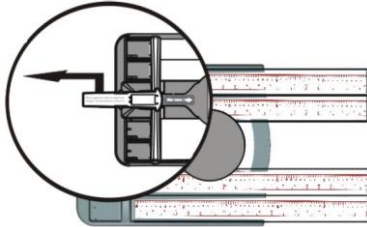


2. 按順序將身高尺管插入底盤

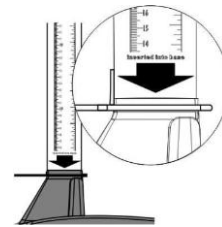


3. 身高尺管由 a 對 a , b 對 b 到 c 對 c 依序接上

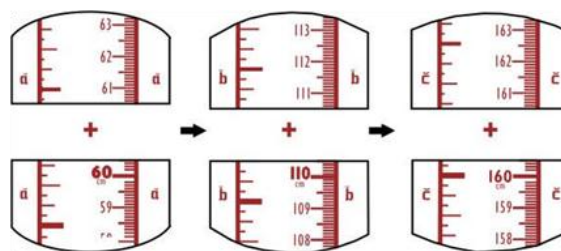


4. 將壓頭板安裝在身高尺管上

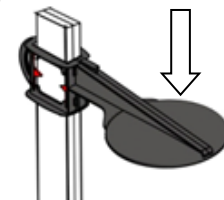

5. 支撐板最後安裝在身高尺管頂部

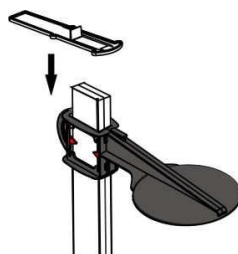

6. 將 HM200P 靠在牆上以確保穩定性

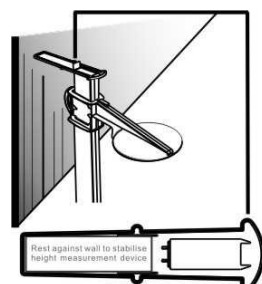


### Ⅲ. 產品操作


1. 測量時請雙腳站立於雙腳圖形位置



2. 請將HM200P支撐板輕靠牆面放置，測量時請受測者輕微碰觸到身高尺。將壓頭板向下移動直到輕微碰觸到受測者頭頂

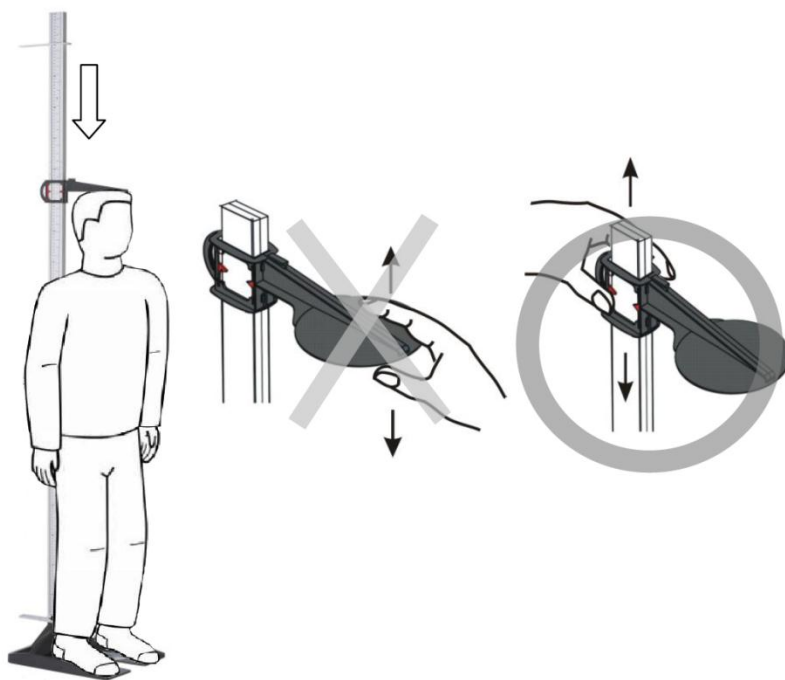

3. 此時可經由身高尺指針位置讀取身高數值

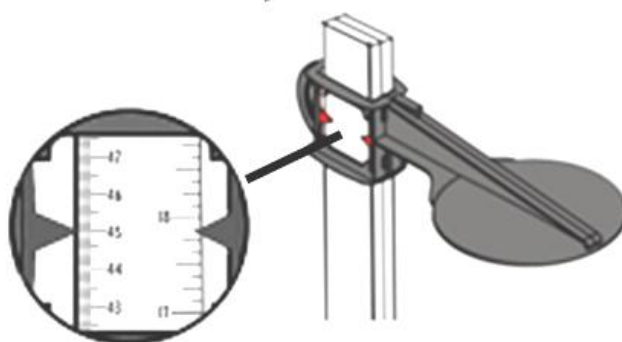



## IV. 產品規格

### 產品資訊

| 產品型號      |      | HM200P                            |
|-----------|------|-----------------------------------|
| 身高測量      | 量程   | 14-205 cm<br>5.5-81 in            |
|           | 精準度  | 1 mm<br>1/16 in                   |
|           | 誤差範圍 | ±10 mm                            |
| 產品尺寸      | 全尺寸  | 350(W) x 400(D) x 2430(H) mm      |
| 產品重量      |      | ~1.9 kg (不含攜行箱)<br>~2.3 kg (含攜行箱) |
| 操作溫度 & 濕度 |      | 5°C~35°C                          |
| 選配配件      |      | AR-2481, AR-00001 攜行袋             |

[illegible]

## Notes

[illegible]

## V. 符合性宣告頁

產品依照下列歐盟調和標準製造生產

|                                                                                   |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC<br>Medical Device Directive |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

有關上述 CE 標誌，請參閱設備標籤上顯示的單獨文件。

授權歐洲代表



**Obelis s.a.**  
Bd Général Wahis, 53  
B-1030 Brussels  
Belgium

製造商:



啟德電子股份有限公司

41262 台中市大里區國中路 103 號,

---

CD-IN-1222 12180E 04/2023