



超音波身高尺

說明書

HM200U



使用產品前請仔細閱讀說明書，妥當保管以供隨時查閱

CONTENTS

I. 標籤圖型說明	3
II. 安全須知	6
III. 組裝	7
IV. 使用產品	9
V. 產品規格	12

I. 標籤圖型說明

圖示	說明
	「注意」使用產品前請仔細閱讀說明書和相關文件
	請勿與一般垃圾丟棄。請依照電器用品回收規範處理
	產品製造商
	用產品前請仔細閱讀說明書，依照內容操作器材
	B 類人體接觸醫療設備
	BF 類人體接觸醫療設備
	產品型號
	歐盟代表
	產品在歐盟為醫療器材
	生產批號
	產品序號
	醫療器材單一識別系統法案
	(度量衡認證機種限定) 顯示值的差異，用來定義和校驗產品



設備符合 (EU) 2017/745 醫療設備法規。
四位數字是醫療器材公告機構的識別。



產品符合 EC 指令 (認證機種)
M: 符合 2014/31/EU 非自動量測儀器指令 (NAWI)
20: 符合性檢驗年份 (例 : 20=2020)
0122: 度量衡第三方驗證機構的代表編碼



產品符合國際法定計量組織 (OIML) 三級認證
(限認證機種)



進口商的名稱及地址



協助資訊轉化為當地語言的公司行號與地址

CON.


產品校正次數



台灣 NCC 認證號碼




設備符合美國聯邦通訊委員會法規

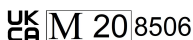

設備符合英國指令 (僅限經過驗證的型號)
M : 符合 2016 年非自動稱重儀器法規的合格標籤
20 : 進行符合性驗證的年份和 UKCA
標籤應用。 (例如 : 20=2020)
8506 : 計量公告機構標識符



設備符合英國指令

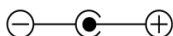

電源屬性和電壓

“如有差異，以設備本身的圖示為準”

Copyright Notice
Charder Electronic Co., Ltd.

啟德電子股份有限公司

41262 台中市大里區國中路 103 號

電話：04-2406 3766

傳真：04-2406 5612

官網：www.chardermedical.com

E-mail：info_cec@charder.com.tw

Copyright© Charder Electronic Co., Ltd. All rights reserved.
This user manual is protected by international copyright law. All content is licensed, and usage is subject to written authorization from Charder Electronic Co., Ltd. (hereinafter Charder) Charder is not liable for any damage caused by a failure to adhere to requirements stated in this manual. Charder reserves the right to correct misprints in the manual without prior notice, and modify the exterior of the device for quality purposes without customer consent.



Charder Electronic Co., Ltd.
No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

II. 安全須知

感謝您選購啟德公司產品。如果您在使用產品有遇到任何說明書未清楚敘述的問題，請洽詢當地的經銷商協助解決您的疑問。使用前請仔細閱讀說明書，了解產品的安裝、使用、日常維護方式等重要資訊。

標準用途

此產品的使用目的為量測受測者身高

操作注意事項

- 身高量測時，受測者必須站直

安全事項

- 預計產品壽命：5 年
- 請遵照使用溫度，確保量測準確度

產品清潔

- 建議使用酒精布清潔產品表面

產品責任/保固

- 產品保固期間為購買日起 12 個月內，請保留您的收據以證明您的購買日期；如收據遺失則由出廠日起算。
- 因不當的使用，不正確的儲存方式，改裝，未授權的拆解或使用者的疏忽掉落所發生的損壞，不在保固範圍內。
- 本產品如未經由啟德合格的經銷商使用原廠零件進行檢修，拆解，保養，校正等作業，責不在保固範圍內。


報廢回收處理

- 此產品不應被當作一般家庭廢棄物來處理，請依電子廢棄物回收條例作為處理的準則。您可以聯繫環境保護署以瞭解更多電子廢棄物的處理方式及回收地點或聯繫您當初購買的經銷商處理。

III. 組裝

組裝零件

(舉例 - MS4980 選配 HM200U)

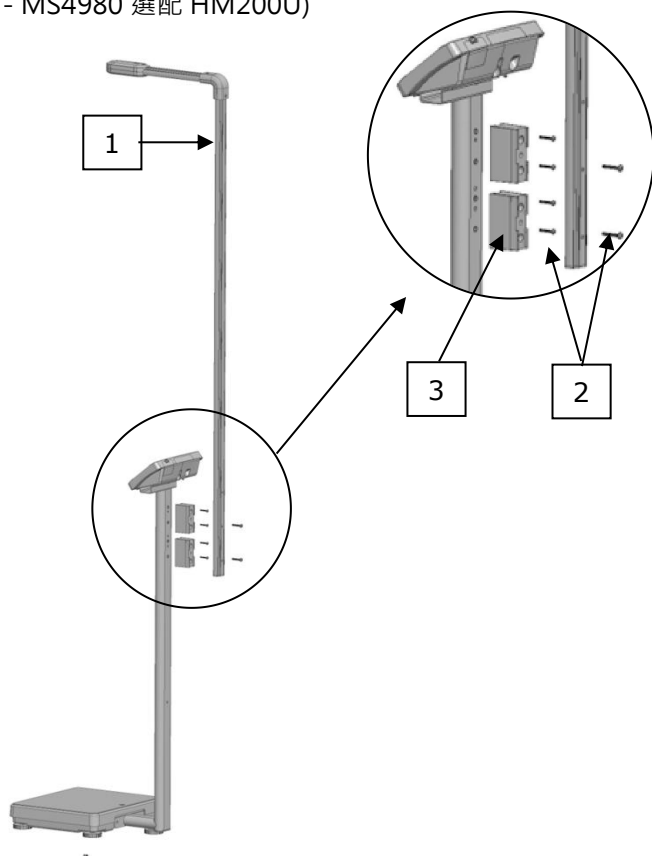


項目	名稱	數量
1	超音波身高尺(HM200U)	1
2	圓頭螺絲	6
3	連接座	2

1. 用 4 根圓頭螺絲固定連接座於支撐管上
2. 用 2 根圓頭螺絲將身高尺固定於連接座上

連接電子身高尺

顯示器下方有 6 pin DIN 孔。請插上電子身高尺的連接線

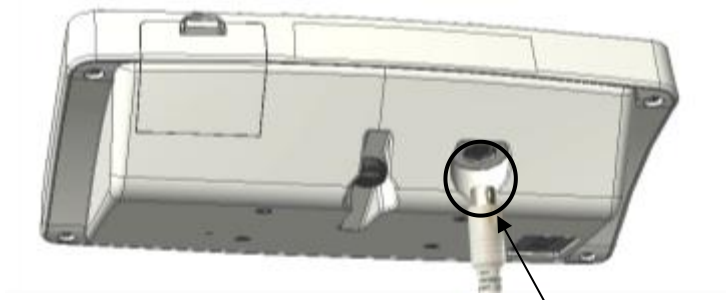

IV. 使用產品

HM200U 超音波身高尺需搭配啟德指定身高體重計使用，可將量測結果傳輸至顯示器，身高尺本身無顯示器



進行量測

受測者上秤後，身高尺會自動量測身高，將結果傳輸至顯示器進行 BMI 計算

[illegible]

[illegible]

V. 產品規格

型號		HM200U
身高量測	最高量程	60-210 cm
	精度	0.1 cm
	誤差	60~200 cm : ± 1.2 cm 200~210 cm : ± 1.5 cm
尺寸	收納	414(L) * 61(W) * 1476(H)mm
	產品重量	1.2kg
資料傳輸		傳輸線
操作溫度 & 濕度		+5°C ~ +35°C 15%~85% RH 700 hPa ~ 1060 hPa

備註：需搭配原廠專業成人秤使用



製造商:



啟德電子股份有限公司

41262 台中市大里區國中路 103 號

CD-IN-00397 REV007 04/2025