


oserio 產品使用說明書—MTG-305系列

www.oserio.com

產品各部名稱

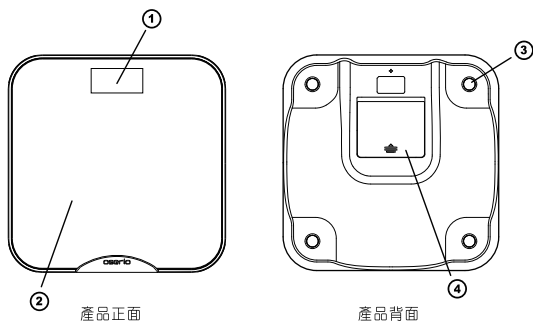


① LED 顯示螢幕

② 腳踏板

③ 支撐腳座

④ 電池盒蓋

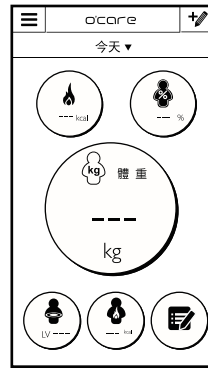

Android




iOS

輕鬆減重小幫手


溫馨提醒：

- 如何進行連線？請參考「連線操作說明」

電池更換方式

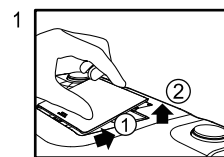

掀開電池蓋

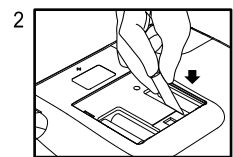


裝入4顆
AA 電池
(3號電池)

注意：

- 請勿將鹼性電池與一般乾電池混合使用
- 請勿將新舊電池混合使用
- 電池放入電池盒時請注意電池極性應正確

產品操作說明

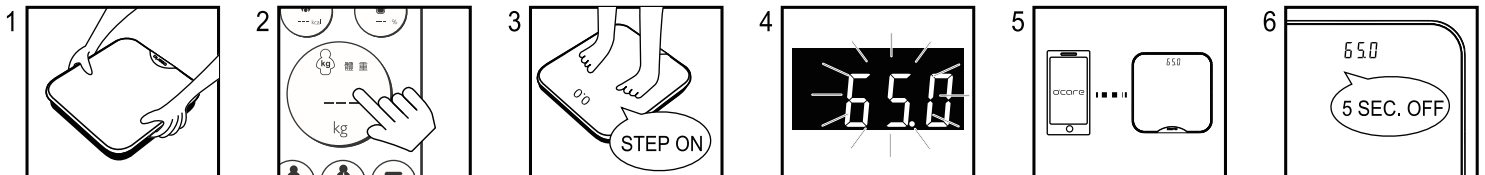

1 將秤體放置平坦地面，機器進行校正準備

2 開啟 ocare APP並點選進入體重球功能

3 此時可以上秤測量，並避免不必要之身體晃動(量測中請勿下秤)

4 量測完成(重量鎖定並閃爍)

5 此時手機與秤體進行無線傳輸之動作

6 傳輸完畢，顯示體重5秒後自動關機

⚠ 進行量測前，請將產品放在平坦地面，以免量測不準確。

說明：

- 體重量測完成後30秒以上未進行傳輸連結→自動關機


錯誤訊息顯示表



電池低電量顯示，
請更換電池



過載或一分鐘內秤
重不穩定，請重新
在秤體上站穩勿晃
動以進行測量

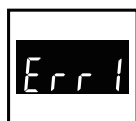

手機發送至秤體訊
息資料有誤，請重
新量測傳輸，如一
再發生此狀況，請
洽客服人員，由專
人為您服務



秤體發送至手機訊
息資料有誤，請重
新量測傳輸，如一
再發生此狀況，請
洽客服人員，由專
人為您服務

低功率射頻電機設備警語

「依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

使用安全注意事項

警告：

- 請勿讓幼童接觸本產品。
- 請勿在產品上跳躍。
- 請勿踩在主機邊緣或顯示螢幕上。
- 請勿讓體障人士在無人陪伴協助下使用本產品，請利用扶手輔助支撐，或他人協助下，才可站到本產品上。
- 請勿拆解、自行修改或改裝本產品結構或顯示螢幕。
- 請使用本產品指定的電池規格，切勿將電池電極反插。
- 長時間未使用本產品時(三個月或以上)，請卸下電池。
- 雙腳潮濕或磅秤表面潮濕，請勿踩踏使用，以避免滑倒造成危險。
- 若開機後無螢幕顯示畫面，請先檢查是否為電池無電量。
- 請勿將產品放在可能受潮的高度潮濕環境，或受到陽光直射、空調冷氣直吹、高溫的火焰暖爐旁。
- 測量前請先脫鞋，再站上本產品。
- 請勿用水清洗或苯、汽油、塗料稀釋劑、酒精或以其他揮發性溶劑擦拭本產品。
- 本產品為精密儀器，請勿重摔、震動或以外力撞擊。
- 本產品和廢棄電池的處理，應遵循國內對電子產品的處理規定。
- 請勿將本產品放置於非平整環境使用(如地毯或席墊等)。在非平面情況下可能導致產品無法準確測量，故請置放於平整地板上量測。
- 請勿將本產品存放在以下環境中
 - 高溫、高濕、有灰塵、濕潤、陽光直射處
 - 強烈撞擊、震動或表面不平整的地方
 - 擺放化學品或具腐蝕性氣體的環境中
- 本產品之主要功能為體重量測及估算BMI值。其餘，如骨量、體水份及基礎代謝..等，均為附屬功能。僅供使用者參考，非為診斷、治療、減輕、直接預防疾病之依據。



存放與保養

存放注意事項：

- 請存放在陰涼平整的地面。
- 避免放置在進出通道上，以免不小心絆倒行人。
- 不可直接浸泡到水。
- 遠離高溫、潮濕，直接日曬與多塵地方。
- 避免與化學材料或具腐蝕氣體存放一起。
- 長時間不使用時(三個月以上)，請取出電池裝入外盒收存。



保養小叮嚀：

- 每日使用前請用乾布擦拭，常保機器潔淨如新。
- 使用乾淨軟布擦拭秤盤與螢幕面板，必要時可使用擰乾後的布擦拭機器，最後再以乾布抹乾即可。
- 請勿使用揮發油、清潔劑或汽油來擦拭機器。
- 避免使用粗糙、有沾黏異物的布擦拭機器，以防秤盤與螢幕面板刮傷。
- 使用時，若發現機器沾到水，請儘快用乾布擦拭乾淨，避免讓水滲入機心，影響準確度。

產品規格

電源	4顆 AA(3號)電池	產品重量	2.0kg								
產品尺寸	機體：320(長) x 320(寬) x 31(高) mm										
適用環境	使用溫度： 5 ~ 35℃	使用濕度： 30 ~ 85%RH									
保存環境	保存溫度： -20 ~ 60℃	保存濕度： 10 ~ 95%RH									
秤準準確度	5~40kg：±0.4 kg，40~150kg：±1%										
顯示項目	重量：5~150kg，遞增數值(解析度):0.1kg										
	BMI範圍： <table><tr><td>≤18.4</td><td>18.5~23.9</td><td>24~26.9</td><td>≥27</td></tr><tr><td>偏瘦</td><td>正常</td><td>偏胖</td><td>超胖</td></tr></table>			≤18.4	18.5~23.9	24~26.9	≥27	偏瘦	正常	偏胖	超胖
	≤18.4	18.5~23.9	24~26.9	≥27							
	偏瘦	正常	偏胖	超胖							
	骨量：1~10kg，遞增數值(解析度):0.1kg										
體水分：30~80%，遞增數值(解析度):0.1%											
基礎代謝：385~3999 kcal，遞增數值(解析度):1kcal											
附件	產品說明書(保固卡)、連線操作說明										

經銷商名稱：啟德電子股份有限公司 經銷商地址：台中市大里區國中路103號
製造廠名稱：Krell Precision (Yang Zhou)Co.,Ltd.
製造廠地址：NO.28 XingYang Road, Economic Development Zone,
YangZhou City ,JiangSu Province,China
服務專線電話：(04)24079943 0800-203766



廢電池請回收

售後服務保證事項

本保證書係適用於啟德電子股份有限公司(以下簡稱啟德)所生產之產品。自購買起一年內(以出示保固卡為憑證)在正常使用狀態下發生故障，由啟德或授權之經銷商負責維修，於保固期間內，本公司提供負責維修服務。購買日期未有相關證明或無蓋經銷商店章者，保固期限則以本公司出貨日起算一年，但有下列情況者除外。

- (1)未依隨產品所附之產品說明書來使用及進行安裝組合，以致產品毀損。
 - (2)擅自拆修、添附或修改等不當使用。
 - (3)購買後由於天災、地變、運輸跌落、摔落、電壓異常故障損害。
 - (4)裝配電池後長期未使用產品，造成電池漏液狀況導致產品故障損害。
 - (5)退回商品必須是全新狀態保持商品包裝配件完整，否則恕不接受退貨。
- 若原廠包裝損毀將無法退貨或須將損壞費用於退款中扣抵。

注意事項：

- 1.因原廠規定欲更換之新品，須保留商品之完整性及所有附件，如：外箱、內襯、保固卡、說明書、及所有原廠出貨時之配件(含贈品等)。
- 2.經原廠檢測確實為新品故障，且所附之配件完整者，方予以新品更換，約七個工作天(不含例假日)。
- 3.若產品因客戶不當使用而損壞者，可依循本公司維修品送修之程序，獲得修復產品，則維修服務費用將另行報價。
- 4.有任何零配件或包裝缺損之退貨，本公司將視缺損狀況另行收取工本手續費用，亦或不接受處理。

保固卡視同產品售後服務保證書須經經銷商或區域銷商蓋章及註冊購買日期方有效。故有產品故障時，請與啟德電子客服部聯絡，或撥打服務專線電話：(04)24079943 0800-203766，將保固卡及產品寄回請求維修，本保固卡請妥善保存，如有遺失恕不補發。




oserio® 保固卡
Health is Beautiful

愛用者： 產品序號：
購買日期： 經銷商：
購買產品名稱： 經手人：
購買產品型號：

憑本卡保固一年

此保證書證明此產品為 oserio 原廠出品之產品。保證期滿後屬調整、保養或是維修性質之服務，則酌收維修工時費用，若有零件須更換，零件費用另計。若遇到技術上的問題，請撥打服務專線電話：(04)24079943 0800-203766 或上網站洽詢 www.oserio.com

為保障客戶權益，務必請經銷商加蓋店章，以維護您的權益。感謝您購買本公司產品，本產品保固卡若經塗改、填寫資料不全、未加蓋經銷商店章，視同無效。

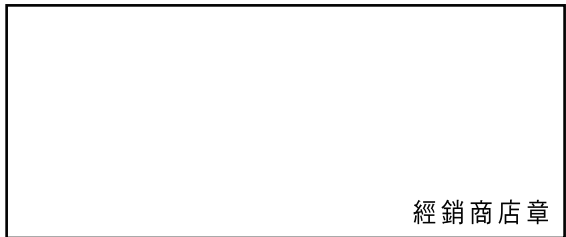

經銷商店章

健康好友意見回函

