




oserio 產品使用說明書

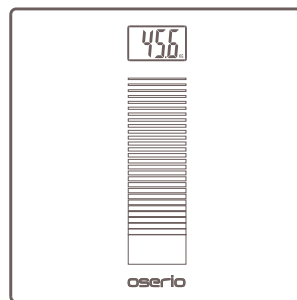


BNG-909系列

 感謝您購買 oserio 體重管理產品，請在開始使用產品前，
詳細閱讀本說明書內容將可以幫助您，快速掌握正確使用的技巧！


目錄

產品各部名稱	2
電池更換方式	3
產品自我校正	5
產品操作方式	6
錯誤訊息顯示	7
使用安全注意事項	8
存放與保養	8
產品規格	9

產品各部名稱

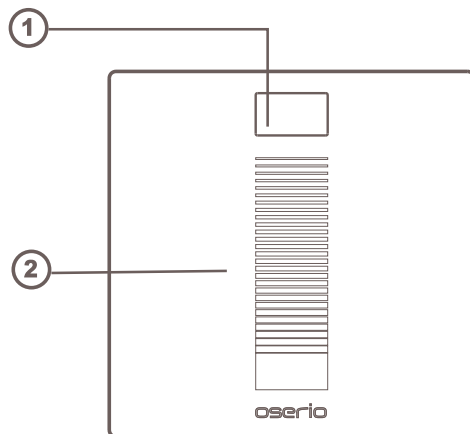

產品正面

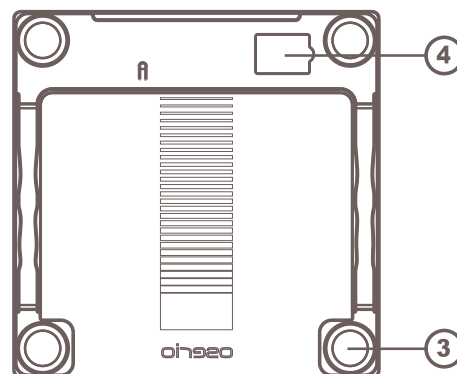

產品背面

① LCD 顯示螢幕

② 腳踏秤盤

③ 支撐腳座

④ 電池盒蓋


電池更換方式

※ 本機所附電池為試用電池，使用時請拔掉電池絕緣片，電池電量不足時請更換。


1 打開電池蓋



2 裝入電池(1顆CR2032)

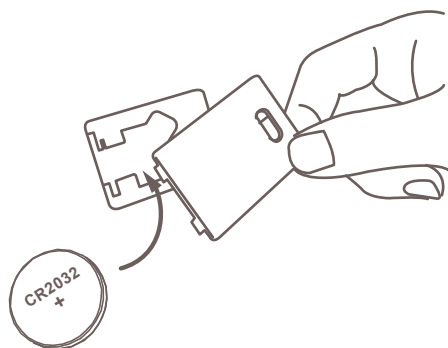


電池盒蓋

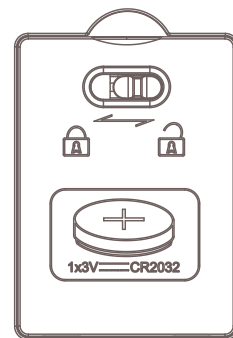


產品自我校正




首次(或重新)安裝電池以及移動產品後，可能會造成產品秤重基準點有所誤差，需以下述方式重新校正，以確保測量結果正確，完成後，方可上秤測量。

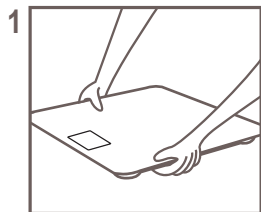

將產品放置
於地面

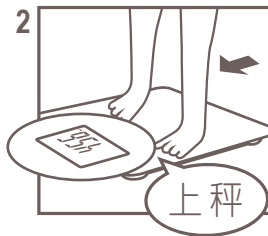


踩一下

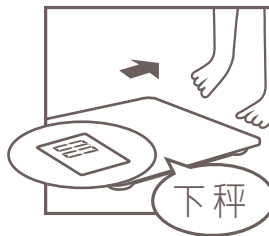

畫面自動關機後
即完成校正

操作方式

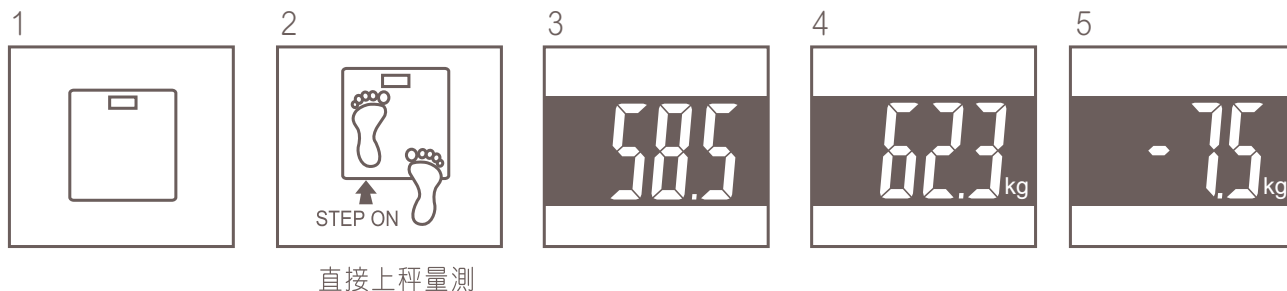

- 1 產品關機狀態
- 2 使用者直接上秤體量測 (請避免不必要之晃動)
- 3 顯示體重 (仍在量測中，請勿下秤)
- 4 顯示秤重結果
- 5 如有差值於量測重量後顯示



測量完成 5 秒後產品將自動關機

錯誤訊息



電池電量過低
請更換電池。



請重新量測一次。



過載。



稱重不穩定。

若上述狀況在嘗試歐瑟若提供的狀況排除方式以後仍存在，請連繫
歐瑟若客服中心為您服務。

服務專線電話：0800-203-766


使用安全注意事項

1. 請勿讓幼童接觸本產品。
2. 請勿在產品上跳躍。
3. 請勿讓體障人士在無人協助下使用本產品，若需使用產品時，請利用扶手輔助支撐，或請旁人協助站上秤體，以策安全。
4. 請勿拆解、自行修改或改裝本產品結構或顯示螢幕。
5. 請使用本產品指定的電池規格，切勿將電池電極反裝。
6. 長時間不用本產品時(三個月或以上)，請卸下電池。
7. 無數據顯示時，請確認是否裝入電池。
8. 不要混用新舊電池或不同類型的電池，可延長產品的使用壽命。
9. 雙腳潮濕或磅秤表面潮濕，請勿踩踏使用，避免滑倒造成危險。
10. 請勿將產品放在可能受潮的高度潮濕環境，化學品或具腐蝕性氣體的環境中，或受到陽光直射、空調冷氣直吹、高溫的火焰暖爐旁。
11. 避免大力搖晃/震動/撞擊秤子。
12. 請勿用水清洗或苯、汽油、塗料稀釋劑、酒精或以其他揮發性溶劑擦拭本產品。
13. 請勿將本產品放置於非平面環境使用(如地毯或蓆墊等)。在非平面情況下可能導致產品無法準確測量，故請置放於平整地板上量測。
14. 此產品適用於室內家用型操作。



存放與保養

1. 秤子請放置於安全且乾燥區域收藏。
2. 請使用有酒精棉片做擦拭。
3. 秤子浸水/刮拭會造成秤子使用壽命減少。
4. 請勿踩在主機邊緣或顯示螢幕上。
5. 秤子請勿放在受到陽光直射、空調冷氣直吹、高溫的火焰暖爐旁。

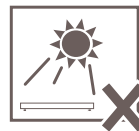

產品規格

型 號	oserio 體重計BNG-909	
電 池	1顆 CR2032(鈕扣電池)	
產品重量	1.3kg	
產品尺寸	機體：300(長) x 300(寬) x 19.5 (高)mm LCD顯示器：59(長) x 34.6(寬) mm	
適用環境	使用溫度： 5 ~ 35℃	使用濕度： 30 ~ 85 % RH
保存環境	儲存溫度： -20 ~ 60℃	儲存濕度： 10 ~ 95 % RH
秤重準確度	5~180kg (± 1%)	
顯示項目	重量：5~180kg，遞增數值(解析度)：100g	

進口商：啟德電子股份有限公司

地址：台中市大里區國中路103號

產地：中國

服務電話：(04) 24079943 0800-203766