



台灣聯絡處 台中市大里區國中路103號 製造地：中國

服務專線電話：(04)24079943 0800-203766

130-BYG209-001



產品使用說明書_BYG-209

Instructions for BYG-209

感謝您購買 oserio 體重管理產品，請在開始使用產品前，
詳細閱讀本說明書內容將可以幫助您，快速掌握正確使用的技巧！



oserio

1 產品說明

- 1.1 產品各部名稱 1
- 1.2 電池更換方式 1
- 1.3 產品特點 2
- 1.4 使用安全注意事項 3


2 操作方式說明

- 2.1 操作方式 5

3 其他參考說明

- 3.1 存放與保養 6
- 3.2 產品規格 7

_目錄

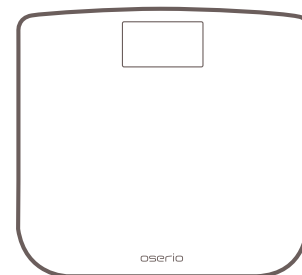

BYG-209


1.1 產品各部名稱

① LCD 顯示螢幕


② 腳踏秤盤

③ 電池蓋

④ 支撐腳座

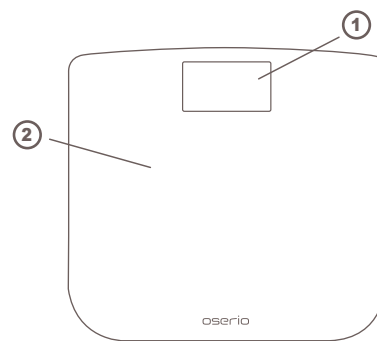


產品正面

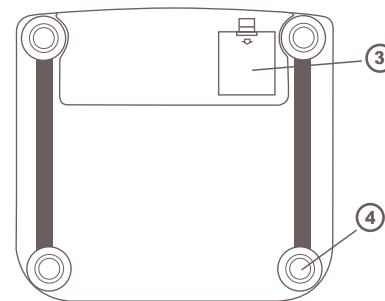


產品背面

1.2 電池更換方式

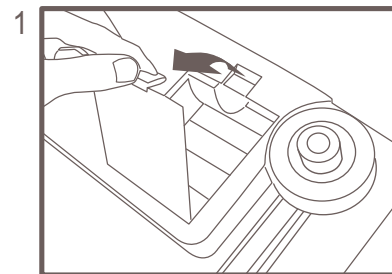

掀開電池蓋

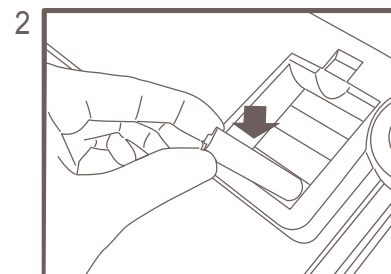裝入4顆
AA電池
(3號電池)

1.3 產品特點

- ◎ 6mm超薄鋼化玻璃質感的電子體重計，獨特風格設計，突顯產品美感與特色。
- ◎ 96 x 53mm LCD大螢幕視窗外加白色背光照明，超大字體數據顯示，體貼您及家中長輩。
- ◎ 測量前，只要踩踏一下秤盤，出現 0.0 kg後即可站上秤盤，簡易又輕鬆測量體重。
- ◎ 產品備有自動關機省電裝置，電力使用壽命長又環保。

1.4 使用安全注意事項


警告：

- 請勿讓幼童接觸本產品。
- 請勿在產品上跳躍。
- 請勿踩在主機邊緣或顯示螢幕上。
- 請勿讓體障人士在無人陪伴協助下使用本產品，站在產品上時，請利用扶手輔助支撐。
- 請勿拆解、自行修改或改裝，本產品結構或顯示螢幕。
- 請使用本產品指定的電池規格，切勿將電池電極反插。
- 長時間不用本產品時（三個月或以上），請卸下電池。
- 雙腳潮濕或磅秤表面潮濕，請勿踩踏使用，以避免滑倒造成危險。
- 若開機後無螢幕顯示畫面，請先檢查是否為電池無電量。



1.4 使用安全注意事項


- 請勿將產品放在可能受潮的高度潮濕環境，或受到陽光直射、空調冷氣直吹、高溫的火焰暖爐旁。
- 本產品為精密儀器，請勿重摔、震動或以外力撞擊。
- 本產品和廢棄電池的處理，應遵循國內對電子產品的處理規定。
- 請勿將本產品放置於非平整環境使用（如地毯或蓆墊等）。在非平面情況下可能導致產品無法準確測量，故請置放於平整地板上量測。
- 測量前請先脫鞋，再站上本產品。
- 請勿在顯示螢幕或主機附近使用行動電話。
- 請勿用水清洗或苯、汽油、塗料稀釋劑、酒精或以其他揮發性溶劑擦拭本產品。
- 請勿將本產品存放在以下環境中
 - 高溫、高濕、有灰塵、濕潤、陽光直射處
 - 強烈撞擊、震動或表面不平整的地方
 - 擺放化學品或具腐蝕性氣體的環境中

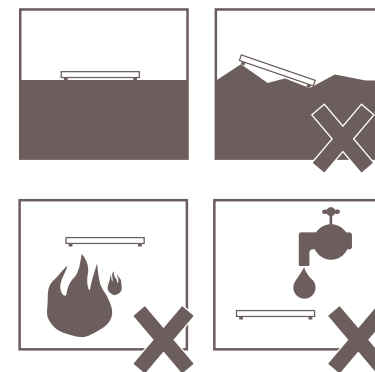

2

操作方式說明


2.1 操作方式

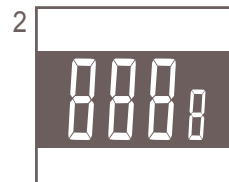

(請勿站上秤盤)



此時可以上秤測量，
並避免不必要之晃動

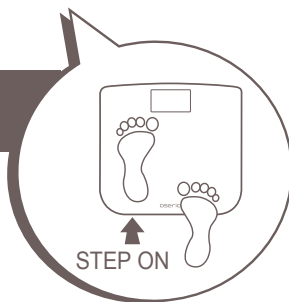

- 1 開機：
輕踏一下秤盤表面並離開
 - 2 機器校正準備 (請勿站上秤盤)
 - 3 機器校正完成
 - 4 秤重結果
- ★ 10秒以上沒有任何操作→自動關機


3

其他參考說明

3.1 存放與保養

存放注意重點：

- 請存放在陰涼平整的地面。
- 避免放置在進出行走的走道上，以避免不小心絆倒行人。
- 不可直接浸泡到水。
- 遠離高溫、潮濕，直接日曬與多塵地方。
- 避免與化學材料或具腐蝕氣體存放一起。
- 長時間不使用時(三個月以上)，請取出電池裝入外盒收存。

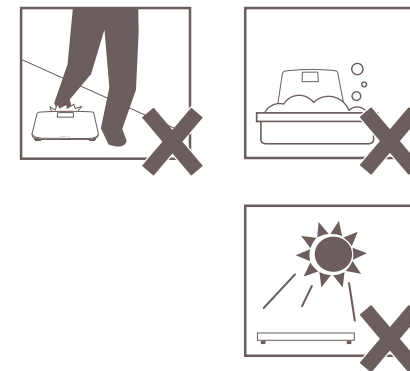

保養小叮嚀：

- 每日使用前請用乾布擦拭，常保產品潔淨如新。
- 使用乾淨軟布擦拭秤盤與螢幕面板，必要時可使用擰乾後的布擦拭機器，最後再以乾布抹乾即可。
- 請勿使用揮發油、清潔劑或汽油來擦拭機器。
- 避免使用粗糙、有沾黏異物的布擦拭機器，以防秤盤與螢幕面板刮傷。
- 使用時，若發現機器沾到水後，請儘快用乾布擦拭乾淨，避免讓水滲入機心，影響準確度。

3.2 產品規格

型號	oserio 電子體重秤 BYG-209 系列		
電池	4顆 AA(3號)電池		
產品重量	2.5kg		
產品尺寸	機體：340(長) x 315(寬) x 32(高) mm		LCD顯示器：96(長) x 53(寬) mm
適用環境	使用溫度： 5 ~ 35℃ 使用濕度： 30 ~ 85%RH		
保存環境	保存溫度： -20 ~ 60℃ 保存濕度： 10 ~ 95%RH		
秤重準確度	5~180 kg (±1%)		
附件	產品說明書、保固卡、顧客回函卡		

The logo for oserio, featuring the brand name in a lowercase, sans-serif font with a registered trademark symbol.A circular icon containing a stylized human figure with arms raised, representing health and wellness.

Health conscious

A circular icon containing a stylized human figure with arms raised, representing health and wellness.

Professional

A circular icon containing a stylized human figure with arms raised, representing health and wellness.

Innovative