




oserio 嬰兒體重計產品使用說明書— BBP-703系列

Guide Manual for BBP-703 series

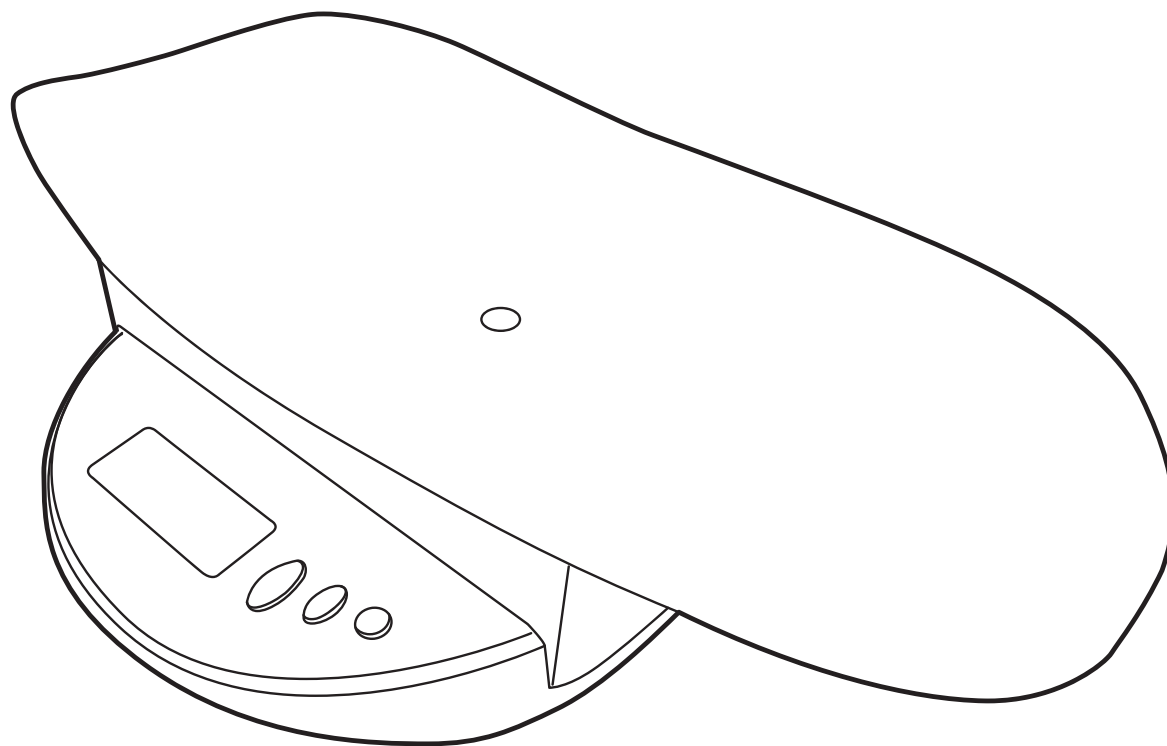

感謝您購買 oserio 健康管理系列商品使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

公司地址：台中市大里區國中路103號 | 服務專線：0800-203766 • 04-24079943 | www.oserio.com

1 產品說明

本產品是用來幫助您掌握您的嬰兒的成長狀況。在嬰兒每個階段的成長過程當中，因應嬰兒體重的增加，它可以幫助您調配出每餐適當的供乳量。

2 使用前準備

使用前應將本產品放置於平坦堅固的平面上使用。並在產品下方的電池盒中，裝入1顆9V鹼性電池。

1. 打開產品下方的電池盒蓋。
2. 裝入9V鹼性電池，並接上電線接頭。
3. 闔上電池盒蓋。

* 電池用盡後，應遵循國內相關處理規定回收電池。

3 基本操作方法

1. 按下 ON/OFF/TARE 鍵來開啟本產品。
2. 開啟產品時，畫面首先出現 **8888**，當畫面出現 **0.00** 時即可進行測量。
3. 開啟後，按下 ON/OFF/TARE 鍵可以進行扣重。
4. 完成測量後，長按 ON/OFF/TARE 鍵即可關閉本產品。
若不進行任何操作，本產品60秒後將自動關機。

4 其他操作說明

TARE—扣重功能

如果在替嬰兒秤重時，想要鋪上一層柔軟的物件，或是不使用嬰兒托盤進行測量的話，您可以在替嬰兒秤重前使用扣重功能來扣掉其他重量。首先，開啟本產品後畫面顯示 **0.00** 時，將物件(如毛巾)放在產品上，然後按下 ON/OFF/TARE 鍵進行扣重。接著測量嬰兒的體重，此時畫面顯示的重量，即是嬰兒本身的重量。

HOLD—重量鎖定功能

由於嬰兒在秤重時會因為其活動，而造成重量測量無法穩定顯示數值，因此需要按下 HOLD 鍵來鎖定重量。當畫面顯示 **hold** 時，本產品會自動計算其所測得的平均重量，並顯示於畫面中。

* 再次按下 HOLD 鍵，即可解除重量鎖定。

5 產品規格

量程/解析度	20kg / 10g	產品重量	2.20kg
按鍵功能	ON/OF/TARE, UNIT, HOLD	單位切換	Kg / lb
秤重準確度	±(0.5%+1d)	電池	9V鹼性電池
適用環境	溫度：5 ~ 35℃ 濕度：30 ~ 85%RH		
產品尺寸	320(長) x 520(寬) x 80(高) mm		

* 嬰兒托盤可自行取下或裝上。

製造地：中國
130-BBP703-001