


Tallímetro pediátrico

Manual de uso HM110M

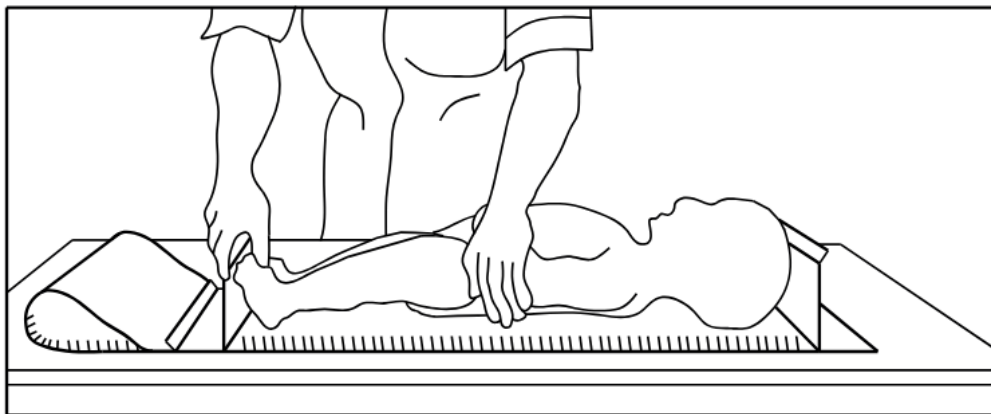

Gracias por elegir este dispositivo médico de Charder. Está diseñado para ser fácil y sencillo de operar, pero si encuentras algún problema que no esté contemplado en este manual, por favor contacta con el representante de servicio local de Charder.

Uso previsto

Este dispositivo médico está diseñado para ser utilizado conforme a las regulaciones nacionales, para medir la altura dentro de las especificaciones, con uso relacionado con la altura por profesionales.

Beneficio clínico

Los resultados de la medición pueden ser utilizados por profesionales para diagnosticar (y monitorear) problemas relacionados con la altura.

Manejo general

El dispositivo debe colocarse sobre una superficie estable, plana, sólida y antideslizante.

Instrucciones de seguridad

El dispositivo tiene una vida útil esperada de 5 años cuando se maneja, mantiene y revisa periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Limpieza

La superficie del dispositivo debe limpiarse usando toallitas con alcohol. No deben usarse líquidos corrosivos para la limpieza.

Garantía / Responsabilidad

El periodo de garantía es de treinta y seis meses (36) meses, a partir de la fecha de compra. Por favor, conserva tu recibo como prueba de compra.

No se aceptará responsabilidad por daños causados por cualquiera de las siguientes razones: almacenamiento o uso inadecuado o incorrecto, instalación o puesta en marcha incorrecta por parte del propietario o terceros, desgaste natural, cambios o modificaciones, manejo incorrecto o negligente.

Reporte de incidentes

Cualquier incidente grave que ocurra en relación con el dispositivo debe ser reportado al fabricante, al representante de la UE (si el dispositivo se usa en un estado miembro de la UE) y a la autoridad competente del estado miembro del usuario o sujeto.

Rango de Medición: 10-110 cm (4-43 inch)

Graduación:0.5cm (1/4 inch)

Modo de funcionamiento

Para realizar la medición de altura, coloque al sujeto sobre la alfombrilla, con la cabeza tocando el tope de cabeza. Doble sobre el tope de pie y anote la marca de altura para obtener el resultado.

Declaración de conformidad del Fabricante

Este producto ha sido fabricado de acuerdo con las normas europeas armonizadas, siguiendo las disposiciones de las directivas mencionadas a continuación:

 2460	Reglamento (UE) 2017/745 sobre Productos Sanitarios
---	--

(La Declaración de conformidad completa está disponible en el sitio web del fabricante)



Representante autorizado de la EU:

