




Columna SM2714

MANUAL DE USO

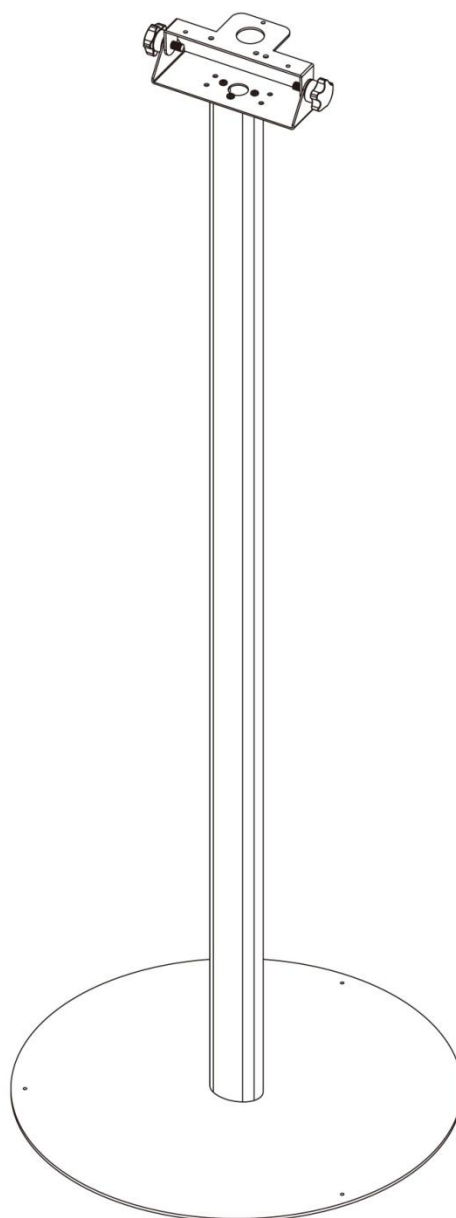

Por favor, mantenga el manual de instrucciones a mano en todo momento para futuras consultas.

chorder[®]

Reliable | Precise | Easy-to-use

Aviso de Derechos de Autor

Charder Electronic Co., Ltd.

No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262 Taiwan

Tel: +886-4-2406 3766

Fax: +886-4-2406 5612

Website: www.chardermedical.com

E-mail: info_cec@charder.com.tw

Copyright© Charder Electronic Co., Ltd. All rights reserved.

Este manual de usuario está protegido por la ley internacional de derechos de autor. Todo el contenido está licenciado y su uso está sujeto a autorización por escrito de Charder Electronic Co., Ltd. (en adelante, Charder). Charder no se responsabiliza por daños causados por el incumplimiento de los requisitos indicados en este manual. Charder se reserva el derecho de corregir errores tipográficos en el manual sin previo aviso y de modificar el diseño exterior del dispositivo por motivos de calidad sin el consentimiento del cliente.



Charder Electronic Co., Ltd.
No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

CONTENIDO

I . NOTAS DE SEGURIDAD	2
II. PARTES	3
III. ENSAMBLAJE CON EL INDICADOR DP2701.....	4
IV. ENSAMBLAJE CON EL INDICADOR DP3400.....	6
V. ENSAMBLAJE CON EL INDICADOR DP37	8
VI. ENSAMBLAJE CON EL INDICADOR DP48.....	10
VII. ENSAMBLAJE DE LA IMPRESORA TÉRMICA SERIE TP21	12

I . Notas de seguridad

Prefacio

Gracias por elegir un producto médico de CHARDER. Todas las características de este producto de última tecnología fueron diseñadas y optimizadas para un uso sencillo y directo. Si tienes alguna consulta o experimentas algún problema no abordado en las instrucciones de uso, por favor contacta al distribuidor donde adquiriste el producto.

Información general

Recomendamos enfáticamente usar los productos sobre una superficie plana y dura. Cualquier superficie blanda, como alfombra, puede causar inestabilidad.

Limpieza

Recomendamos usar toallitas a base de alcohol o productos similares para limpiar el producto. No uses grandes cantidades de agua al limpiar, ya que esto puede dañar el producto. También se debe evitar el uso de líquidos corrosivos o lavadoras de alta presión.

Garantía y responsabilidad

Los productos médicos de Charder vendidos por un distribuidor autorizado tienen una garantía de 1 año desde la fecha original de compra y solo para el usuario final original. Los productos médicos de Charder vendidos por un distribuidor autorizado están garantizados contra defectos de fabricación bajo uso normal. La garantía no cubre lo siguiente:

Almacenamiento, instalación, uso o mantenimiento inadecuados o incorrectos; daños evidentes resultantes de accidentes, negligencia, abuso o manejo incorrecto; daños causados por alta humedad, infiltración de líquidos o sustancias extrañas; daños por uso en temperaturas fuera del rango de "Temperatura de operación".


Eliminación del producto

Este producto no debe ser tratado como residuos domésticos comunes, sino que debe ser entregado a un centro de reciclaje de equipos.


II. Partes

Soporte para las series DP2701/DP3400/DP37/DP48


No.	ÍTEM	ESPEC.	CANT.
1	Tornillo para indicador	SW-8060	2
2	Soporte A	SS-4961	1
3	Soporte B	SS-4971	1
4	Columna	SS-3751A	1
5	Placa redonda	SS-6151	1
6	Pata de goma	MF-016ST	3
7	Tornillo hexagonal	M3x6	3
8	Hexágono avellanado	M4x0.7x12	3
9	Tornillo autorroscante	3x8	3
10	Tuercas de remache	M5	2
11	Tornillo de cabeza Phillips	M4x0.7x8	3
12	Tornillos con cabeza de arandela	M5x0.8x11	2

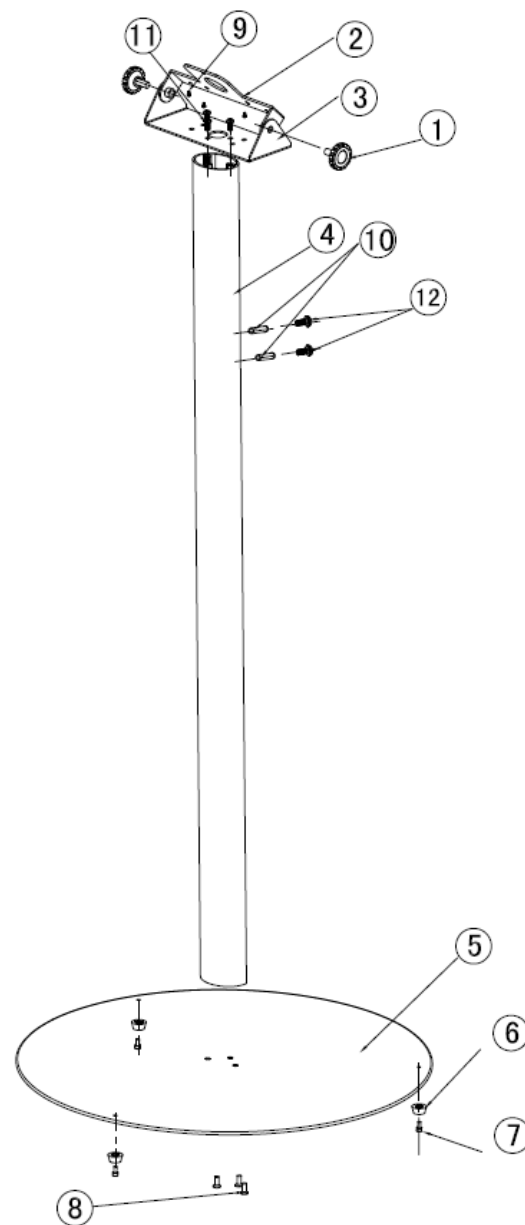


III. Ensamblaje con el indicador DP2701

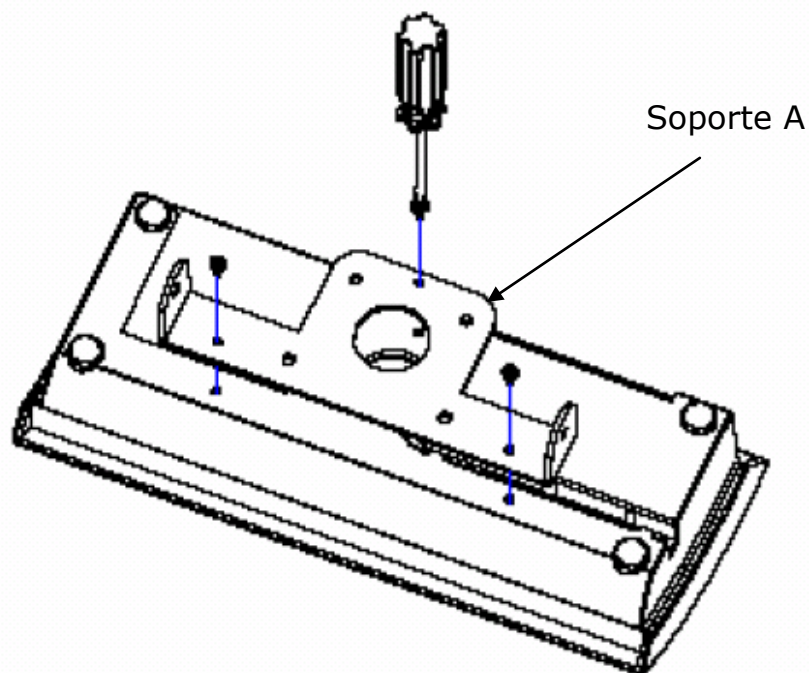

Fije el soporte A en el indicador con tres tornillos junto con el juego de tornillos del indicador.

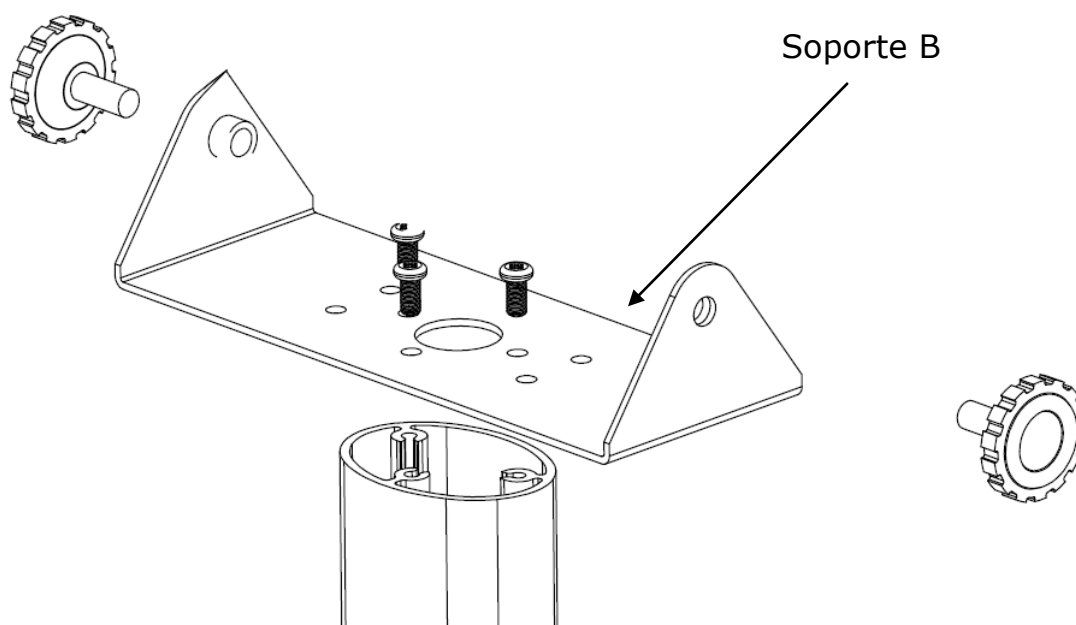


Fije el soporte B en la columna con tres tornillos cruzados ítem 8.

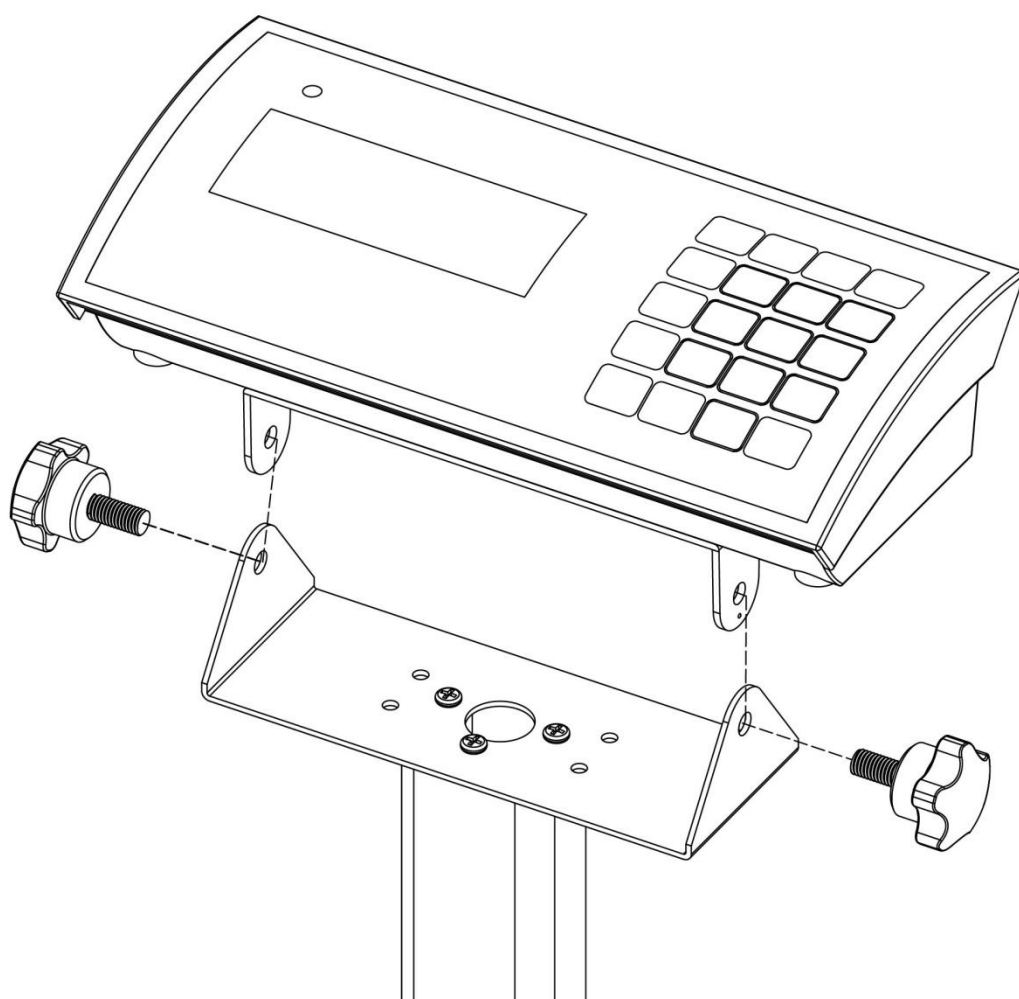


Apriete los tornillos del indicador para completar el ensamblaje del indicador.


IV. Ensamblaje con el indicador DP3400

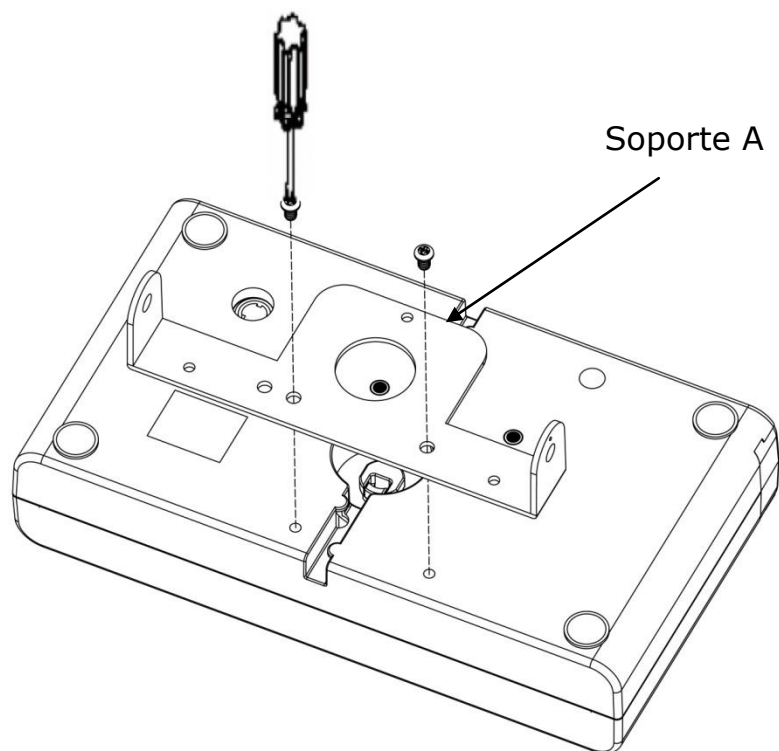

Fije el soporte A al indicador utilizando tres tornillos del juego de tornillos del indicador.

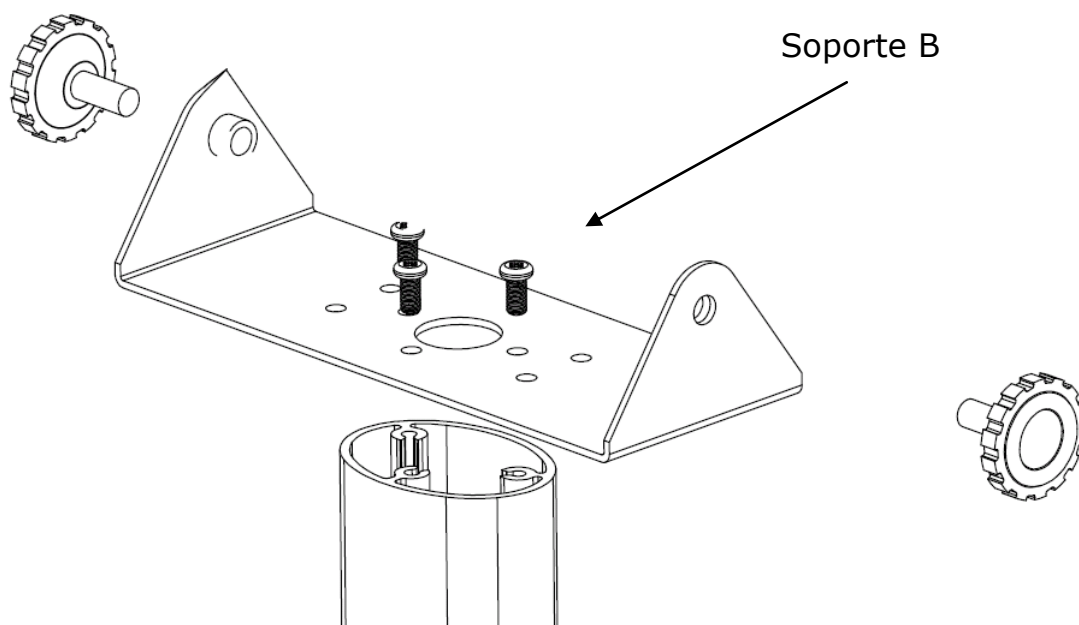


Fije el soporte B a la columna utilizando tres tornillos de cabeza cruzada (ÍTEM 8).

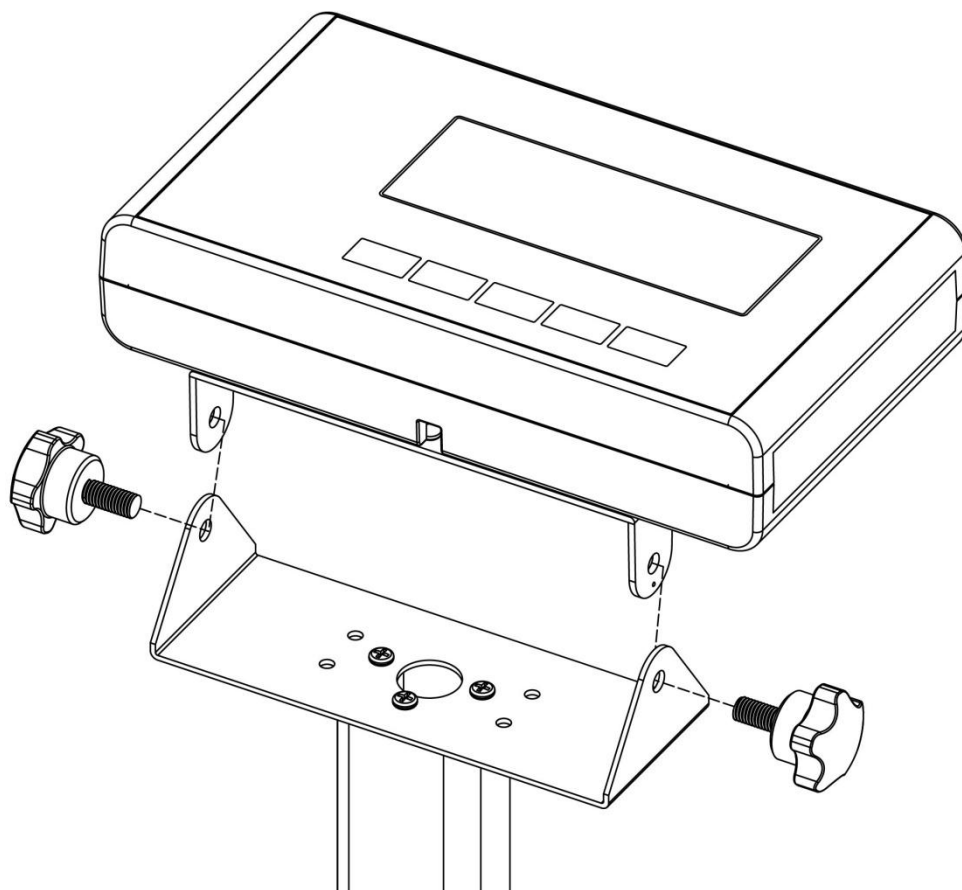


Apriete los tornillos del indicador para completar el ensamblaje del indicador.


V. Ensamblaje con el indicador DP37

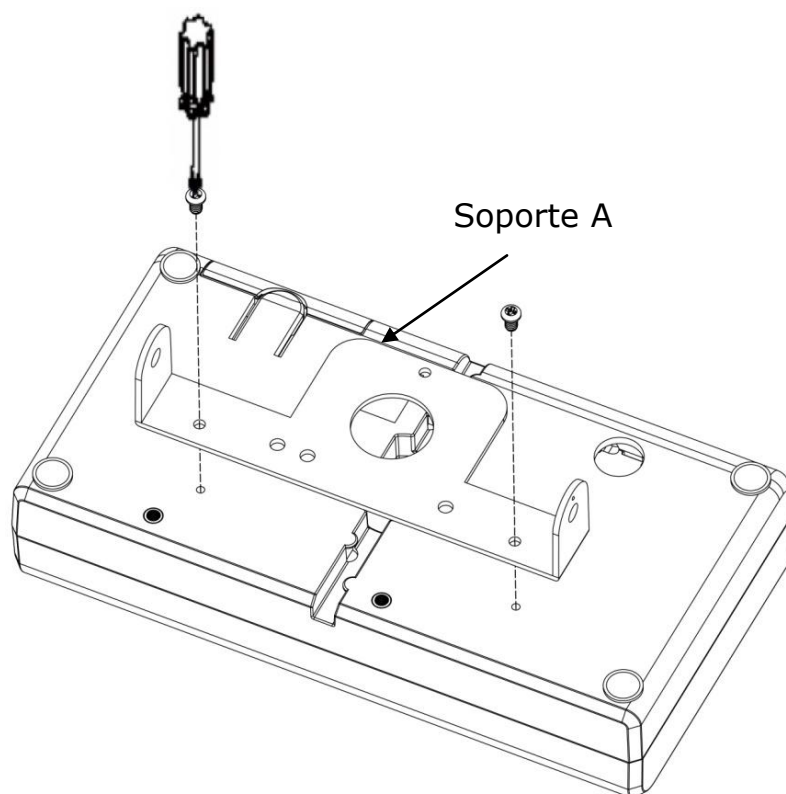

Fije el soporte A al indicador utilizando tres tornillos del juego de tornillos del indicador.

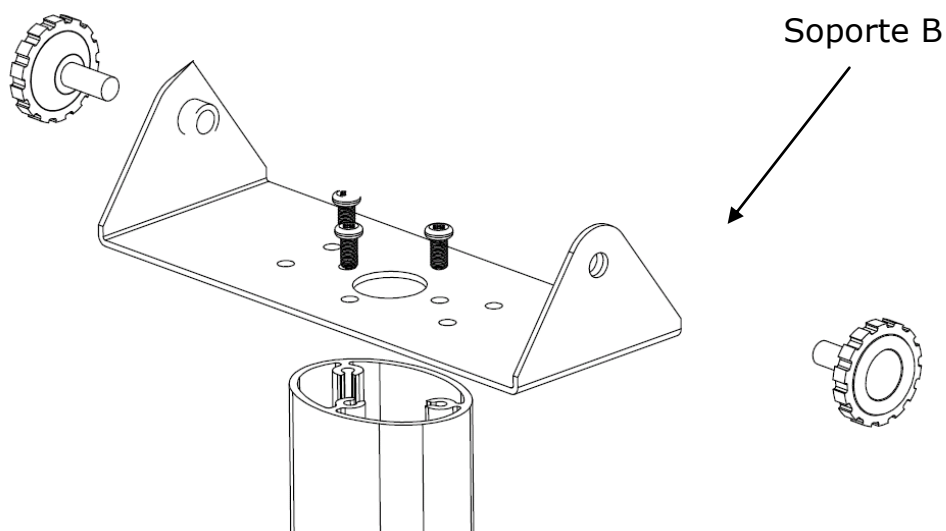


Fije el soporte B a la columna utilizando tres tornillos de cabeza cruzada

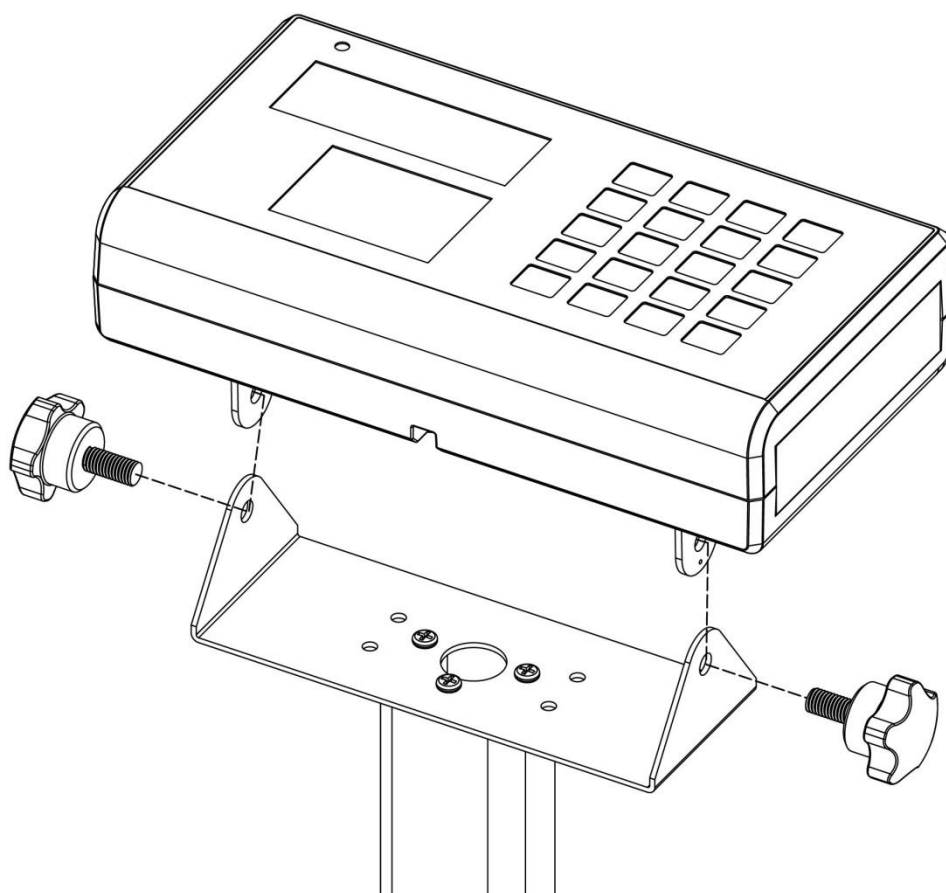


(ÍTEM 8).

Apriete los tornillos del indicador para completar el ensamblaje del indicador.


VI. Ensamblaje con el indicador DP48

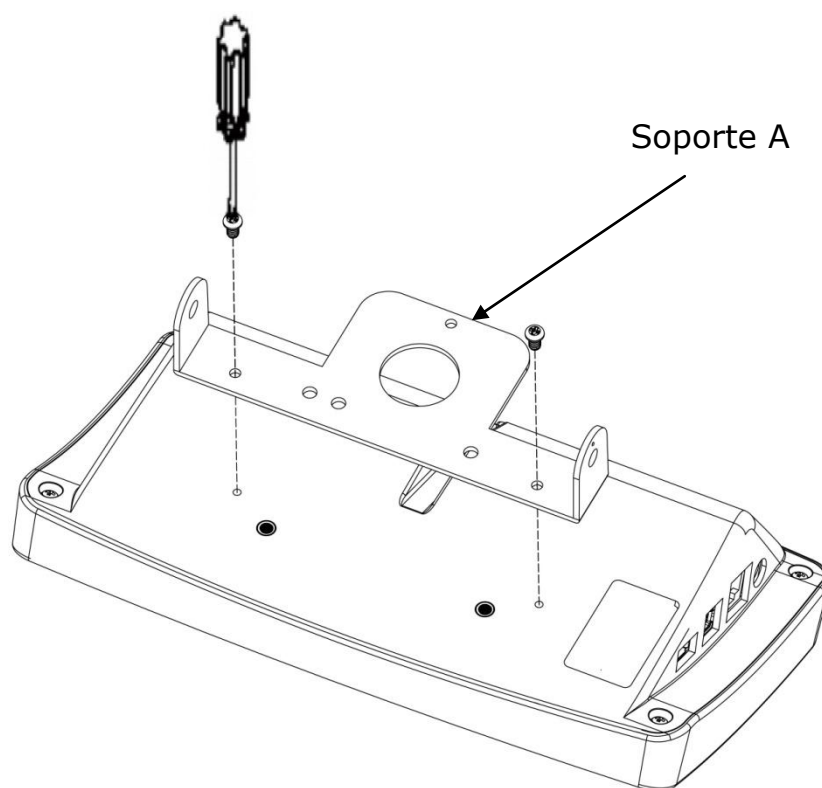

Fije el soporte A al indicador utilizando tres tornillos del juego de tornillos del indicador.

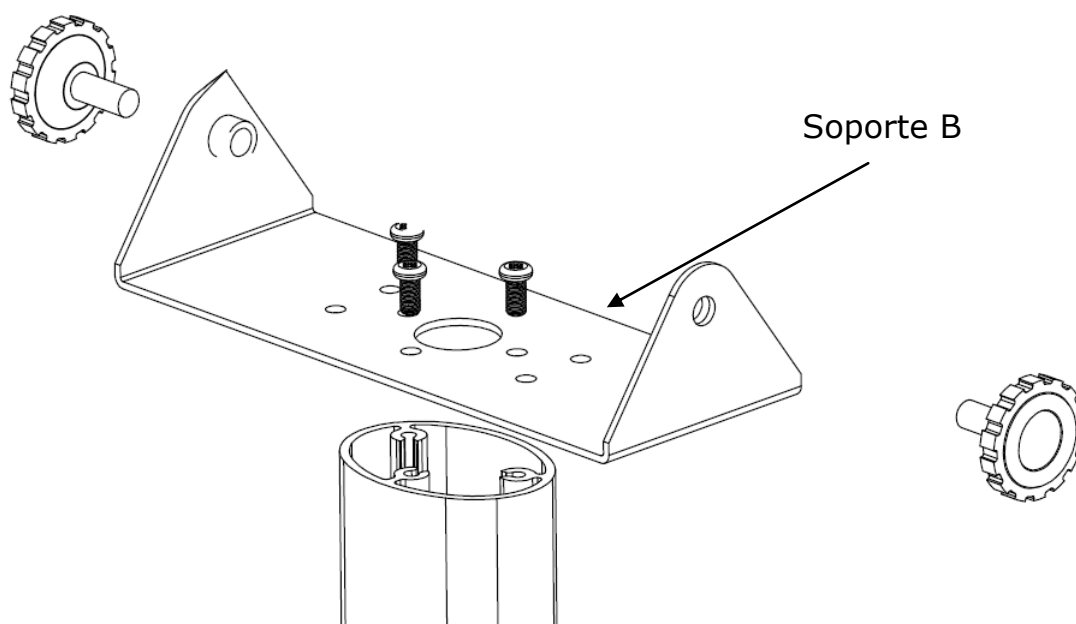


Fije el soporte B a la columna utilizando tres tornillos de cabeza cruzada (ÍTEM 8).

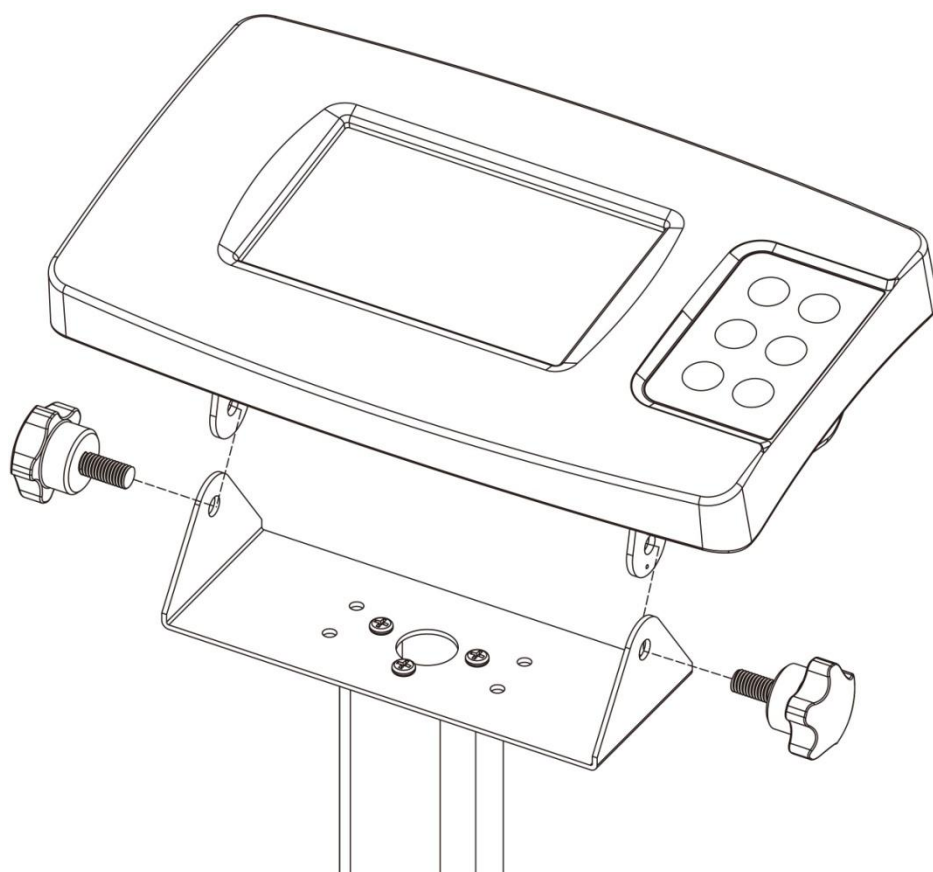

Apriete los tornillos del indicador para completar el ensamblaje del indicador.

VII. Ensamblaje de la impresora térmica serie TP21

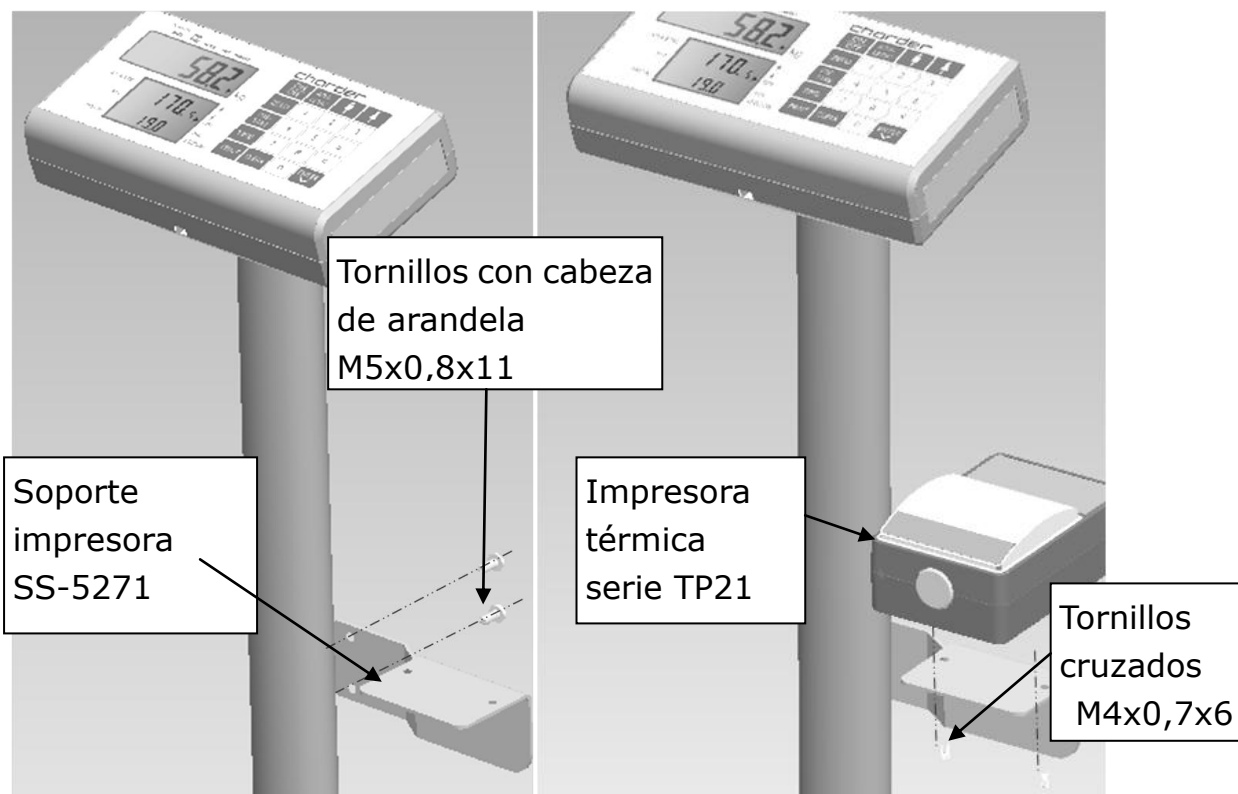



IMPORTADO POR:

SIBEL, S.A.U.
C/ Raimon Casellas, 6-8
08205 Sabadell (Barcelona). Spain.
www.sibelmed.com



Fabricado por:
Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan