



Pasamanos plegable

SM-00001
MANUAL DE USO



Por favor, mantenga el manual de instrucciones a mano en todo momento para futuras consultas.

CONTENIDO

Aviso de derechos de autor	2
Notas de Seguridad	3
Prólogo	3
Información general.....	3
Instrucciones de seguridad.....	3
Limpieza.....	4
Garantía y responsabilidad.....	4
Eliminación de la báscula.....	4
Especificaciones y Accesorios.....	5
Listado de piezas.....	6
Ensamblaje de la pantalla.....	9
A. Ensamblaje del soporte tipo estándar.....	9
B. Ensamblaje del soporte tipo giratorio.....	10
Uso de la función de plegado.....	12

Aviso de derechos de autor

Charder Electronic Co., Ltd.

No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262 Taiwan

Tel: +886-4-2406 3766

Fax: +886-4-2406 5612

Website: www.chardermedical.com

E-mail: info_cec@charder.com.tw

Derechos de autor © Charder Electronic Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Este manual de usuario está protegido por leyes internacionales de derechos de autor. Todo el contenido está licenciado y su uso está sujeto a autorización por escrito de Charder Electronic Co., Ltd. (en adelante, Charder). Charder no se hace responsable de ningún daño causado por el incumplimiento de los requisitos establecidos en este manual. Charder se reserva el derecho de corregir errores tipográficos en el manual sin previo aviso, así como de modificar el exterior del dispositivo con fines de mejora de calidad sin el consentimiento del cliente.



Charder Electronic Co., Ltd.
No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

Notas de seguridad

■ PRÓLOGO

Gracias por elegir un producto de **CHARDER MEDICAL**. Todas las funciones de este producto han sido diseñadas con tecnología de vanguardia y están optimizadas para un uso simple y directo. Si tiene alguna consulta o experimenta algún problema no abordado en las instrucciones de funcionamiento, comuníquese con su proveedor de servicio autorizado de CHARDER MEDICAL o visítenos en Internet en www.chardermedical.com.

■ INFORMACIÓN GENERAL

Recomendamos encarecidamente utilizar las básculas sobre una superficie plana y dura. Cualquier superficie blanda, como una alfombra, provocará inexactitudes.

■ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Antes de poner el dispositivo en funcionamiento, lea detenidamente la información contenida en las instrucciones de uso. Estas contienen indicaciones importantes para la instalación, uso adecuado y mantenimiento del dispositivo.

El fabricante no será responsable por los daños ocasionados por no seguir las siguientes instrucciones:

- Una instalación incorrecta anulará la garantía.
- Este dispositivo está diseñado para ser utilizado en interiores.
- Respete las temperaturas ambientales permitidas para su uso.

Si tiene algún problema, comuníquese con su proveedor de servicio local de CHARDER MEDICAL.

■ LIMPIEZA

- Recomendamos utilizar toallitas con base de alcohol o productos similares para limpiar las básculas.
- No utilice grandes cantidades de agua al limpiar el dispositivo. También debe evitar el uso de líquidos corrosivos o lavadoras a presión.
- Desconecte siempre la báscula de la fuente de alimentación antes de limpiarla.

■ GARANTÍA-RESPONSABILIDAD

- Si al recibir la unidad se detecta una falla o defecto que esté dentro del ámbito de responsabilidad de **CHARDER MEDICAL**, CHARDER tendrá el derecho de reparar la falla o suministrar una unidad de reemplazo. Las piezas reemplazadas pasarán a ser propiedad de CHARDER. Si la reparación de la falla o el reemplazo no resultan satisfactorios, se aplicarán las disposiciones legales correspondientes. El período de garantía es de **un año**, comenzando en la fecha de compra. Conserve su recibo como prueba de compra. Si su báscula requiere servicio, comuníquese con su distribuidor o con el Servicio de Atención al Cliente de CHARDER MEDICAL.
- No se aceptará responsabilidad por daños causados por cualquiera de las siguientes razones: almacenamiento o uso inadecuado o incorrecto, instalación o puesta en marcha incorrecta por parte del propietario o de terceros, desgaste natural, cambios o modificaciones, manejo incorrecto o negligente, uso excesivo, a menos que esto sea atribuible a negligencia por parte de CHARDER MEDICAL.
- Si condiciones operativas, climáticas u otras provocan un cambio significativo en las condiciones o en la calidad del material, el acuerdo sobre el correcto funcionamiento del equipo quedará anulado. Si CHARDER proporciona una garantía individual, esto significa que la unidad suministrada estará libre de defectos durante el período de garantía.

■ ELIMINACIÓN DE LA BÁSCULA


- Puede obtener más información a través de su ayuntamiento, la empresa municipal de gestión de residuos o el establecimiento donde adquirió el producto.

Especificaciones & Accesorios

Modelo	SM-00001
Dimensión	800mm x 1150mm
Material	Acero
Barra con gancho de bloqueo	
Barra con canaleta para cables	
SS-8311 Placa de fijación	
Tornillo de cabeza abotonada con hexágono interior	
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono Dia. 8 M6*33	
SS-8300B	
Soporte (SS-8303A for DP44) (SS-8303 for DP37)	
M4x8 tornillo	
Rodamiento para soporte	
Tuerca de seguridad M8 para soporte	
Llave	

Lista de las partes del SM-00001



NO.	Item	Drawing	Qty.
1.	Barra de pasamanos	SS-8300B	1
2.	Placa de fijación	SS-6761	4
3.	Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono y cabeza abotonada	M6-21 	10
4.	Barra	AM-8173	1
5.	Tuerca para tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono y cabeza abotonada	ø8-M6*33 	12
6.	Tornillo para conjunto de pantalla	M4*8 	4
7.	Tuerca para el soporte de la impresora (ya instalada)	M5-0.8-JB	2
8.	Tornillo de plástico (ya instalado)	M5-0.8*8	2
9.	Barra con canaleta para cables	AM-2271	1
10.	Tapa de goma	ST-3071	2
11.	Tuerca de seguridad	M8*1.25*8 	1
12.	Rodamiento	SF-1F-08075 	2
13.	Soporte	SS-8303	1
14.	Canaleta para cables	TC-2WE 100cm	1
	Llave		2

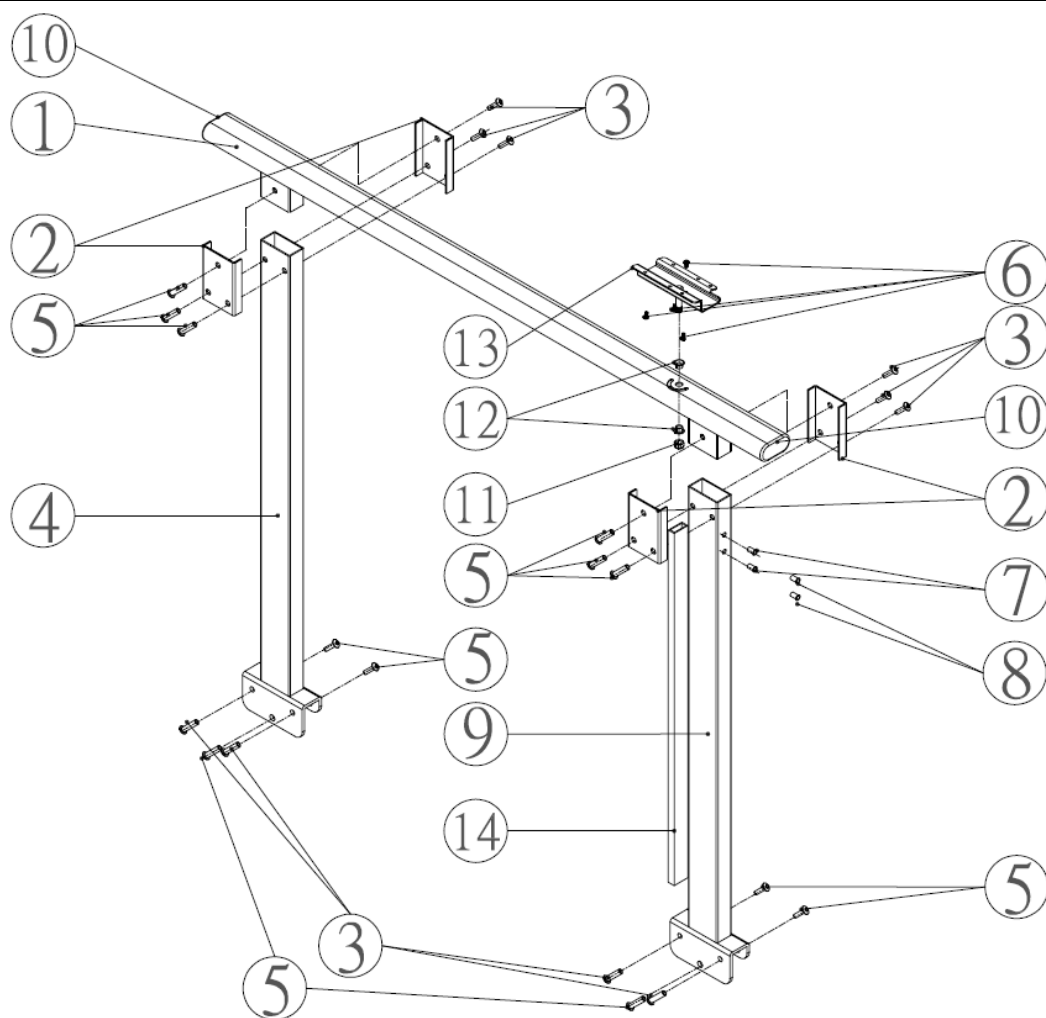

Paso 1.


Fije el número 2 (placa de fijación) en el número 7 (barra con canaleta para cables) con el número 3 (tornillo de vaso) y el número 5 (tuerca).

Fije el número 7 (barra con canaleta para cables) en la plataforma usando el número 3 (tornillo de vaso) y el número 5 (tuerca).

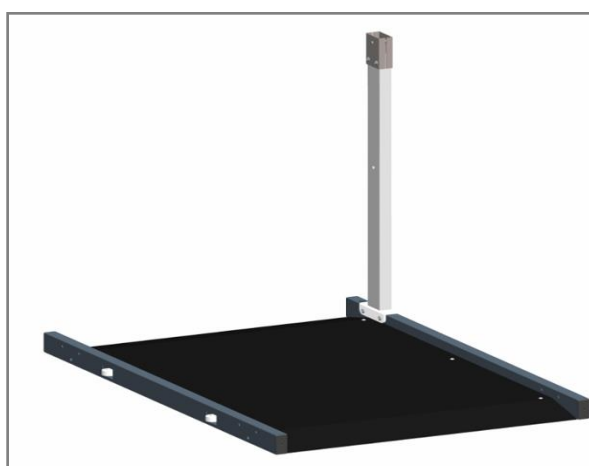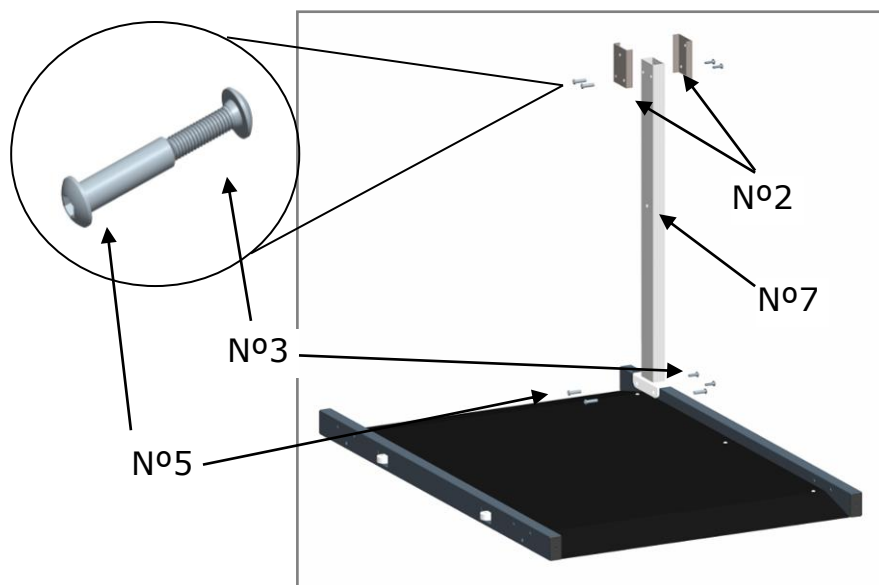


Paso 2.

Ensamble la barra en la plataforma. Igual que en el paso 1.

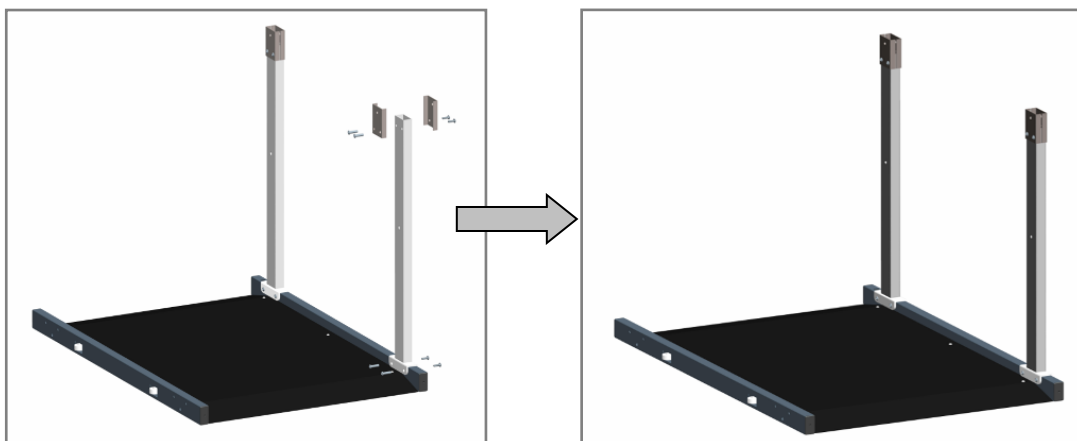


Paso 3.

Ensamble la barra del pasamanos con las barras (postes).

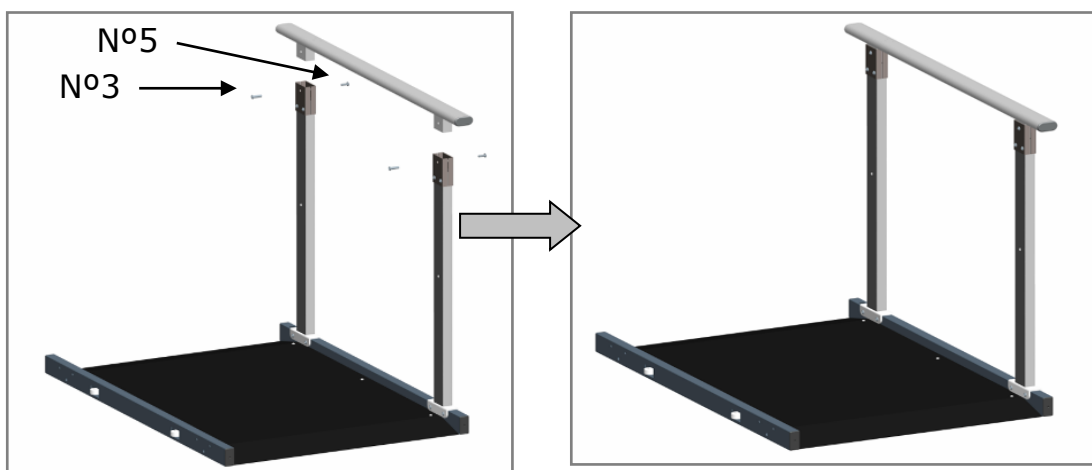

Ensamblaje del indicador

■ A. Ensamblaje del soporte tipo estándar

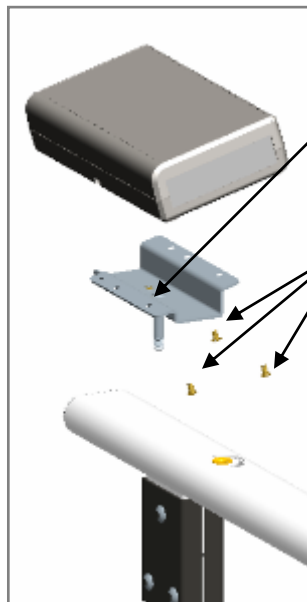


Paso 1.

Coloque un tornillo M4x8 en el centro del soporte.



Paso 2.

Fije la pantalla al soporte con otros 3 tornillos M4x8.

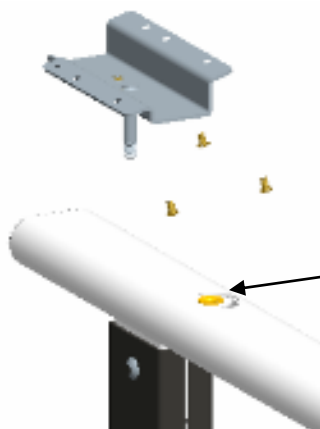

Paso 3.

Coloque el rodamiento en el pasamanos.

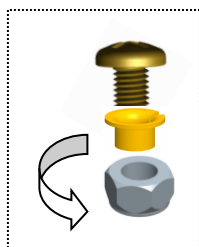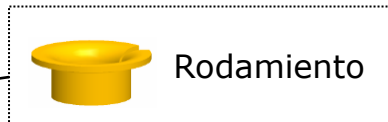

Paso 4.

Ajuste la tuerca con los tornillos M4*8.


Ahora la pantalla puede girar libremente.

■ B. Ensamblaje del soporte tipo giratorio

Nº	Ítem	Especificación	Cant.
1.	Indicador	DP4800	1
2.	Soporte superior	SS-4961	1
3.	Tornillo autorroscante de cabeza redonda	M3x8L	2
4.	Perno de cabeza hexagonal	M8x1.25x45L	1
5.	Arandela	M8 OD Ø22, 2mm thinckness	1
6.	Soporte inferior	CD-AM-00081	1
7.	Perilla de ajuste	MP00600331	2
8.	Arandela	M6 OD Ø22, 1mm thickness	2
9.	Tornillo de perilla	K300-21-M8	1

Paso 1. Ensamble el soporte superior:


Fije el soporte superior (2) a la pantalla con el tornillo (3. Tornillo autorroscante de cabeza redonda).

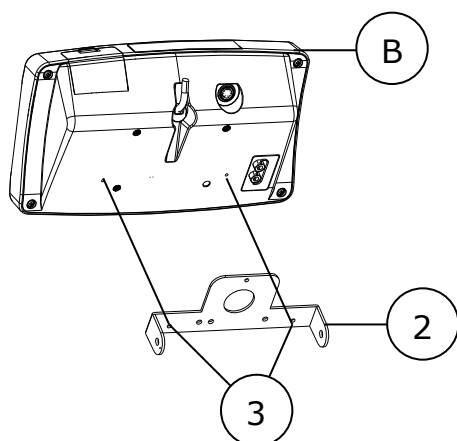

Paso 2. Ensamble el soporte inferior:


Instale el soporte inferior (6) en el pasamanos (10.SM-3461) con el perno de cabeza hexagonal (4) y la arandela (5).

Fije el tornillo de perilla (9) en la parte inferior del pasamanos.

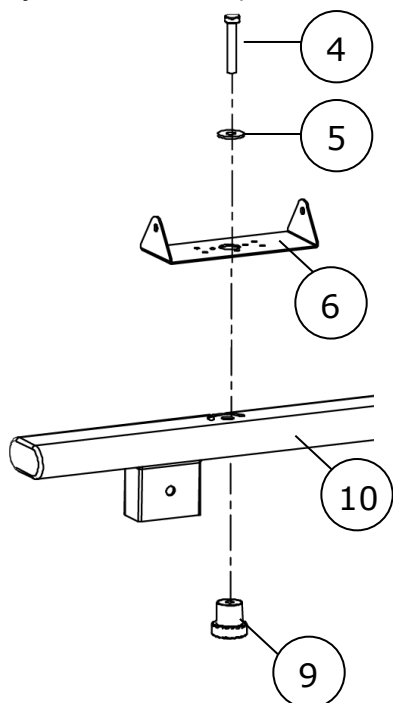


Paso 3. Fijar al pasamanos:

Instale el soporte superior con el indicador y el soporte inferior con la arandela (8) y la perilla de ajuste (7).

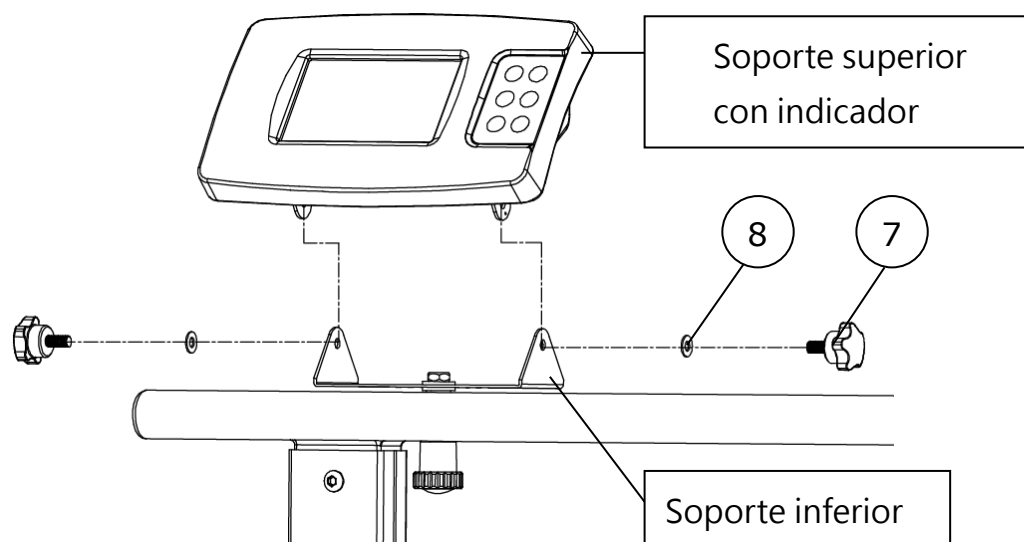

Uso de la función de plegado

Para plegar el pasamanos hacia abajo, libere el gancho de bloqueo y pliegue cuidadosamente el pasamanos hasta que quede completamente apoyado.

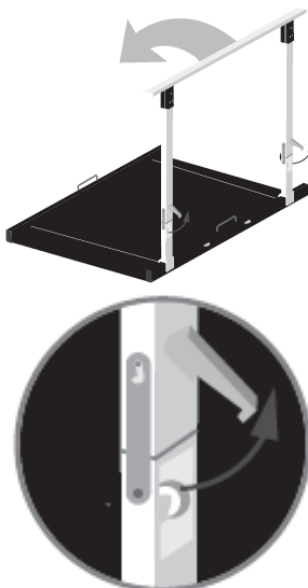


La bisagra se bloqueará en su lugar, lista para el transporte.



Para volver a colocar la báscula, colóquela sobre una superficie sólida y nivelada.



Levante el pasamanos hasta que esté en posición vertical. Fije los ganchos de bloqueo de la bisagra en su lugar y asegúrese de que el pasamanos esté firmemente asegurado.

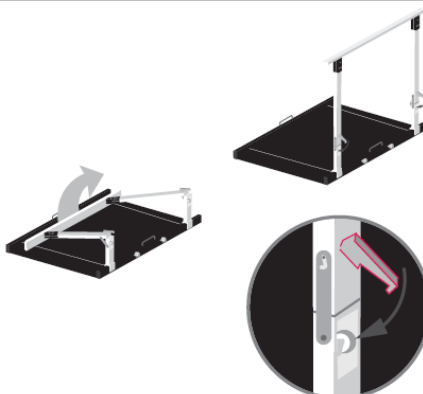

[illegible]

[illegible]



IMPORTADO POR:
SIBEL, S.A.U.
C/ Raimon Casellas, 6-8
08205 Sabadell (Barcelona). Spain.
www.sibelmed.com



Manufactured by:
Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd, Dali Dist.,
Taichung city 41262 ,Taiwan

CD-IN-02042 REV002 04/2026