




身高尺

中文使用說明書 HM202P

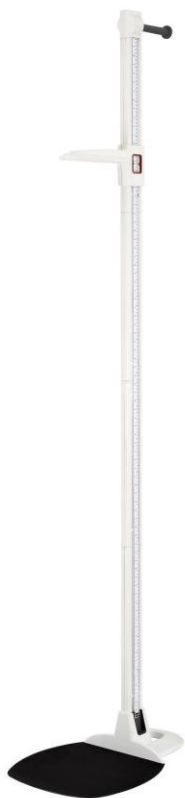

請保留此說明書，以供未來隨時查閱

目錄

標示說明	1
前言	3
使用注意	3
使用目的	3
安全事項	3
環境安全	4
產品清潔	4
產品維護	4
操作注意事項	4
產品責任及保固.....	5
廢棄物處理方式.....	5
產品零件列表	6
HM202P 規格	7
使用前說明	7
組裝流程圖	8
HM202P 操作流程.....	10
Manufacturer's Declaration of Conformity.....	14

標示說明

圖示	說明
	「注意」使用產品前請仔細閱讀說明書和相關文件
	勿與一般家用電子設備一起丟棄 (請洽詢所在地的電子設備回收單位處理)
	廢電池請回收
	製造商的名稱地址
	使用產品前請仔細閱讀說明書，依照內容操作器材
	B 類人體接觸產品
	產品型錄編號
	產品生產批次
	產品序號
	產品型號
	UDI 單一識別碼 (01) GTIN (11) 生產日期 (21) 序號
	顯示值的差異，用來定義和校驗產品
	產品宣告符合相關歐盟指令

CON.	紀錄保護模式中與度量相關特性 (例: 重力值) 的參數修改次數
	產品已取得台灣國家通訊傳播委員會 (NCC) 證書
	產品符合美國聯邦通訊委員會 (FCC) 規範
	產品符合相關英國指令
	產品使用直流電供電，接頭極性採「內正外負」設計。請務必使用符合此極性定義的原廠變壓器，以免造成電路損壞

如有差異，以產品本身的圖示為準

前言

謝謝您選購啟德產品。我們的產品的設計理念是希望能帶給使用者最舒適的感受並且享受每次使用產品時的時光。如果您有任何產品使用上的問題及疑問並且在本說明書中未能解決您的問題，請逕洽詢啟德醫療產品經銷商以協助您解決您的疑問。

使用注意

我們強烈建議您將產品放置在平面且堅硬的地面上使用否則會導致不準確的量測結果。

使用目的

此產品預期被專業人士用來量測病人的體重，當體重穩定後即可讀取量測結果。在使用產品前，請確保此產品經合格人員定期校準以保證此產品的準確性。

安全事項



使用前請詳細閱讀使用手冊。本使用手冊包含了初次安裝、使用說明及日常維護方式。

使用安全注意事項：

- 錯誤的安裝所造成的損失不在保固範圍內。
- 此產品設計在室內使用。
- 注意使用環境溫度在 5°C到 35°C之間。
- 此產品完全符合電磁相容性測試。

如使用上有任何問題請洽詢全省經銷商。

環境安全

- 所有的電池都含有毒化合物，請尋找合格回收商及地點作適當的處理。
- 請勿燃燒電池。
- 使用環境的溫度高低會影響電池的使用壽命。

產品清潔

- 請勿使用大量的清水清洗磅秤，可能會造成無法預期的損壞。
- 請勿使用含有腐蝕性的液體或洗淨液來清潔產品。

產品維護

- 本產品不需每日保養，然而我們建議您應定期檢視產品的精準度作為維護的參考。如您發現有任何問題需要進行產品維護，敬請聯絡全省經銷商。

操作注意事項

在實際進行操作之前，請閱讀以下部份：

- 請在每次操作之前確認顯示幕出現歸零標示才開始進行操作。
- 操作完成後，顯示幕會出現穩定符號，這時可以進行紀錄。

產品責任及保固

- 當產品的設計及製造缺陷歸屬於製造商責任時，製造商負有更換或維修此產品的責任。產品保固期間為購買日起 **18** 個月內，請保留您的收據以證明您的購買日期；如收據遺失則由出廠日起算。
- 當發生下列損害，製造商不負有連帶責任：
 1. 不當的使用方式
 2. 不正確的儲存方式
 3. 由非經銷商不正確的安裝
 4. 改裝
 5. 使用者的疏忽
- 如因操作、氣候或其它因素影響產品保存的狀態與材料的變異則屬製造商的責任。

廢棄物處理方式

此產品不應被當作一般家庭廢棄物來處理，請依電子廢棄物回收條例作為處理的準則。您可以聯繫環境保護署以瞭解更多電子廢棄物的處理方式及回收地點或聯繫您當初購買的經銷商處理

產品零件列表

項目	名稱	數量
1.	支撐柱	1
2.	壓頭板	1
3.	底盤	1
4.	身高尺管	4
5.	捲尺組	1
6.	搭配秤子 MS6111 滑塊 (紅)	1
7.	說明書	1

① 支撐柱



② 壓頭板



③ 底盤




④ 身高尺管



⑤ 捲尺組



⑥ 滑塊 (紅)
或
⑦ 滑塊 (白)

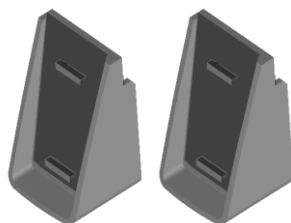

HM202P 規格

量測範圍: 20 ~ 205 公分(cm)

精準度: 1 公釐(mm)


尺寸(寬 x 長 x 高): 10.6 x 58.5 x 220 公分(cm)

重量: 3.6 公斤(kg)

操作溫度範圍: 正 5 度°C 到 正 35 度°C

使用前說明

1. 身高尺 HM202P 可搭配 Charder 的電子體重秤 MS6111 以及 MS6110 使用。
2. 當搭配 MS6111 (無調整腳)使用時，請將捲尺上的掛鉤扣在紅色滑塊最上端的凹槽，如下圖所示：

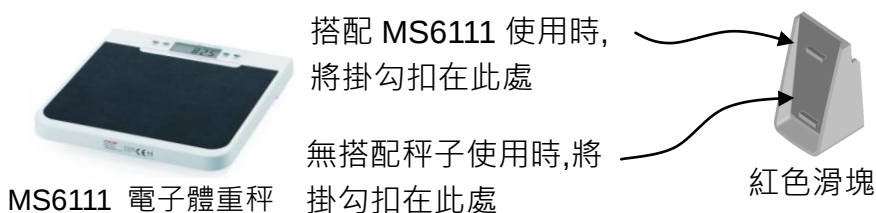


3. 當搭配 MS6110 (有 4 個調整腳)使用時，請將捲尺上的掛鉤扣在白色滑塊最上端的凹槽，如下圖所示：



組裝流程圖


1.

將支撐柱組裝在捲尺組上

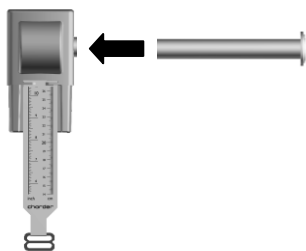


2.

將捲尺往下拉,並將其中一段身高尺管套入捲尺組內

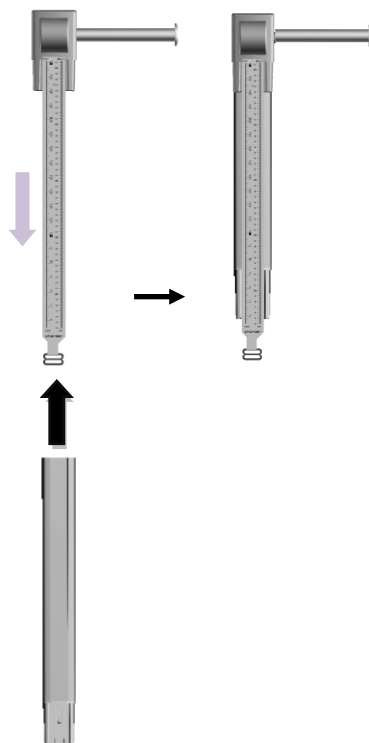


3.

將壓頭板套進最上層的身高尺管中

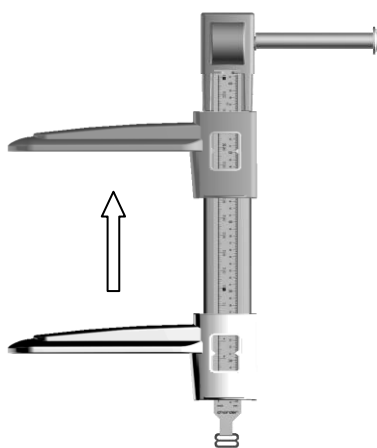

4.

將身高尺管以及底盤組裝在一起

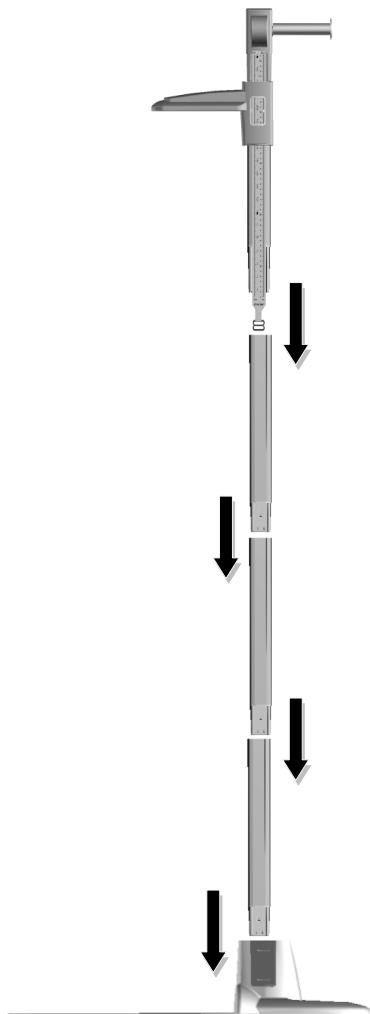

5.

將捲尺的掛鉤扣在滑塊上



6. 組裝完成




HM202P 操作流程

1. 將支撐柱緊靠於牆上



2. 若是沒有搭配秤子使用時,請將捲尺的掛鉤扣在滑塊最下面的凹槽

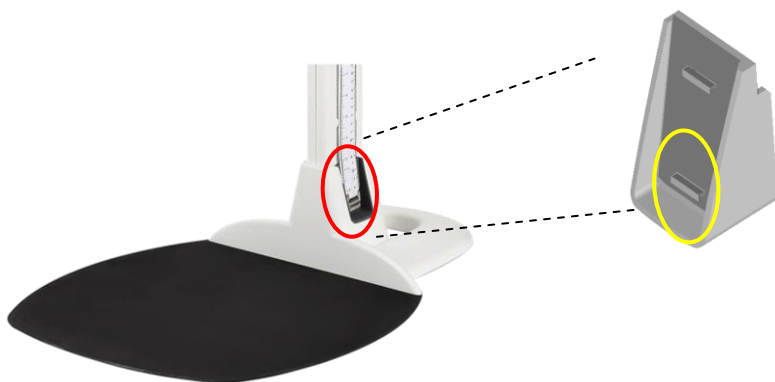

3. 將壓頭板向下移動直到輕微碰觸到受測者頭頂



[illegible]

[illegible]

[illegible]

Manufacturer's Declaration of Conformity

產品依照下列歐盟調和標準製造生產：



歐盟有害物質限用指令 (RoHS)

本產品符合 RoHS 指令 2011/65/EU 及其修訂指令 (EU)
2015/863 之規範

製造業者名稱：啟德電子股份有限公司
製造業者地址：臺中市大里區國中路 103 號

CD-IN-00015 REV005 01/2026