




Support d'indicateur

MANUEL D'UTILISATION SM2714

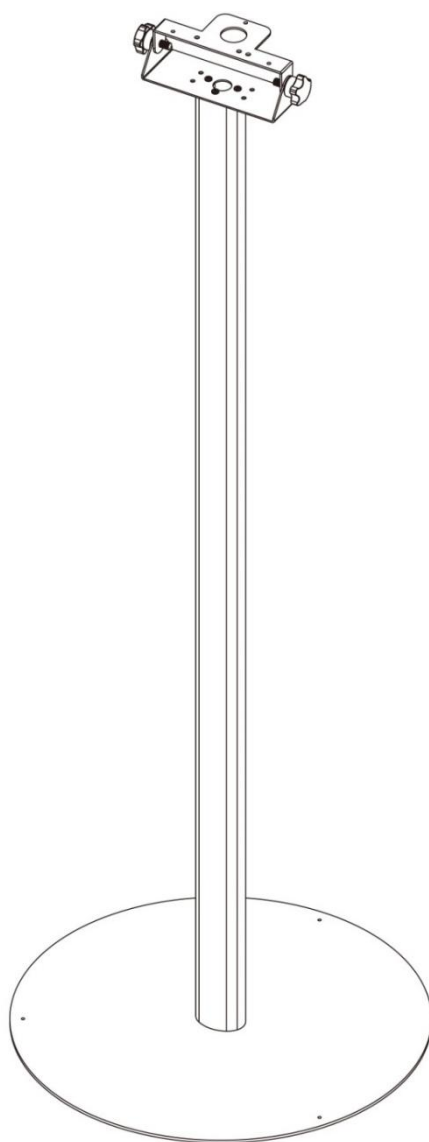

Conservez toujours le manuel d'instructions à portée de main pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

chorder[®]

Fiable | Précis | Facile à utiliser

Avis de droit d'auteur

Charder Electronic Co., Ltd.

No.103, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 41262 Taiwan

Tél : +886-4-2406 3766

Fax : +886-4-2406 5612

Site internet : www.chardermedical.com

E-mail : info_cec@charder.com.tw

Copyright© Charder Electronic Co, Ltd. Tous droits réservés.

Ce manuel d'utilisation est protégé par la loi internationale sur les droits d'auteur. Tout le contenu est sous licence et son utilisation est soumise à l'autorisation écrite de Charder Electronic Co., Ltd. (ci-après Charder) Charder n'est pas responsable des dommages causés par le non-respect des exigences énoncées dans ce manuel. Charder se réserve le droit de corriger les erreurs d'impression dans le manuel sans préavis et de modifier l'extérieur de l'appareil à des fins de qualité sans le consentement du client.

Charder Electronic Co., Ltd.
No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

SOMMAIRE

I . NOTES DE SÉCURITÉ.....	2
II. PART I . NOTES DE SÉCURITÉ	2
II. PARTIES	2
II. PARTIES	2
III. ASSEMBLAGE DE L'INDICATEUR POUR DP2701.....	2
III. ASSEMBLAGE DE L'INDICATEUR POUR DP2701.....	2
IV. ASSEMBLAGE DE L'INDICATEUR POUR DP3400.....	2
IV. ASSEMBLAGE DE L'INDICATEUR POUR DP3400.....	2
V . ASSEMBLAGE DE L'INDICATEUR POUR DP37	2
V . ASSEMBLAGE DE L'INDICATEUR POUR DP37	2
VI. ASSEMBLAGE DE L'INDICATEUR POUR DP48.....	2
VI. ASSEMBLAGE DE L'INDICATEUR POUR DP48.....	2
VII. ASSEMBLAGE POUR THERMO PRINTER TP21 SERIES	2

I . Notes de sécurité

Préface

Merci d'avoir choisi le produit CHARDER MEDICAL. Toutes les caractéristiques de ce produit de pointe ont été conçues et optimisées pour une utilisation simple et directe. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes qui ne sont pas abordés dans le mode d'emploi, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Informations générales

Nous vous recommandons vivement d'utiliser les produits sur une surface plane et dure. Toute surface molle, comme une moquette, sera instable.

Nettoyage

Nous recommandons d'utiliser des lingettes à base d'alcool ou similaires pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de grandes quantités d'eau pour nettoyer le produit, car cela l'endommagerait. N'utilisez pas non plus de liquides corrosifs ou de nettoyeurs à haute pression.

Garantie - responsabilité

Les produits Charder medical vendus par un revendeur autorisé sont garantis pendant 2 ans à partir de la date d'achat originale et seulement pour l'utilisateur final original. Les produits médicaux Charder vendus par un revendeur autorisé sont garantis contre les défauts de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale. La garantie ne couvre pas les éléments suivants

Stockage, installation, utilisation ou entretien inadéquats ou incorrects ; dommages apparents résultant d'un accident, d'une négligence ou d'un abus ou d'une manipulation incorrecte ; dommages causés par une humidité élevée, l'infiltration de liquides ou de substances étrangères ; dommages dus à l'utilisation à des températures en dehors de la plage de « température de fonctionnement ».


Mise au rebut du produit

Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire, mais doit être remis à un centre de recyclage du matériel.


II. Parties

Support pour la série DP2701/DP3400/DP37/DP48


N°	ÉLÉMENT	SPEC.	QTÉ
1	Screw pour l'indicateur	SW-8060	2
2	Support A	SS-4961	1
3	Support B	SS-4971	1
4	Colonnes	SS-3751A	1
5	Plaque ronde	SS-6151	1
6	Pied en caoutchouc	MF-016ST	3
7	Vis hexagonale	M3*6	3
8	Hexagone à tête fraisée	M4*0.7*12	3
9	Vis autotaraudeuse	3*8	3
10	Ecrou de rivet	M5	2
11	Vis à tête cruciforme	M4*0.7*8	3
12	Vis à tête cylindrique	M5*0.8*11	2

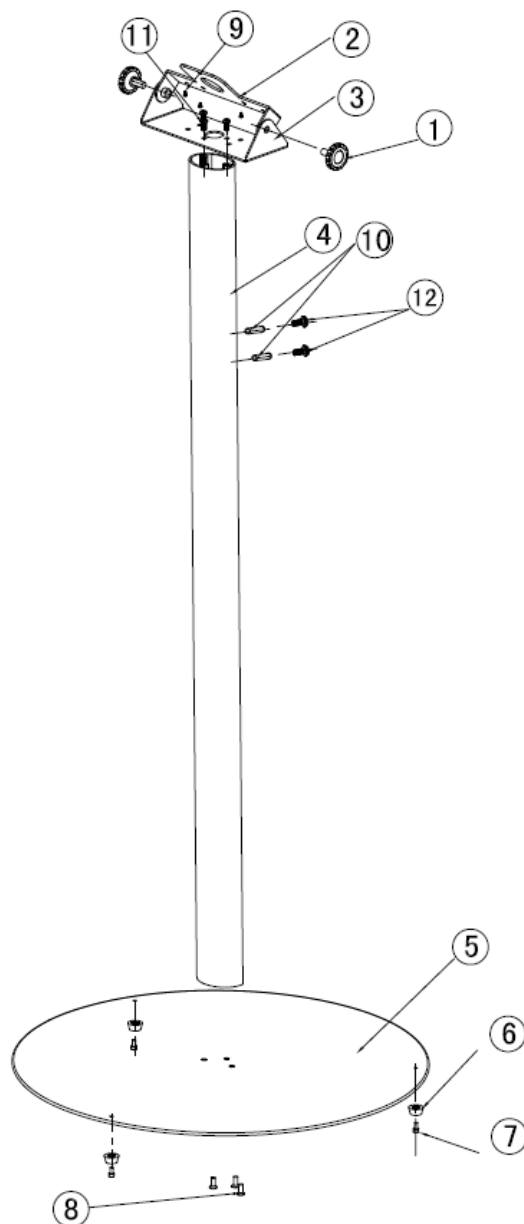


III. Assemblage de l'indicateur pour DP2701

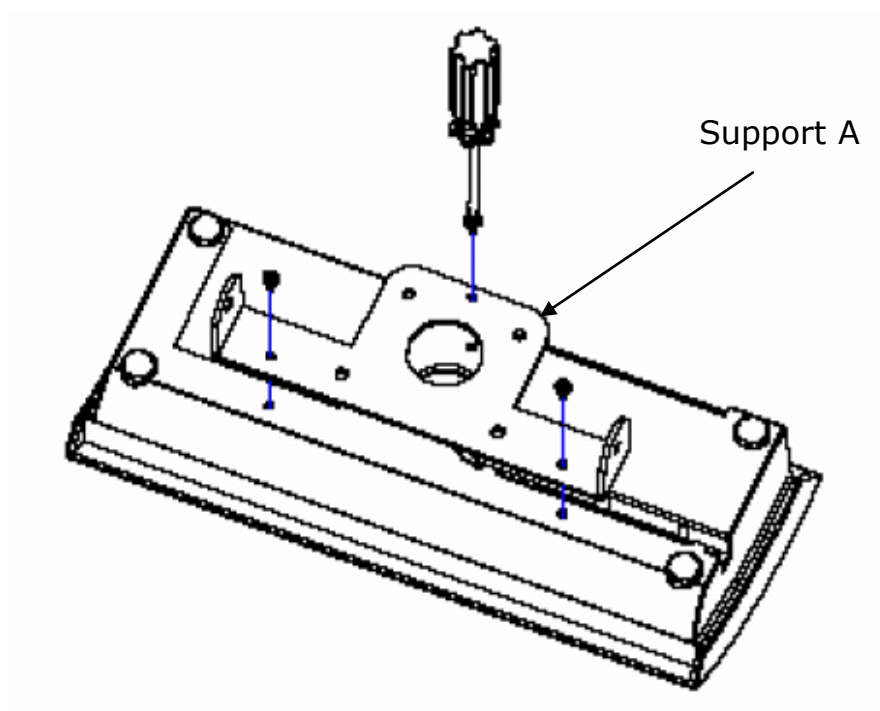

Fixer le support A sur l'indicateur à l'aide de trois vis et du jeu de vis de l'indicateur.

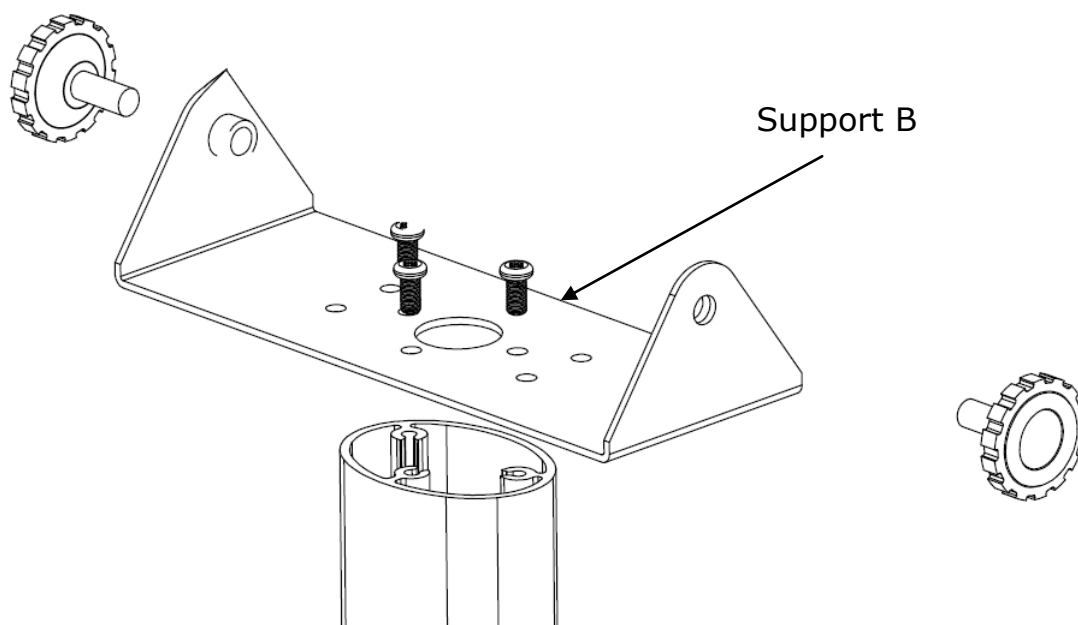


Fixer le support B sur la colonne à l'aide de trois vis cruciformes POINT 8.

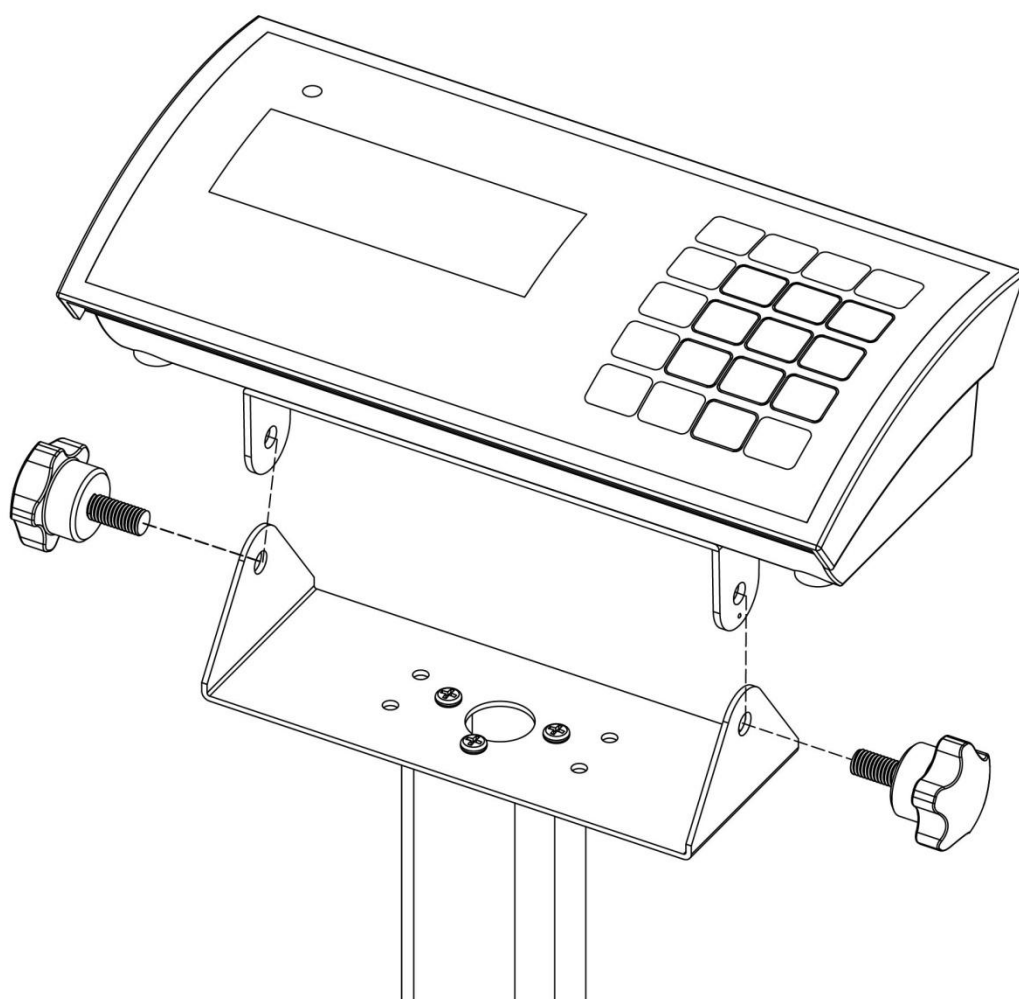


Fixer les vis de l'indicateur pour compléter l'assemblage de l'indicateur.


IV. Assemblage de l'indicateur pour DP3400

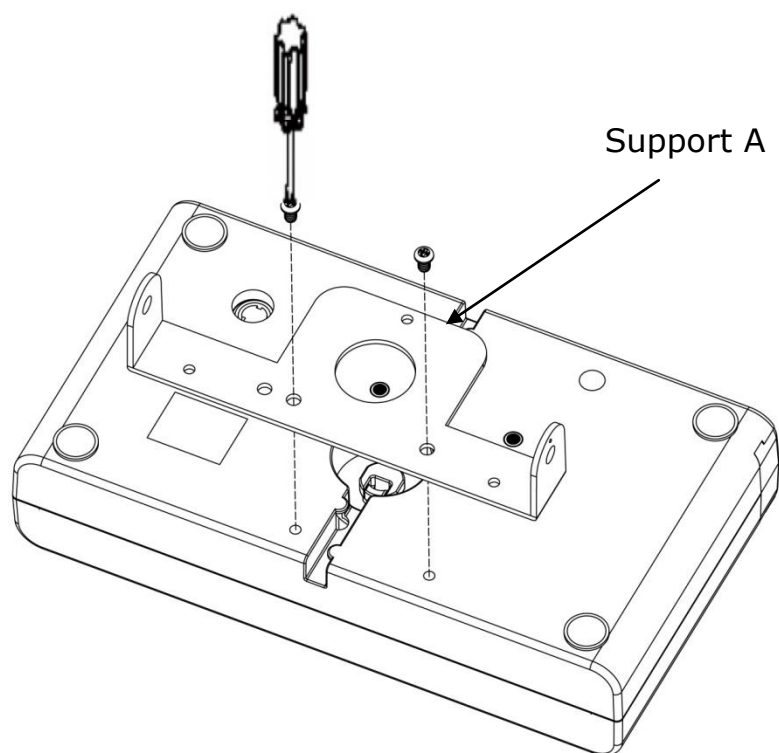

Fixer le support A sur l'indicateur à l'aide de trois vis et du jeu de vis de l'indicateur.

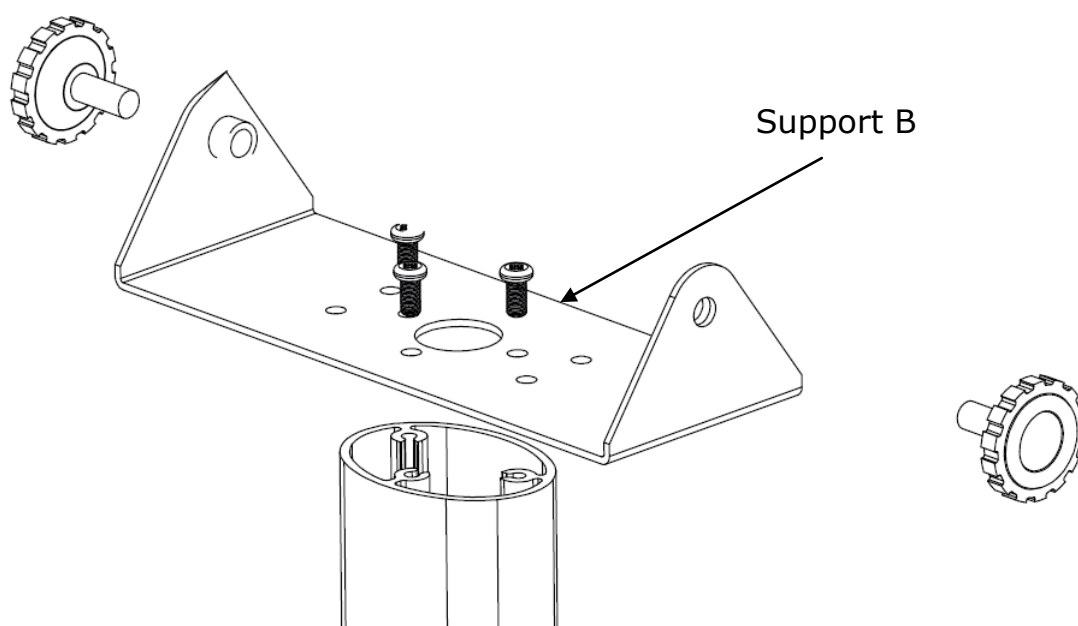


Fixer le support B sur la colonne à l'aide de trois vis cruciformes POINT 8.

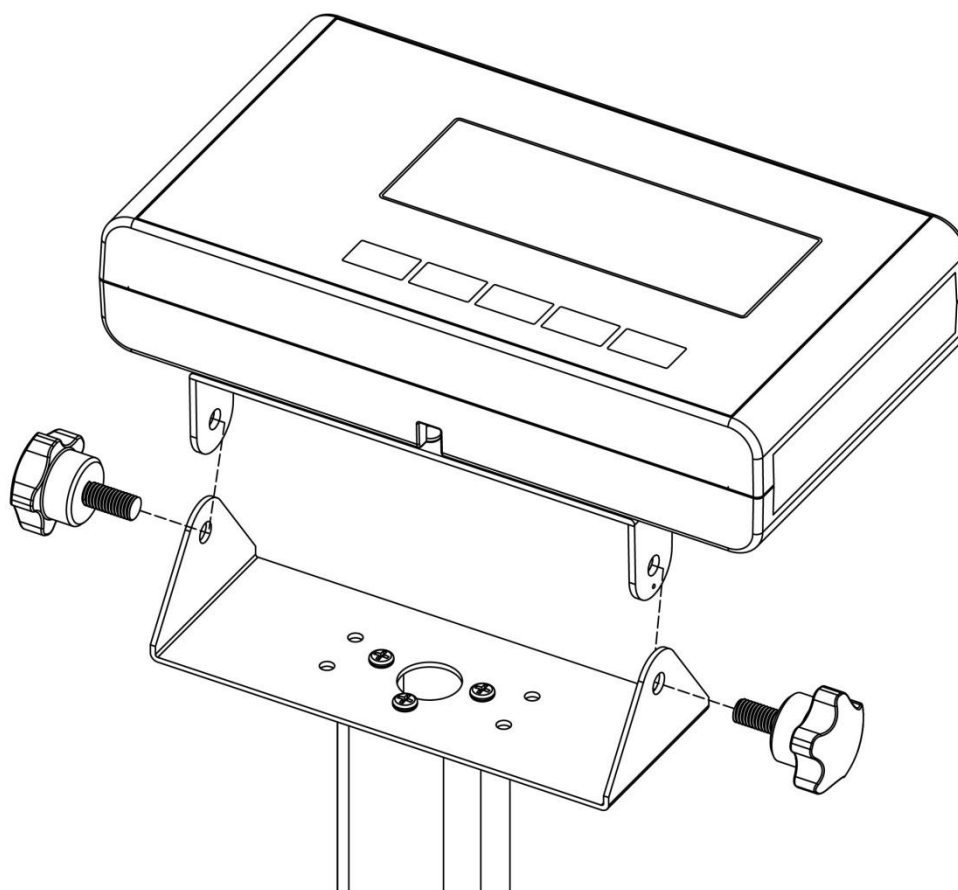


Fixer les vis de l'indicateur pour compléter l'assemblage de l'indicateur.


V. Assemblage de l'indicateur pour DP37

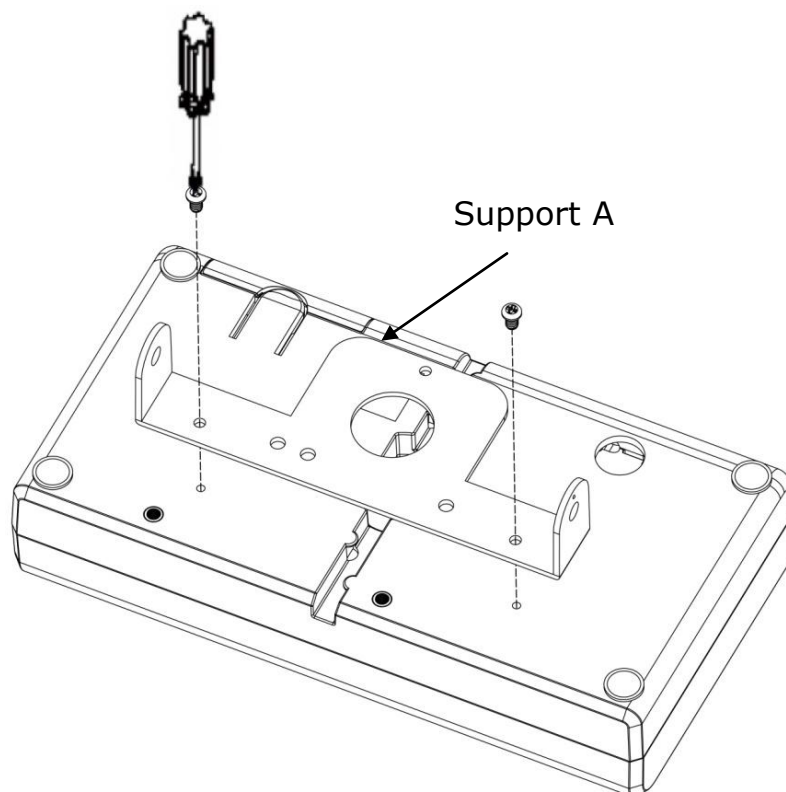

Fixer le support A sur l'indicateur à l'aide de trois vis et du jeu de vis de l'indicateur.

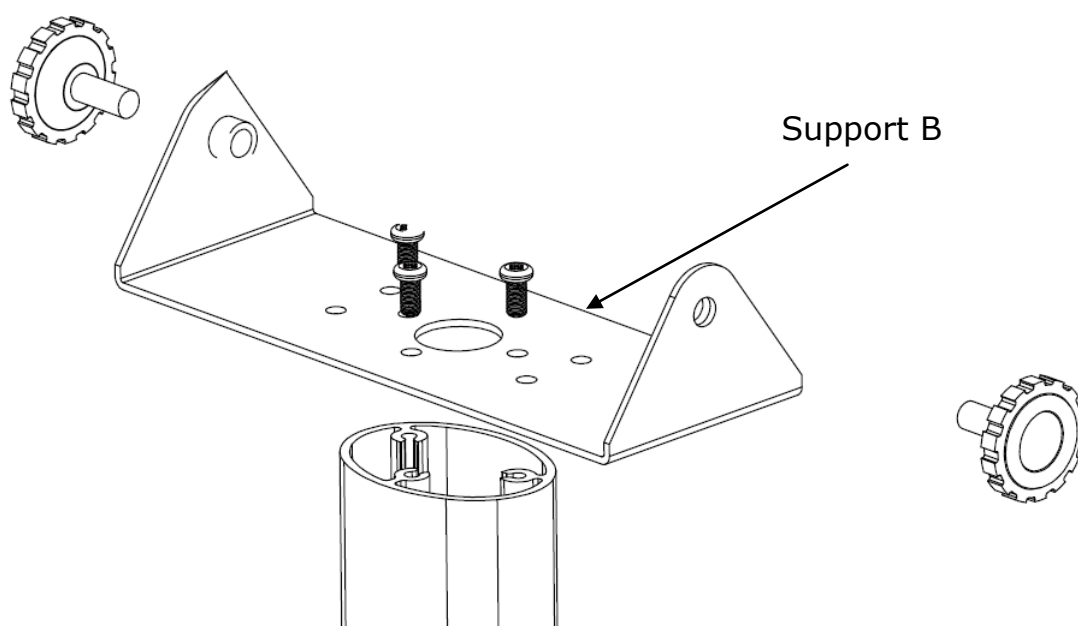


Fixer le support B sur la colonne à l'aide de trois vis cruciformes POINT 8.

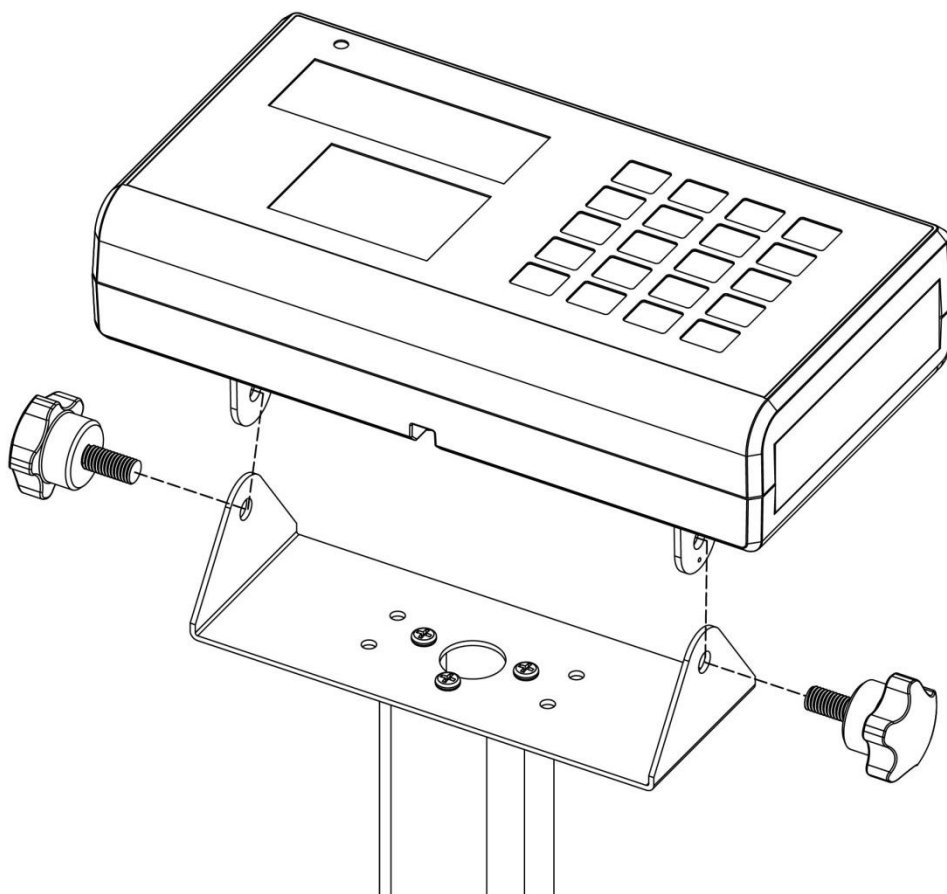


Fixer les vis de l'indicateur pour compléter l'assemblage de l'indicateur.


VI. Assemblage de l'indicateur pour DP48

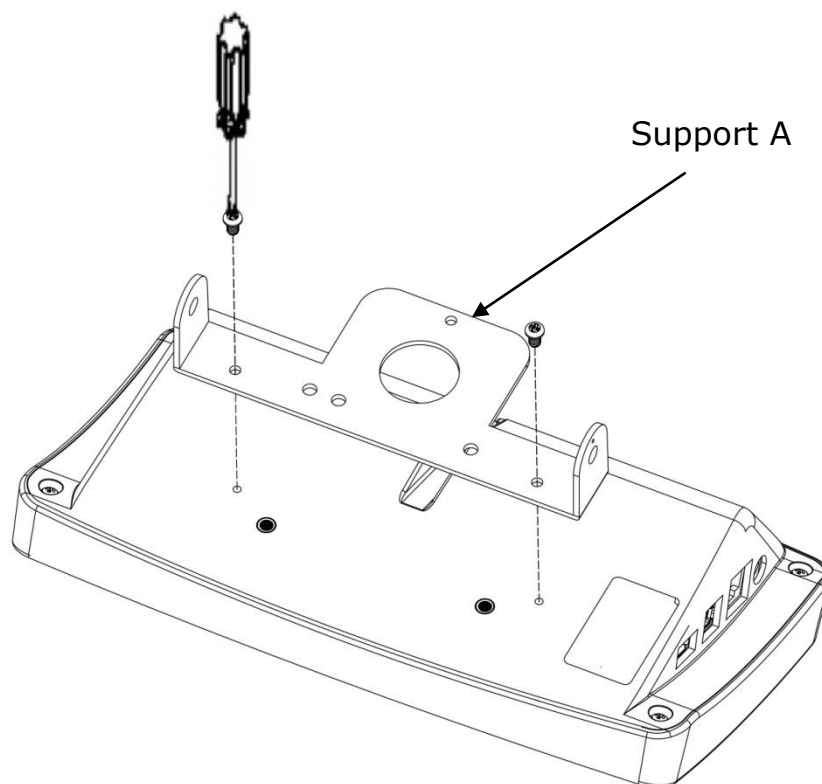

Fixer le support A sur l'indicateur à l'aide de trois vis et du jeu de vis de l'indicateur.

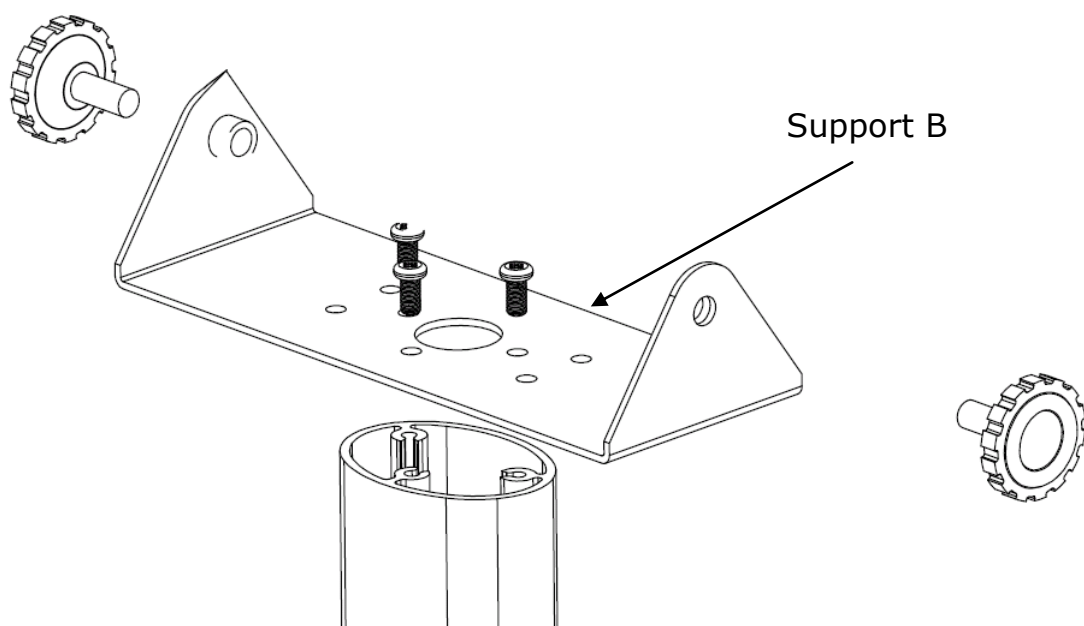


Fixation du support B sur la colonne à l'aide de trois vis cruciformes POINT 8.

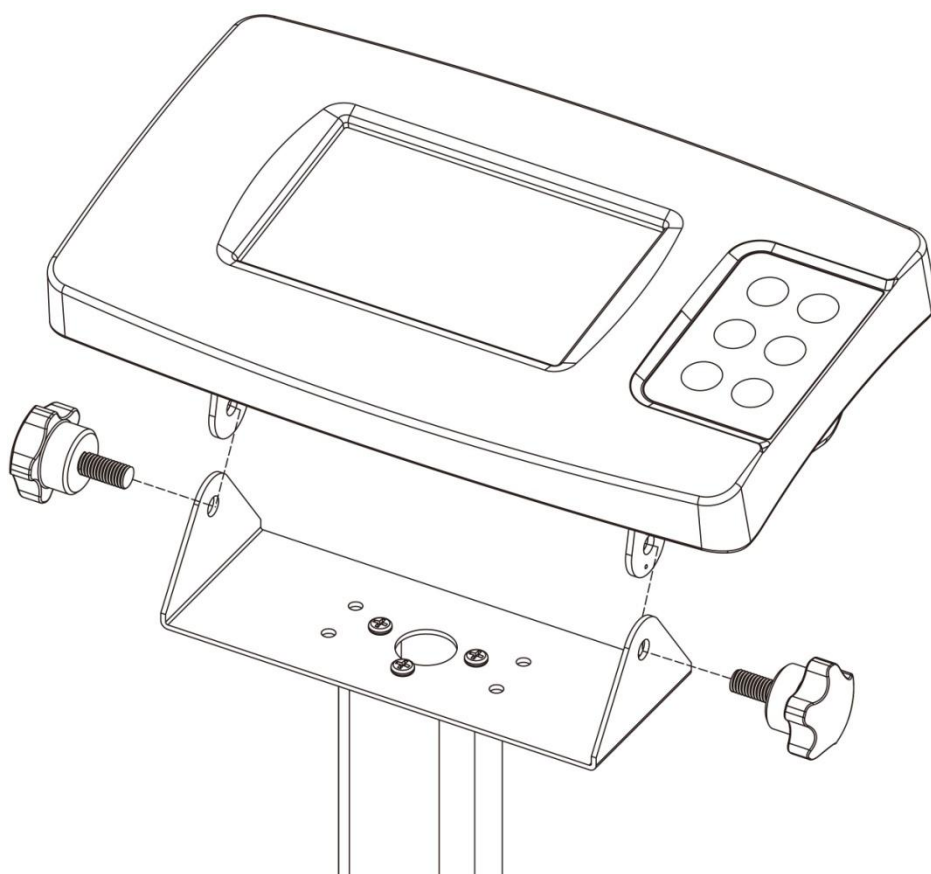

Fixer les vis de l'indicateur pour compléter l'assemblage de l'indicateur

VII. Assemblage pour Thermo Printer TP21 Series

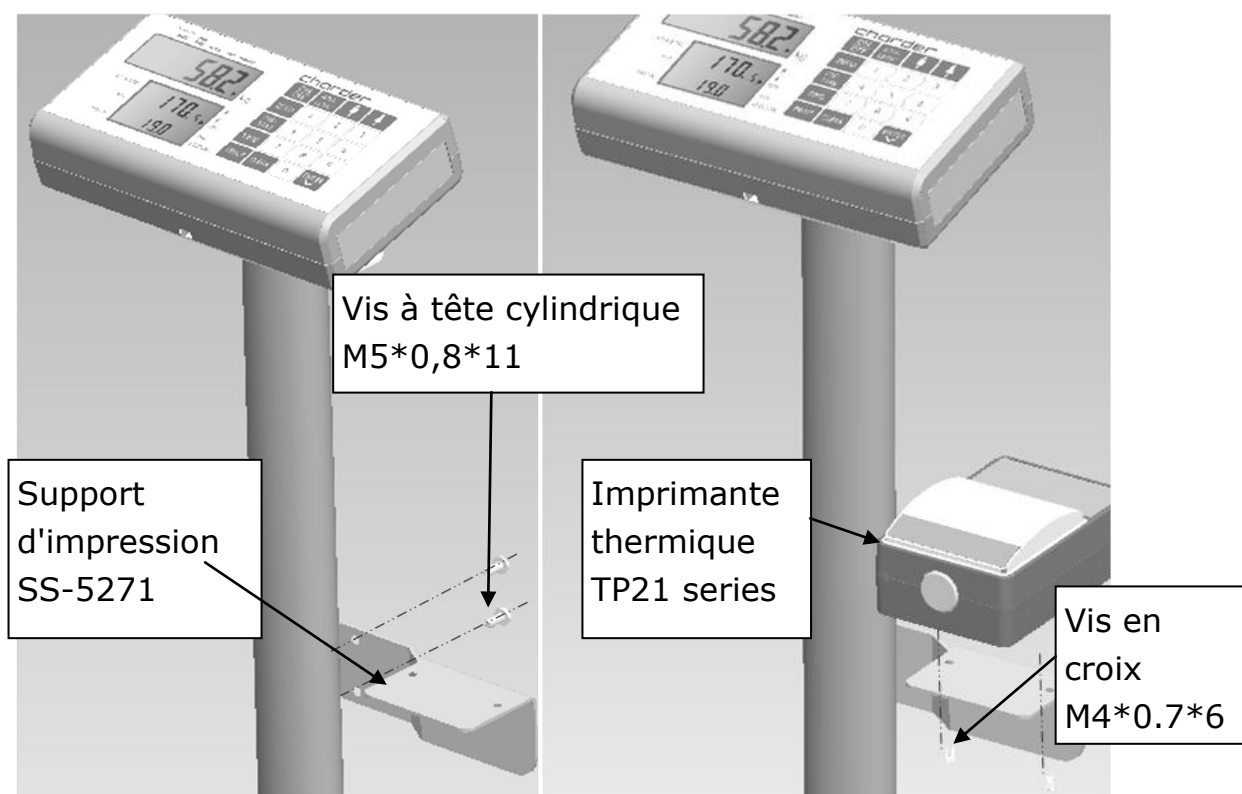

Représentant autorisé de l'UE:



Obelis s.a.
Bd Général Wahis, 53
B-1030 Brussels
Belgium

Manufactured by:



Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City 41262 ,Taiwan

CD-IN-00337 REV002 07/2026