

chorder®

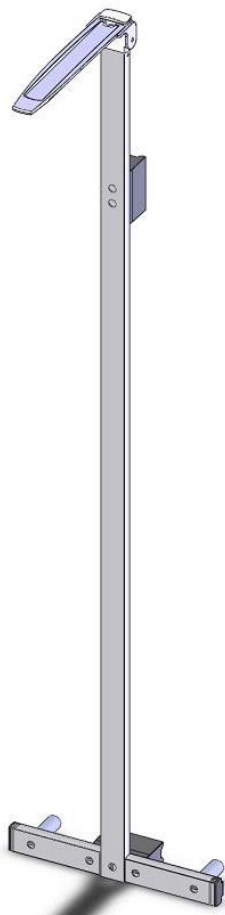

HM230M
中文使用說明書

請保留此說明書，以供未來隨時查閱

目錄

前言	2
使用注意	2
安全事項	2
產品清潔	2
操作注意事項	2
產品責任及保固	2
產品維護	3
廢棄物處理方式	3
產品規格	4
標準配件	5
安裝	6
如何讀取身高數值	9

前言

謝謝您選購啟德產品。我們的產品的设计理念是希望能帶給使用者最舒適的感受並且享受每次使用產品時的時光。如果您有任何產品使用上的問題及疑問並且在本說明書中未能解決您的問題，請逕洽詢啟德醫療產品經銷商以協助您解決您的疑問。

使用注意

我們強烈建議您將產品固定於在平面且堅硬的牆面上使用，否則可能會導致不準確的量測結果。

安全事項



使用前請詳細閱讀使用手冊。本使用手冊包含了初次安裝、使用說明及日常維護方式。

使用安全注意事項：

- ◆ 錯誤的安裝所造成的損失不在保固範圍內。
- ◆ 此產品設計在室內使用。
- ◆ 注意使用環境溫度在 5°C 到 35°C 之間。

如使用上有任何問題請洽詢全省經銷商。

產品清潔

- ◆ 請勿使用含有腐蝕性的液體或洗淨液來清潔產品。
- ◆ 我們強烈建議使用清水或含酒精的清潔劑來擦拭產品。

操作注意事項

在實際進行操作之前，請閱讀以下部份：

- ◆ 請按說明書進行操作，並使用標準配件正確地安裝(詳見安裝說明)。

產品責任及保固

- ◆ 當產品的設計及製造缺陷歸屬於製造商責任時，製造商負有更換或維修此產品的責任。產品保固期間為購買日起 18 個月內，請保留您的收據以證明您的購買日期；如收據遺失則由出廠日起算。
- ◆ 當發生下列損害，製造商不負有連帶責任：
 - 不當的使用方式
 - 不正確的儲存方式
 - 由非經銷商不正確的安裝
 - 改裝
 - 使用者的疏忽

如因操作、氣候或其它因素影響產品保存的狀態與材料的變異則屬製造商的責任。

產品維護

- ◆ 本產品不需每日保養，然而我們建議您應定期檢視產品的精準度作為維護的參考。如您發現有任何問題需要進行產品維護，敬請聯絡全省經銷商。

廢棄物處理方式

此產品不應被當作一般家庭廢棄物來處理，請依廢棄物回收條例作為處理的準則。您可以聯繫環境保護署以瞭解更多廢棄物的處理方式及回收地點或聯繫您當初購買的經銷商處理。

產品規格

量測範圍: 10 ~ 230 cm

精準備度: 1mm

誤差範圍: $\pm 10\text{mm}$


淨重: 1.5 kg

毛重: 2.0 kg

操作溫度範圍: 5°C up to 35°C

標準配件


編號	配件名稱	數量
a	尺身測量桿	1
b	底座螺絲	2
c	自攻牙螺絲	3
d	平頭螺絲	2
e	底座	2
f	塑膠壁虎	3
g	扶持塊	2

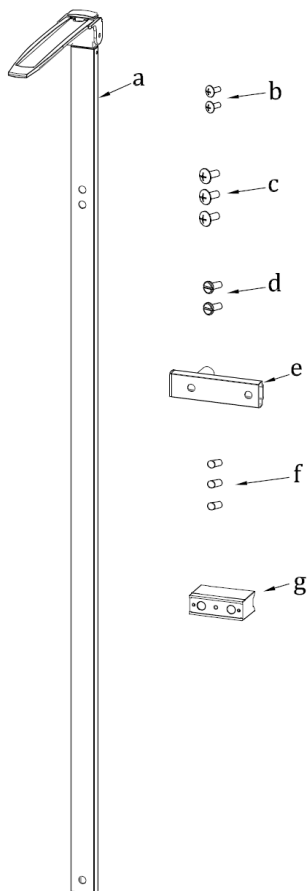

安裝


固定尺身量測桿到牆上

1. 拉上量測桿到最頂部.
2. 用平頭螺絲鎖緊上下兩塊扶持塊.

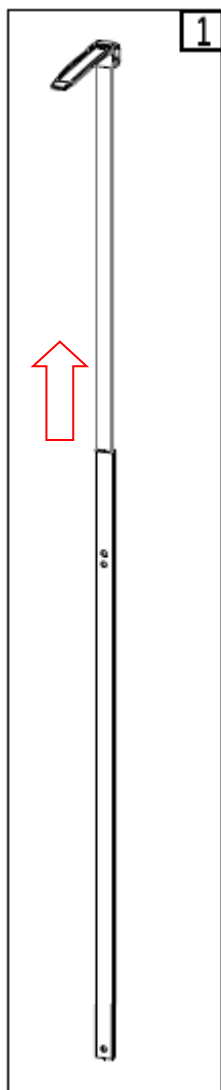


螺絲尺寸:
M5 x 0.8 x 10

3. 在木板牆上,鎖上自攻牙螺絲.



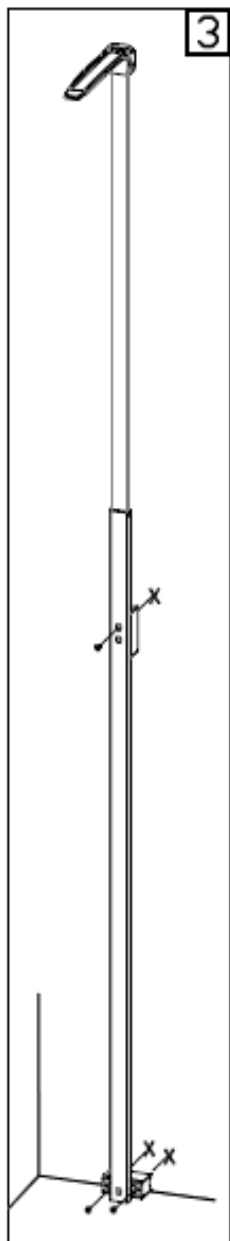


螺絲尺寸:
M4 x 30

4. 用螺絲鎖緊左右兩邊底座.



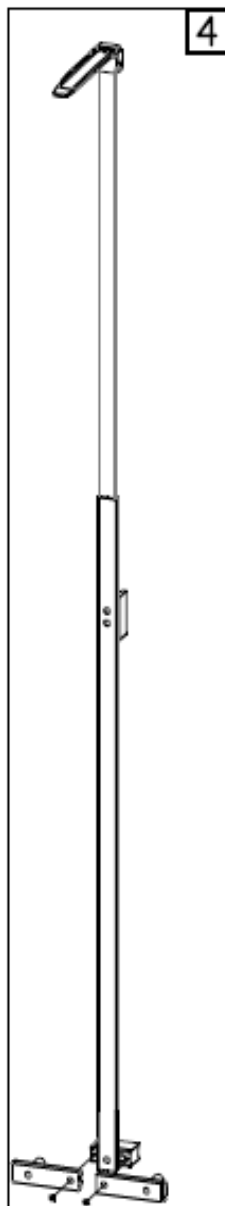


螺絲尺寸:
M4 x 12

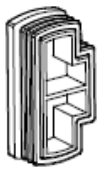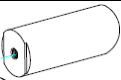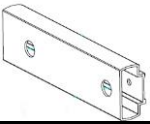
序號	配件	名稱	規格	數量
1		塑膠蓋	SW-8069	2
2		橡膠管	SS-8152	2
3		底座踢腳板	SS-8149	2
4		自攻螺絲	4*12	4

Tips:

1. 用自攻牙螺絲將橡膠管與底座踢腳板鎖上
2. 將底座踢腳板用自攻牙螺絲鎖在扶持塊左右兩邊
3. 蓋上底座踢腳板左右塑膠蓋

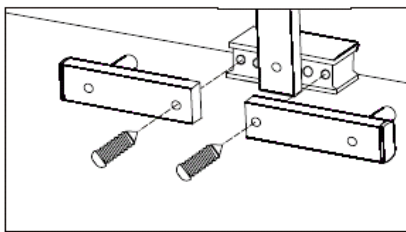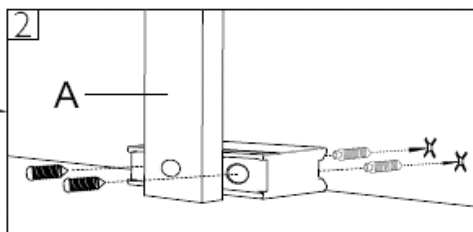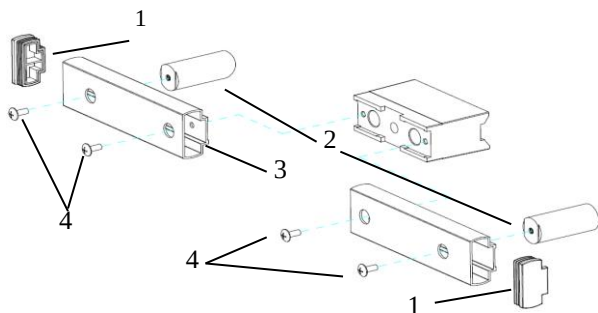

如何讀取身高數值

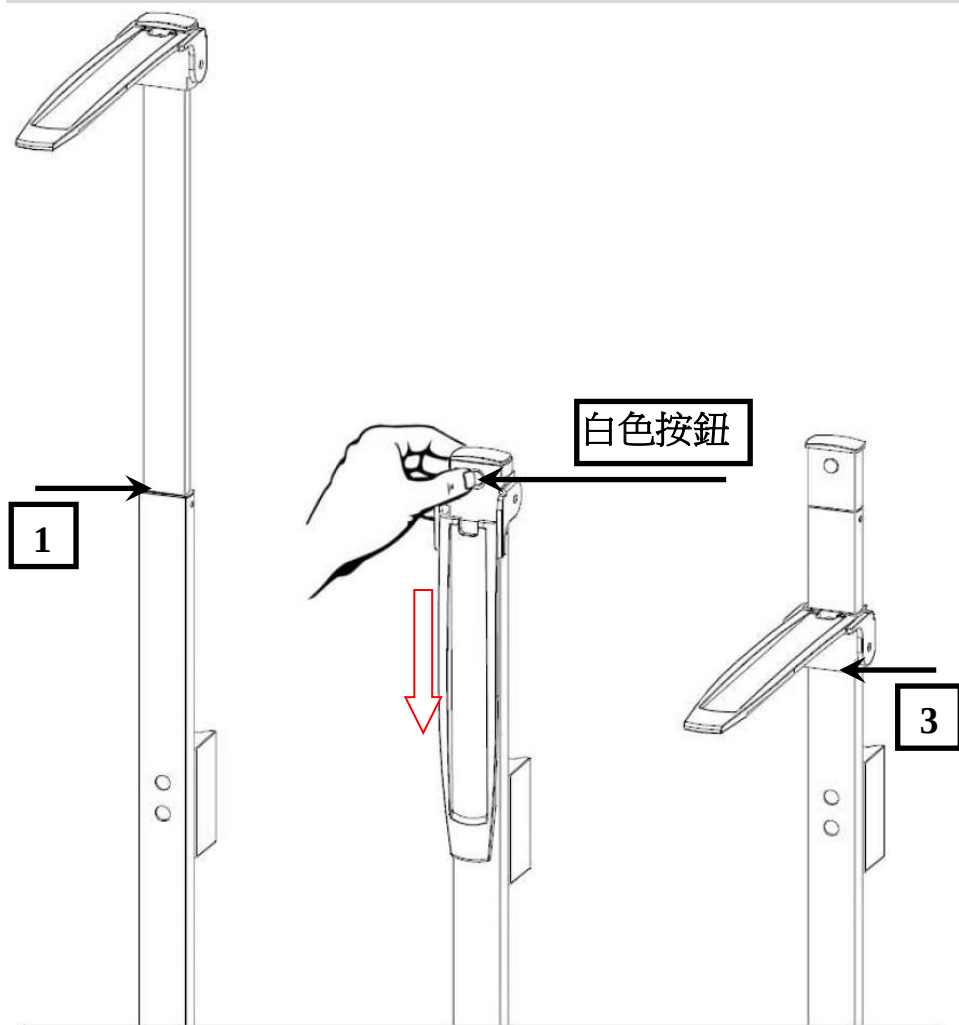

1. 測量 130cm 到 230cm，身高數值在箭頭位置 **1** 可得到身高測量結果.
2. 測量 130cm 以下，
 - 壓下白色按鈕卡榫 **2**.
 - 將頭部擋板往下拉.
 - 在箭頭位置 **3** 可得到身高測量數值

[illegible]

符合性宣告

產品依照下列歐盟調和標準製造生產



(EU) 2017/745 Regulation on
Medical Devices

**RoHS Directive 2011/65/EU and Delegated Directive
(EU) 2015/863**

合格授權的歐盟代表:



Obelis s.a.
Bd Général Wakis, 53
B-1030 Brussels
Belgium

製造商:



啟德電子股份有限公司

41262 台中市大里區國中路 103 號,