



## MS7800 急救移位秤



醫護人員的得力助攻：爭取黃金急救時間  
有效結合急救/常規性操作流程！

MS7800急救移位秤能在搬移患者的過程中，即時量測其體重。大幅縮短量測體重的時間，並且維持患者搬移過程的安全。協助第一線醫護人員於急救過程，可即時掌握精準體重數據，加快給予正確劑量的藥物救治，真正有效結合急救或常規照護的流程，且操作簡易、省力、方便好攜帶，是醫護從業人員的好幫手！





# 就讓急救移位秤協助您 醫療等級的多項優勢

## 省時

- 搬移的同時同步量測體重，減輕醫護人員工作負擔。
- 有效爭取急救時間，量秤快速，使用操作簡易好上手。
- 隨身攜帶方便，不會受到患者所在的場域影響。

## 省力

- 搬移病患安全且更省力。
- 大螢幕顯示重量，清晰好閱讀。
- 表面材質經生物相容性測試，使用安全好清潔。
- 內建磁吸充電接頭，出勤時隨拔隨走，充電快速又輕鬆。

## 精準有效，更放心

- 提供準確的重量至500克。
- 於英國30間醫療院所臨床實測完成。
- 實證能減輕醫護人員工作負擔，加速照護流程。
- 重量鎖定功能，即使病患晃動仍可測得準確重量。

## 避免醫療糾紛

- 透過量測取得病患精準的體重，讓第一線醫護人員於緊急醫療救治更具保障與信心。
- 能協助在短的時間內做出正確的判斷，給予最適合的治療。



背光大螢幕



磁吸充電孔



掛在牆面，收納方便



# 善用急救移位秤

## 打造醫病的安心雙贏體驗

### 快速量秤

- 急救移位秤是一項革命性的量測新方法，急救、診治和照護等多項醫療情況都講求效率，善用急救移位秤可快速獲取患者體重。

### 量秤方式簡單

- 對於無法移動的患者可以更輕鬆、更有尊嚴的方式進行測量。

### 精準有效

- 量秤過程簡單安全舒適，無論是日常照護或急救診治，都能快速精準量秤。


### 擁有更多安全

- 當需要快速用藥或治療時，取得患者精準的體重尤其重要！使用急救移位秤就能更放心的接受藥物救治，有效安全的被治療。


| 型號       | MS7800                        |
|----------|-------------------------------|
| 量程 / 精準度 | 250kg x 500g                  |
| 產品重量     | 11 kg                         |
| 測量單位     | kg or lb                      |
| 功能鍵      | ON/OFF/ZERO/TARE , HOLD/UNITS |
| 顯示螢幕尺寸   | 28 x 75mm LCD                 |
| 電池       | 內建可充電鋰電池                      |
| 產品尺寸     | 1800mm x 700mm x 30mm         |
| 量測台面尺寸   | 1800mm x 510mm                |



# 急救移位秤 使用步驟

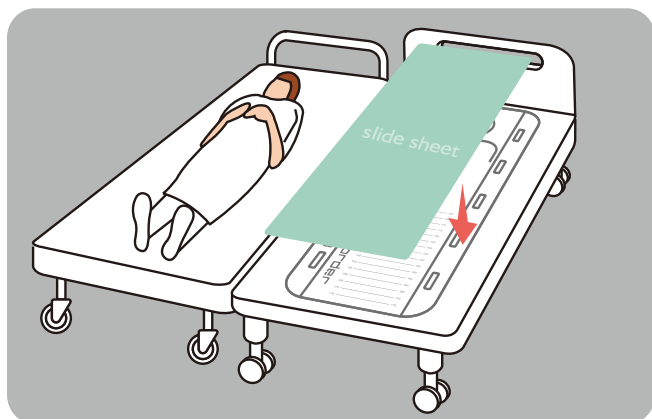


**Step 1** 使用移位秤前，請確保病床或推車高度相同，且輪子已鎖住固定。  
將移位滑布鋪於移位秤上，打開電源。

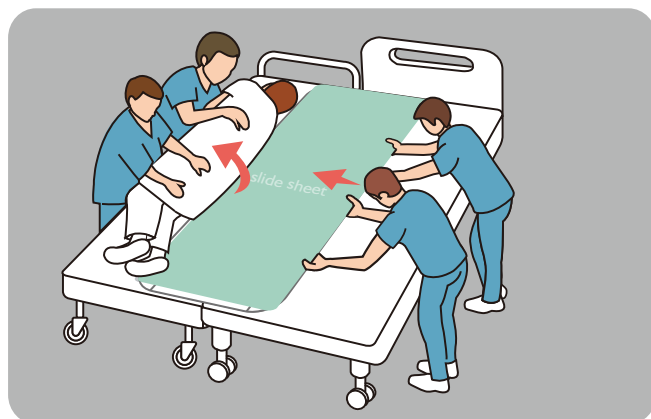


**Step 2** 協助病患側躺，將移位秤推至兩個台面之間，盡可能放置在病患的脊椎和臀部下方。




**Step 3** 記錄病患身高。  
記錄病患體重，需確保醫護人員手沒有觸碰病患和移位秤。

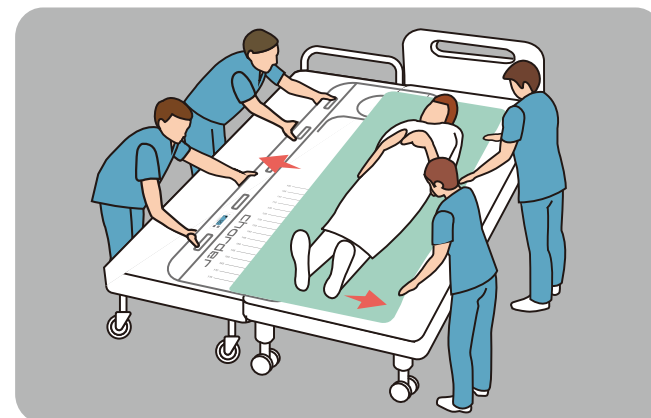

**Step 4** 將移位秤小心平行抽出  
將病患平行拖移至病床

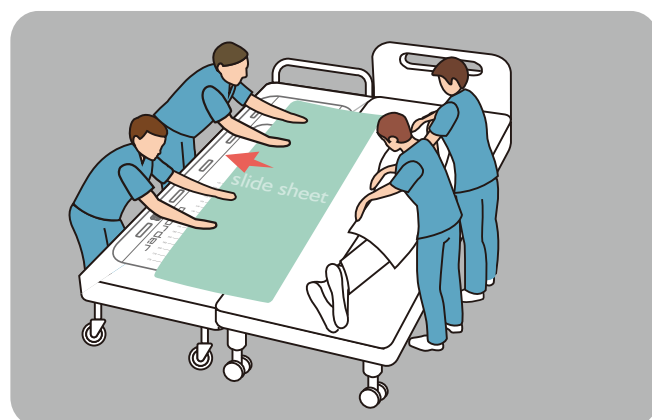

**Step 5** 協助病患側躺，  
小心抽出移位滑布

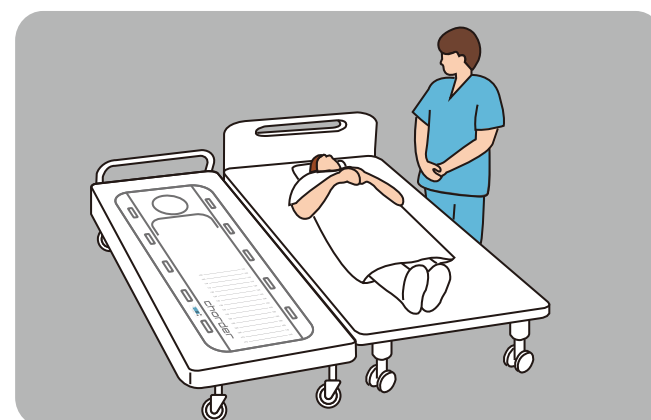

**Step 6** 測量完成。