




使用說明書


HM80P

身高尺

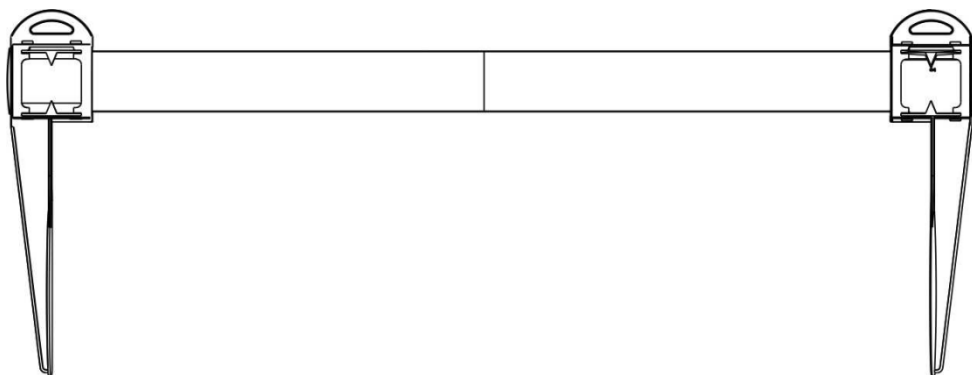

請妥善保存此說明書以供未來查閱之用.

標籤圖示說明(請對照產品本身的標籤)

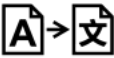	「注意」使用產品前請仔細閱讀說明書和相關文件		請勿作為一般垃圾丟棄。請依照電器用品回收規範處理
	製造商的名稱地址以及產品生產國家		B 類人體接觸設備
	使用產品前請仔細閱讀說明書，依照內容操作器材		產品類別
	產品型錄編號		醫療器材單一識別碼
	生產批次		產品序號
		歐盟代表	
		(度量衡認證機種限定) 顯示值的差異，用來定義和校驗產品	
		設備符合歐盟醫療器材指令 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC. 四位數字表示發證單位代號	
		(度量衡認證機種限定) 產品符合度量衡三級認證	
		(度量衡認證機種限定) M: 符合 2014/31/EU 非自動衡器規範 22: 認證確效年份 (例: 22 = 2022) 0122: 度量衡發證單位編號	
		表示進口商與其地址	
		表示協助資訊轉化為當地語言的公司行號與地址	



警告

本產品非醫療器材僅作為重量測量用途；使用前應詳閱使用說明書

版權宣告

Charder Electronic Co., Ltd.

啟德電子股份有限公司

41262 台中市大里區國中路 103 號

電話：04-2406 3766

傳真：04-2406 5612

官網：www.chardermedical.com

E-mail：info_cec@charder.com.tw

Copyright© Charder Electronic Co., Ltd. 版權所有。

授權產品為本公司其子公司或供應商所有，且受國家著作權法及國際條約保護。未經授權而改裝、修理、或變更本產品、未嚴格遵守本公司操作與維護說明，因而發生損壞、損失或產生費用，則本公司與其子公司或供應商均不予負責。本說明書之內容如有更改，恕不另行通知。產品資訊如有變更，恕不另行通知。



Charder Electronic Co., Ltd.
No. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Taiwan

目錄

I. 安全須知	5
II. 組裝	6
III. 產品操作	7
IV. 產品規格	9
V. 符合性宣告頁	12

I. 安全須知

A. 前言

感謝您選購啟德公司產品。如果您在使用產品時遇到任何說明書未清楚敘述的問題，請洽詢當地的經銷商協助解決您的疑問。使用前請仔細閱讀說明書，了解產品的安裝、使用及日常維護方式等重要資訊。

產品用途

此產品應由專業人士操作，用來量測受測者的身高。

操作注意事項

- 產品應安裝於平穩、平坦、堅硬、防滑的平面。
- 操作產品前，請確保所有零件已確實鎖緊固定。
- 測量精準度需要受測者的腳、背部和頭部筆直對齊。請注意，一整天的身高可能會有所不同。

安全事項

- 預計產品壽命：5 年
- 安裝不當將使保固失效
- 產品應在室內使用
- 請遵照使用溫度，確保量測準確度

產品清潔

- 產品表面建議使用柔軟無絨布搭配 70%-75%酒精進行清潔。
- 請勿使用大量的清水清洗，以免造成內部電子零件的損壞。
- 請勿使用含有腐蝕性的液體或清潔液清潔產品。

產品責任/保固


- 產品保固期間為購買日起 18 個月內，請保留您的收據以證明您的購買日期；如收據遺失則由出廠日起算

- 因不當的使用，不正確的儲存方式，改裝，未授權的拆解或使用者的疏忽掉落所發生的損壞，不在保固範圍內
- 本產品如未經由啟德合格的經銷商使用原廠零件進行檢修，拆解，保養，校正等作業者，不在保固範圍內

意外事件回報

與設備有關的任何嚴重事件應報告給製造商、歐盟代表（如果設備在歐盟成員國使用）和用戶/主體成員國的主管當局。

II. 組裝

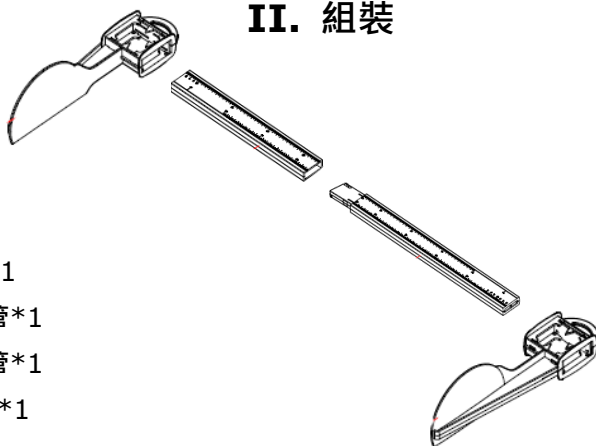


1. 左壓頭板*1
2. 左身高尺管*1
3. 右身高尺管*1
4. 右壓頭板 *1

注意：一側顯示公分；另一個側顯示英寸


III. 產品操作

A. 左手如何使用身高尺

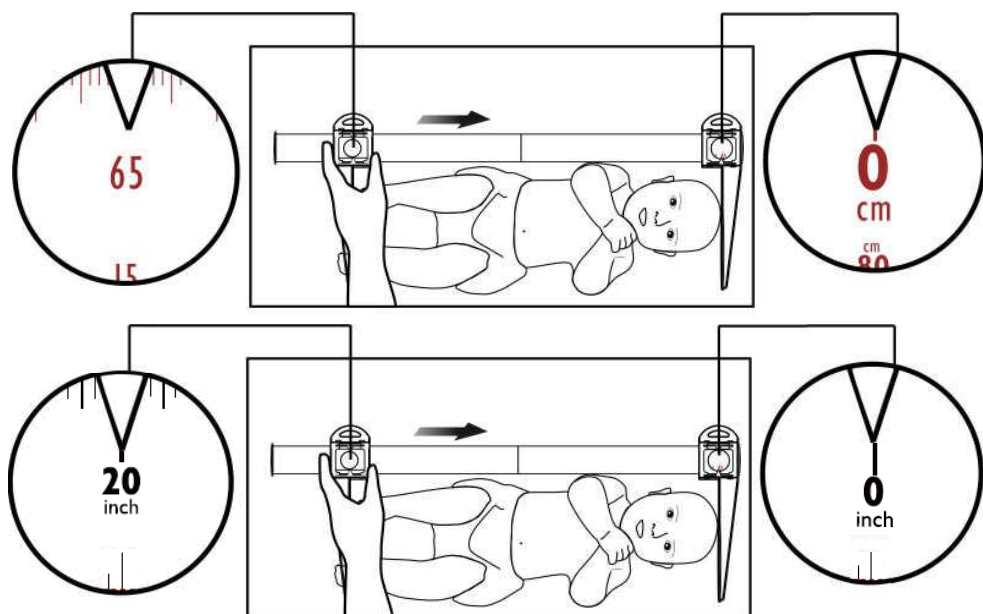

1. 在 0 公分處安裝右壓頭板
2. 輕輕將嬰兒雙腳伸直
3. 滑動左壓頭板待輕靠到嬰兒雙腳.
4. 左側上的讀數是嬰兒的身高

B. 右手如何使用身高尺

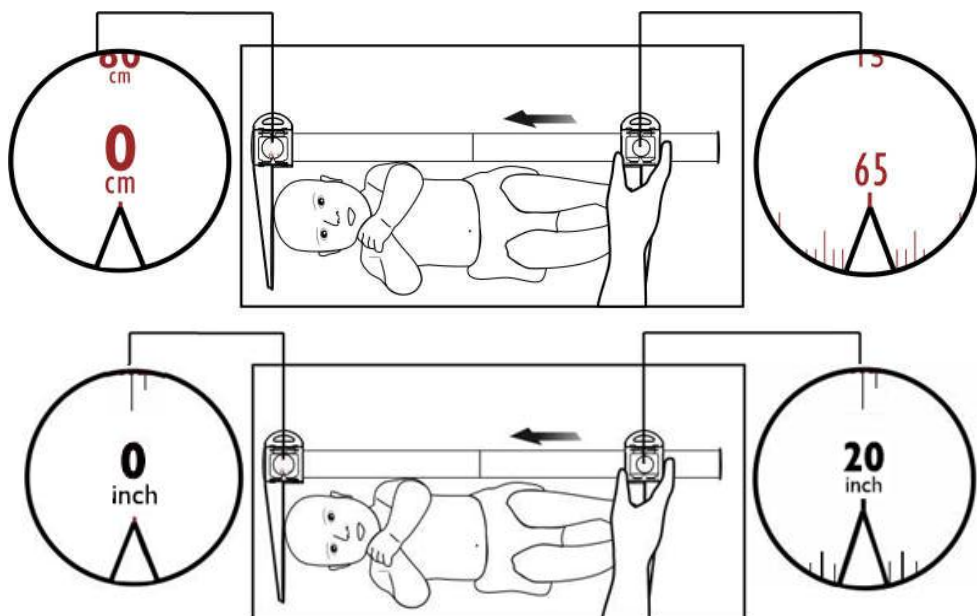

1. 在 0 公分處安裝左壓頭板
2. 輕輕將嬰兒雙腳伸直
3. 滑動右壓頭板待輕靠到嬰兒雙腳
4. 右側上的讀數是嬰兒的身高

IV. 產品規格

型號		HM80P
身高測量	量測範圍	10-80 cm 3 15/16-31 1/2 in
	精準度	1 mm 1/16 in
	誤差範圍	±10 mm
產品尺寸	全尺寸	890(W) x 330(D) x 100(H) mm
產品重量		0.7 kg
操作溫度 & 濕度		5°C~35°C
標準配件		使用說明書 x1

Notes

[illegible]

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

V. 符合性宣告頁

產品依照下列歐盟調和標準製造生產



(EU) 2017/745 Regulation on Medical Devices
Classification: Class I with measuring function

**RoHS Directive 2011/65/EU and Delegated Directive (EU)
2015/863**

授權歐洲代表



Obelis s.a.

Bd Général Wahis, 53
B-1030 Brussels
Belgium

製造商:



啟德電子股份有限公司

41262 台中市大里區國中路 103 號,

CD-IN-00048 [REV002] 05/2023