

1 下載APP

O'care
健康管家



Android



iOS

溫馨提醒：建議開始量測前，可先進入APP登入並完成個人相關資料設定，即可開始進行體重測傳輸操作。



2

本機裝上電池，並確認是否有開啓手機藍牙與定位



3


開啓APP，進入產品連線頁面後，接著上秤量測



如果發現未正常連線，請再上秤量測一次，並檢查手機藍牙與定位是否開啓。

4

完成後下秤，資料將開始傳輸，完成後，你就可以在手機上查看量測結果

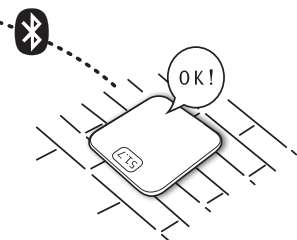

APP的量測數據顯示功能會因產品不同而有所差異



主頁→ 選擇一個功能觀看，點選後，將被放到主頁上方呈現詳細資訊



各式各樣的數據資訊




圖表→ 可以看身體資訊變化歷程



趨勢圖
身體資訊變化歷程



通知→可以在這裡看到各項資訊的通知

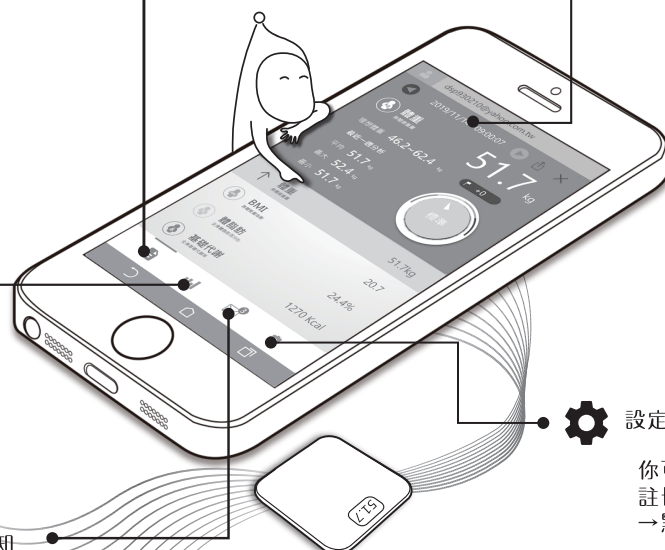

這裡儲存所有的量測記錄與日期顯示

你可以...
在主畫面點選左/右箭頭 → 快速更換到前/後一筆資料

如果你刪除某筆資料，資料上方點選→刪除鍵



設定→可以在這裡進行各項設定的調整

你可以...
註冊新的其他帳戶
→點選"帳戶"→"新增"