



*使用產品前請仔細閱讀說明書
妥當保管以供隨時查閱


安裝電池

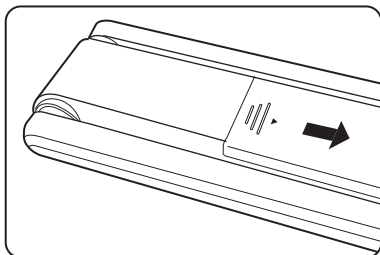

1. 依產品背面的電池盒蓋指示，
推開電池盒蓋。

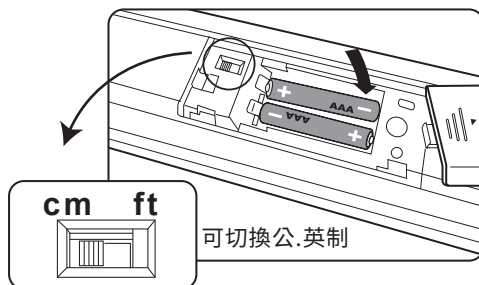




2. 裝入AAA (4號) 電池*2

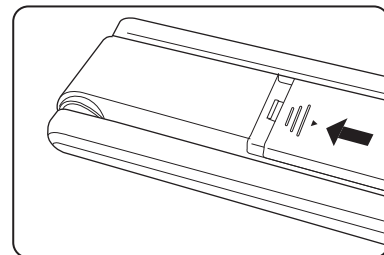








3. 推回電池盒蓋。

準備量測

正確的操作方式

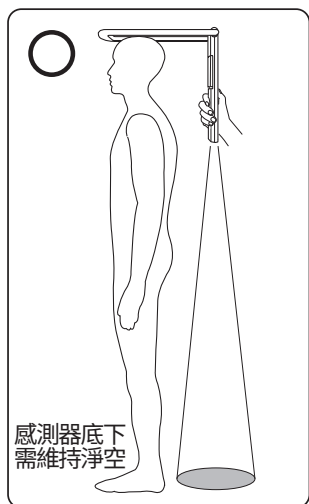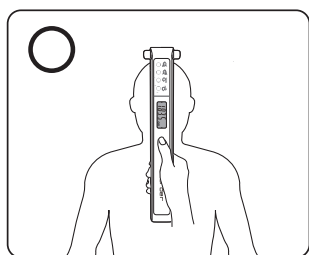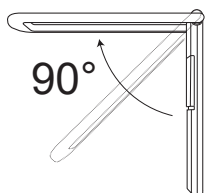


錯誤的操作方式

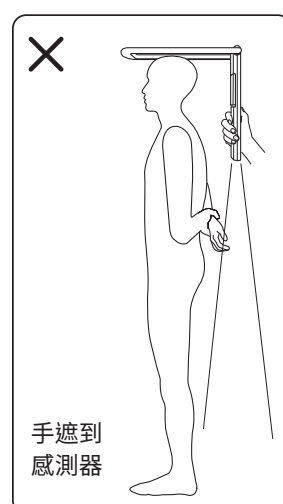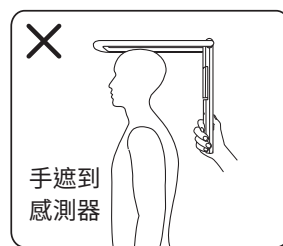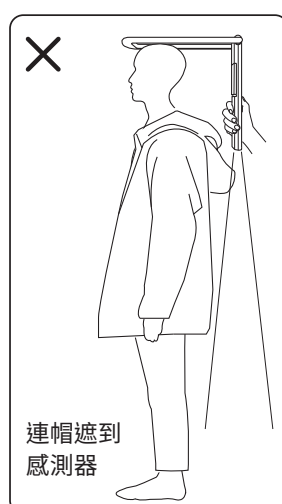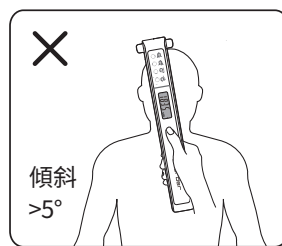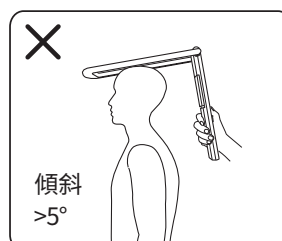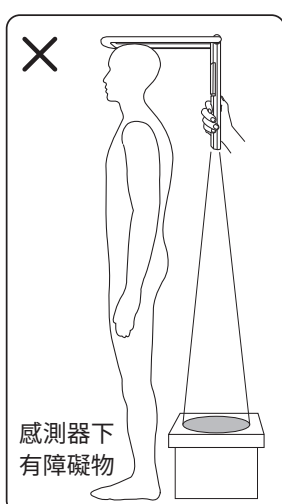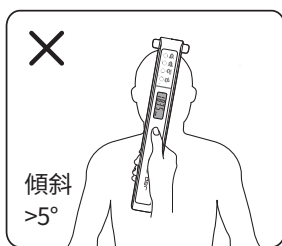


操作步驟

1. 按下 開機

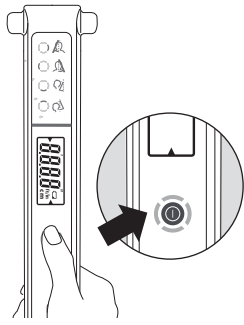

2. 當螢幕顯示 0.0 cm 時，再次按下 以進行測量

*BLE版本螢幕上會顯示無線標誌，顯示結果的同時會自動傳輸至接收平台

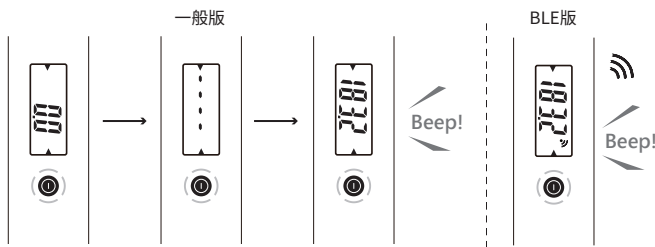

3. 完成測量後，再次按下 即可進行下一次測量。

4. 關機: 長按 2秒直接關機，如沒有任何操作，產品將於20秒後自動關機。

產品規格

型號	HM250U	
身高量測	最高量程	50-250 cm / 1'8"-8'0"
	刻度	0.1 cm / 0.1 in
	誤差值	+/- 1.5 cm
	LCD螢幕尺寸	50 x 20 mm
產品尺寸	收納	349(W) x 64(D) x 23(H) mm
	展開	349(L) x 315(D) x 30(H) mm
產品重量	190 g (不含電池)	
按鍵功能	On/Off/量測	
資料傳輸	BLE (選配)	
電源	AAA (4號) 電池*2	
操作環境	+5°C~+35°C, 15%~85% RH, 700 hPa~1060 hPa	
感應器	超音波	
水平偵測	G-sensor	
傾斜警示	>5°	
自動關機	20秒	

產品依照下列歐盟調和標準製造生產：



歐盟有害物質限用指令 (RoHS)

本產品符合 RoHS 指令 2011/65/EU 及其修訂指令 (EU) 2015/863 之規範

歐盟無線設備指令 (RED)

本產品符合無線設備指令 2014/53/EU (RED) (適用於具備無線傳輸功能之版本)

注意



若進行測量時，因手持歪斜超過 5° 以上，將無法進行測量。此時橘色指示燈將會亮起，請調整身高尺呈垂直狀，在橘色傾斜警示燈熄滅時，即可進行量測。



錯誤訊息



待測者高於250cm



待測者低於50cm



低電量

使用須知

感謝您選購啟德公司產品。如果您在使用產品有遇到任何說明書未清楚敘述的問題，請洽詢當地的經銷商協助解決您的疑問。

操作注意事項

- 身高量測時，受測者必須站直。

安全事項

- 請小心保管電池，避免兒童誤食。若不小心吞下，請立即就醫。
- 預計產品壽命：5年
- 請遵照使用溫度，確保量測準確度。

環境安全

- 所有的電池都含有毒化合物，請依照電器回收規範處理產品清潔
- 建議使用酒精布清潔產品表面。

產品責任/保固

- 產品保固期間為購買日起12個月內，請保留您的收據以證明您的購買日期；如收據遺失則由出廠日起算。
- 因不當的使用，不正確的儲存方式，改裝，未授權的拆解或使用者的疏忽掉落所發生的損壞，不在保固範圍內。
- 本產品如未經由啟德合格的經銷商使用原廠零件進行檢修、拆解、保養、校正等作業者，責不在保固範圍內。


報廢回收處理

- 此產品不應被當作一般家庭廢棄物來處理，請依電子廢棄物回收條例作為處理的準則。您可以聯繫環境保護署以瞭解更多電子廢棄物的處理方式及回收地點或聯繫您當初購買的經銷商處理。

無線傳輸警語

根據低功率射頻器材技術規範：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

若此認證標籤隨同該模組被安裝在主體裝置或設備內而無法看見，則安裝該模組之主體裝置或設備上必須標示： 「內含發射器XXXXXXXXXXXX」

製造業者名稱: 啟德電子股份有限公司
製造業者地址: 臺中市大里區國中路103號

CD-IN-00389 REV03A 06/2026